



# Cricket Wiedereinsatz

## DEUTSCH

### Wiederverwendung

Der Cricket von R82 kann wiederverwendet werden. Bitte beachten Sie die Angaben zur Produktnutzungsdauer in der Gebrauchsanweisung. Die jeweils aktuelle Version der Gebrauchsanweisung finden Sie unter [R82.org](http://R82.org)

### Reinigung

#### Waschen

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Gestell mit pH-neutraler Mischung aus warmen Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel oder 70 prozentiger Desinfektionsmittellösung reinigen und anschließend trocknen lassen. Eine Liste geeigneter Reinigungsmittel finden Sie auf <http://www.r82.org/support/>

Der Bezug kann nach den Pflegehinweisen auf dem Waschetikett gewaschen werden.

Verwenden Sie für die Reinigung der Teile keinen Hochdruckreiniger.

#### Waschanleitung

Das Produkt kann bei 60°C mit einem milden Reinigungsmittel in einer für medizinische Geräte geeigneten Teilwaschanlage gereinigt werden.

Vor der Reinigung alle Zubehörteile entfernen und separat trocknen.

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Verwenden Sie die Trocknungsfunktion der Waschanlage, um das Produkt zu trocknen.

Die Teilwaschanlage sollte auf die folgenden Einstellungen eingestellt werden:

- Wassertemperatur: 60° C
- Waschdauer: 5 Minuten
- Trockentemperatur: 50° C
- Trockendauer: 10 Minuten
- Das Produkt vor Wiedereinsatz bitte vollständig trocknen lassen

### Überprüfung auf defekte oder verschlissene Komponenten

Verbogene, gerissene oder deformierte Teile müssen ersetzt werden. Verschlossene oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionierende Teile sollten ersetzt werden. Kleinere Beschädigungen an lackierten Oberflächen können mit einem Lackstift behoben werden.

Werden andere als Original-R82 Ersatzteile oder Anbauteile verwendet muss die CE-Kennzeichnung entfernt werden. Original-R82 Teile wurden zusammen mit dem Produkt für die bestimmungsgemäße Verwendung getestet und gesetzlichen Prüfverfahren unterzogen.

### Kontrolle

Die folgenden Funktionen müssen gemäß Verwendungszweck kontrolliert und eingestellt werden.

Alle Kontrollen und Einstellungen müssen nach den Vorgaben in der Gebrauchsanweisung erfolgen:


- A. Kontrollieren Sie die Klapp- und Verriegelungsmechanismen auf einwandfreie Funktion. Achten Sie dabei besonders auf Schiebebügel, Fußstütze, Rückenlehne und Verriegelungsmechanismus hinten am Sitz.
- B. Prüfen Sie den Zustand der Reißverschlüsse.
- C. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit von Tasten und Verstellmechanismus am Schiebebügel.
- D. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse an den Hinterrädern einwandfrei funktioniert.
- E. Prüfen Sie, ob die Fußstütze in der Höhe verstellt, geneigt sowie ver- bzw. entriegelt werden kann.
- F. Kontrollieren Sie die Fix Locks auf ordnungsgemäße Funktion.
- G. Prüfen Sie, ob sich Räder und Radlager frei drehen.
- H. Stellen Sie bei Verschreibung sicher, dass Gebrauchsanweisung und alle Etiketten vorhanden und intakt sind.

Beachten Sie, dass die Produktlebensdauer begrenzt ist, vor allem wenn das Produkt für die Nutzung über einen längeren Zeitraum verschrieben wird.


### Entsorgung

Am Ende des Produktlebenszyklus sollte das Produkt nach den einzelnen Materialien getrennt ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt oder entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für eine genaue Beschreibung der einzelnen Materialien an Ihren Händler vor Ort. Für Informationen über die Möglichkeiten einer umweltfreundlichen Entsorgung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

## DEUTSCH

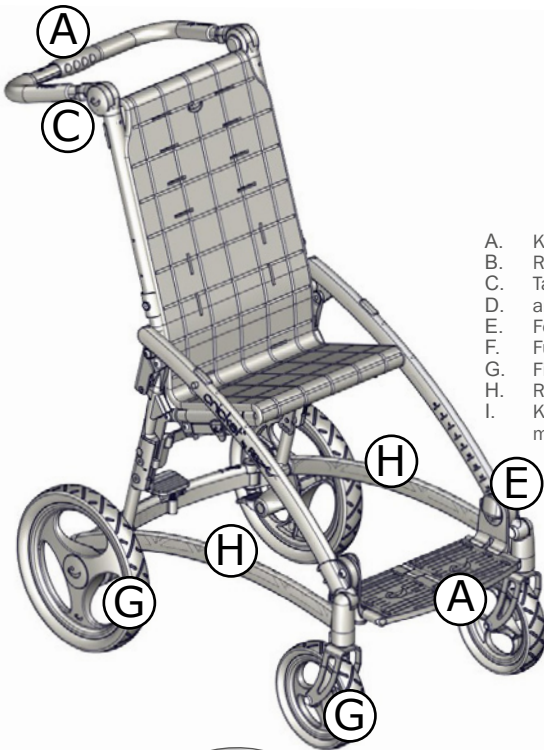

- A. Klappmechanismus
- B. Reißverschlüsse für Kantelung
- C. Tasten und Verstellmechanismus am Schiebebügel
- D. Feststellbremse
- E. Fußstützenverstellung
- F. Fix Locks
- G. Räder
- H. Kennzeichnungsschilder, Seriennummer und Hersteller
- I.

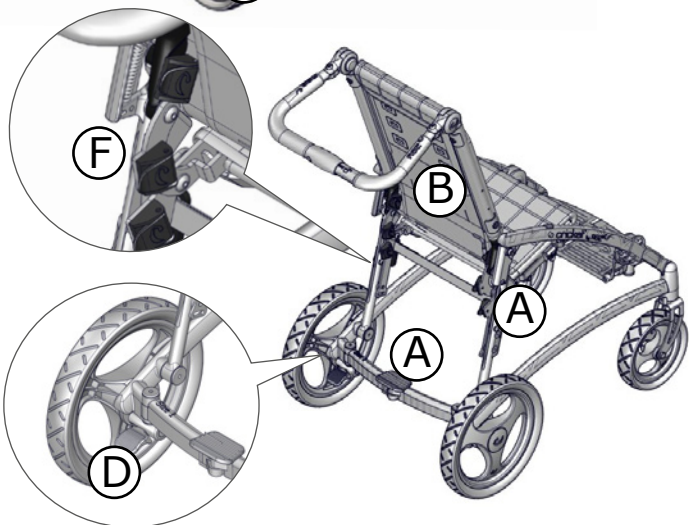

nothing compares to a smile!



#### R82 A/S

Parallevej 3  
8751 Gedved  
Denmark  
Tel +45 79 68 58 88  
Fax +45 75 66 51 92  
R82@R82.com  
R82.org

Supplier for:  
Rest of the world

#### R82 UK Ltd.

England  
Tel. +44 (0)121 561 2222  
Fax +44 (0)121 559 5437  
R82uk@R82.com  
R82.co.uk

Supplier for:  
United Kingdom, Ireland

#### R82 GmbH

Germany  
Tel +49 (0)6132 710 70  
Fax +49 (0)6132 710 710  
R82de@R82.com  
R82.de

Supplier for:  
Germany, Switzerland, Austria

#### R82 Nederland B.V.

The Netherlands  
Tel +31 (0)513 68 16 86  
Fax +31 (0)513 68 19 84  
R82nl@R82.com  
R82.nl  
R82.be

Supplier for:  
The Netherlands, Belgium

#### R82 au Pty Limited

Tel +61 (02) 8213 6666  
Fax +61 (02) 8213 6655  
R82.com.au  
facebook.com/R82Australia

Supplier for:  
Australia

Find your local dealer

**R82.org**

DISTRIBUTOR: