

Flamingo Untergestell und Flamingo sitz - Wiedereinsatz

DEUTSCH

Wiederverwendung

Der Flamingo von R82 kann wiederverwendet werden. Bitte beachten Sie die Angaben zur Produktnutzungsdauer in der Gebrauchsanweisung. Die jeweils aktuelle Version der Gebrauchsanweisung finden Sie unter R82.org

Reinigung

Waschen

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Das Produkt mit pH-neutraler Mischung aus warmen Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel oder 70 prozentiger Desinfektionsmittelölösung reinigen und anschließend trocknen lassen. Eine Liste geeigneter Reinigungsmittel finden Sie auf <http://www.r82.org/support/>

Verwenden Sie für die Reinigung der Teile keinen Hochdruckreiniger.

Waschanleitung

Das Produkt kann bei 60 °C mit einem milden Reinigungsmittel in einer für medizinische Geräte geeigneten Teilwaschanlage gereinigt werden.

Vor der Reinigung alle Zubehöerteile entfernen und separat trocknen.

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Verwenden Sie die Trocknungsfunktion der Waschanlage, um das Produkt zu trocknen.

Die Teilwaschanlage sollte auf die folgenden Einstellungen eingestellt werden:

- Wassertemperatur: 60 ° C
- Waschkdauer: 5 Minuten
- Trockentemperatur: 50 ° C
- Trockendauer: 10 Minuten
- Das Produkt vor Wiedereinsatz bitte vollständig trocknen lassen

Überprüfung auf defekte oder verschlissene Komponenten

Verbogene, gerissene oder deformierte Teile müssen ersetzt werden. Verschlossene oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionierende Teile sollten ersetzt werden. Kleinere Beschädigungen an lackierten Oberflächen können mit einem Lackstift behoben werden.

Werden andere als Original-R82 Ersatzteile oder Anbauteile verwendet muss die CE-Kennzeichnung entfernt werden. Original-R82 Teile wurden zusammen mit dem Produkt für die bestimmungsgemäße Verwendung getestet und gesetzlichen Prüfverfahren unterzogen.

Kontrolle

Die folgenden Funktionen müssen gemäß Verwendungszweck kontrolliert und eingestellt werden.

Alle Kontrollen und Einstellungen müssen nach den Vorgaben in der Gebrauchsanweisung erfolgen:


- A. Zubehör kann in die Vorrichtungen oben an der Rückenlehne eingesteckt und mit Hilfe der in den Vorrichtungen angebrachten Knäufe und Hebel verriegelt werden.
- B. Die Rückenlehne kann eingestellt und arretiert werden
- C. Die Rollen auf reibungslosen Lauf überprüfen, und dass alle Radsperrren/-bremsen leicht aktiviert werden können.
- D. Das Produkt kann zur Aufbewahrung und zum Transport zusammengeklappt werden
- E. Der Rahmen ist höhenverstellbar
- F. Die Sitzkantelung kann eingestellt und arretiert werden
- G. Einstelloptionen für die Fußstützen, der Winkel kann arretiert und die Teleskoprohre können fest eingestellt werden
- H. Vorrichtungen und Schnallen auf Verschleiß prüfen
- I. Dass Muttern und Schrauben am Produkt angezogen sind.
- J. Das gesamte Produkt auf Risse oder verschlossene oder defekte Teile prüfen
- K. Stellen Sie sicher, dass Gebrauchsanweisung und alle Etiketten vorhanden und intakt sind

Beachten Sie, dass die Produktlebensdauer begrenzt ist, vor allem wenn das Produkt für die Nutzung über einen längeren Zeitraum verschrieben wird oder ein Nutzerwechsel stattfindet.

Entsorgung

Am Ende des Produktlebenszyklus sollte das Produkt nach den einzelnen Materialien getrennt ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt oder entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für eine genaue Beschreibung der einzelnen Materialien an Ihren Händler vor Ort. Für Informationen über die Möglichkeiten einer umweltfreundlichen Entsorgung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

DEUTSCH

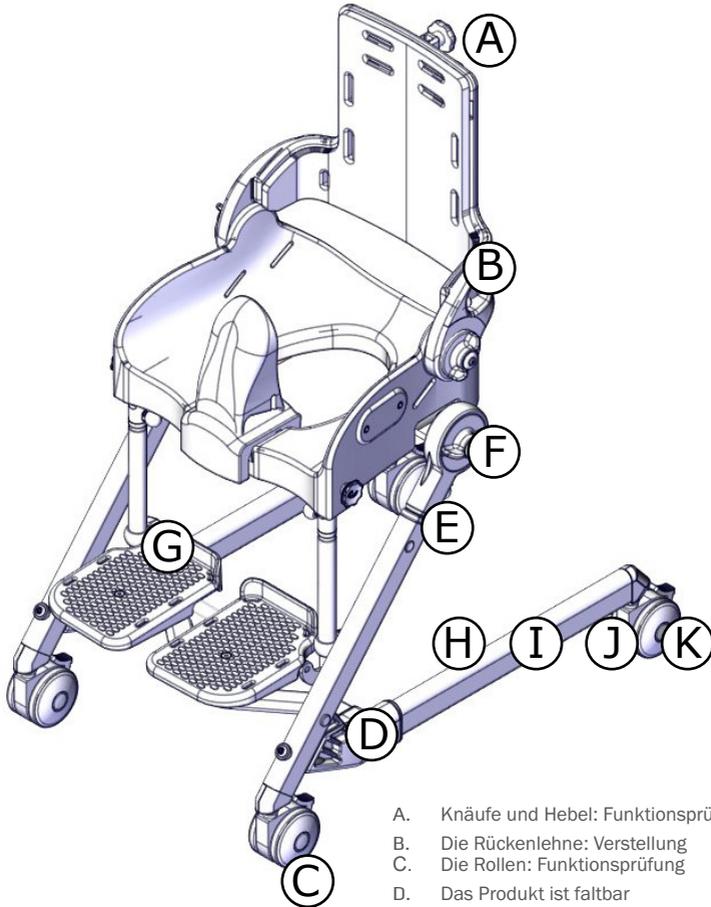

- A. Knäufe und Hebel: Funktionsprüfung
- B. Die Rückenlehne: Verstellung
- C. Die Rollen: Funktionsprüfung
- D. Das Produkt ist faltbar
- E. Rahmenhöhe: Verstellung
- F. Sitzkantelung: Funktionsprüfung
- G. Die Einstelloptionen für die Fußstützen: Funktionsprüfung
- H. Gurte und Klappschalen: Sitzprüfung
- I. Muttern und Schrauben am Produkt angezogen Festziehen
- J. Risse defekte oder verschlissene Teile: Sitzprüfung
- K. Gebrauchsanweisung und alle Etiketten vorhanden und intakt

