




60 cm



120 kg

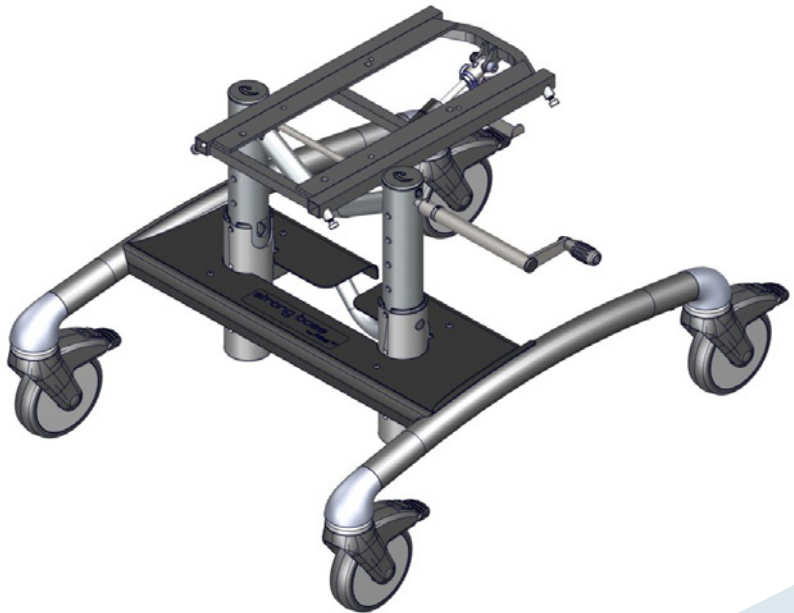

## Strong Base












# Bedienungsanleitung

EN 12182

EN 12183


2017.01-rev.02.5

## Inhaltsverzeichnis

	Sicherheitshinweise .....	3
	Auspacken .....	4
	Einstellen der Höhe.....	5 - 8
	Einstellen der Neigung.....	9
	Lenkrollen .....	10 - 11
	Montage von Adapter und Sitzeinheit.....	12 - 14
	Federkrafteinstellung an der Gasdruckfeder .....	15
	Übertragungstechniken .....	16
	Transporthinweise .....	16
	Typeschild und Seriennummer.....	16
mm (inch)	Maße .....	17
	Inhaltsverzeichnis: Zubehör .....	18
	Informationen .....	19 - 22
	Zubehör.....	23 - 26
	Liste der verwendeten Materialien .....	27




## Sicherheitshinweise

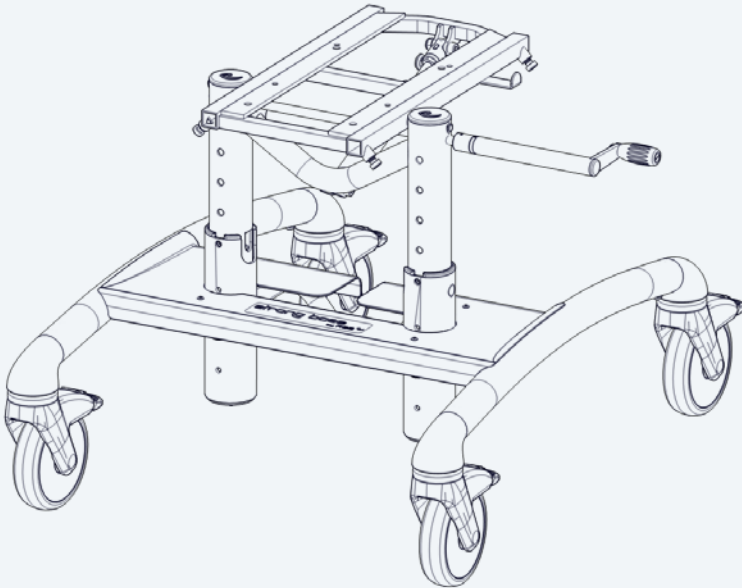

<120 kg  
<264 lb




<120 kg  
<264 lb

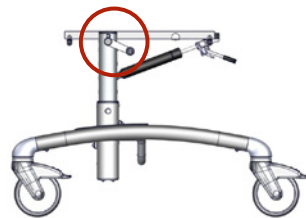




1.

Auspacken

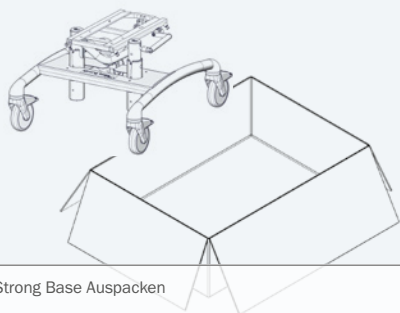


Strong Base Auspacken

2.

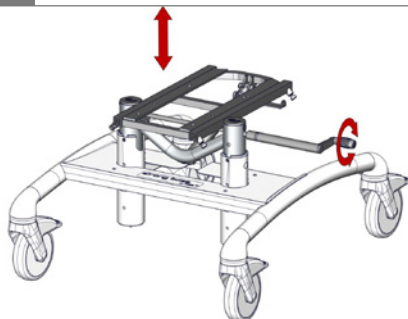

Drehkurbel ausklappen und anschließend Aufnahme durch Drehen im Uhrzeigersinn nach oben fahren.


3.

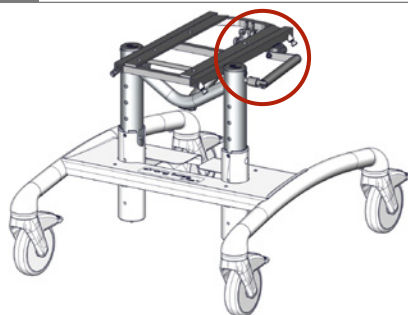

Drehkurbel in Ruhestellung zurückklappen.

4.


⬡ 6 mm, 🔑 13 mm

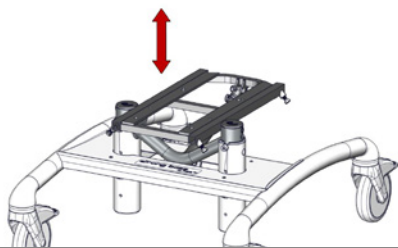

Sicherungsbolzen, Unterlegscheiben und Muttern mit 6 mm Inbusschlüssel und 13 mm Schraubenschlüssel montieren, um Höhe zu fixieren.

5.

⬡ 6 mm, 🔑 13 mm - 2,5 Nm

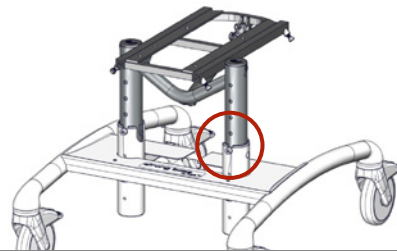


Sicherungsbolzen, Unterlegscheiben und Muttern mit 6 mm Inbusschlüssel und 13 mm Schraubenschlüssel montieren, um Höhe zu fixieren.




1.

## Einstellen der Höhe

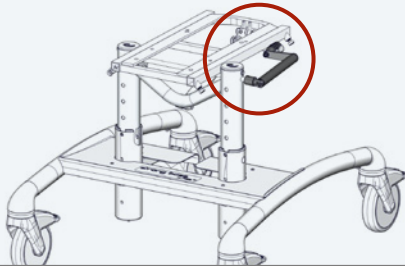


Höhenverstellung mit Drehkurbel

2.

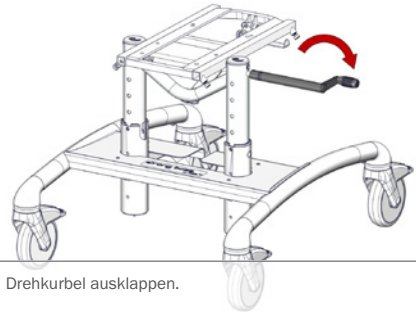


Drehkurbel ausklappen.

3.

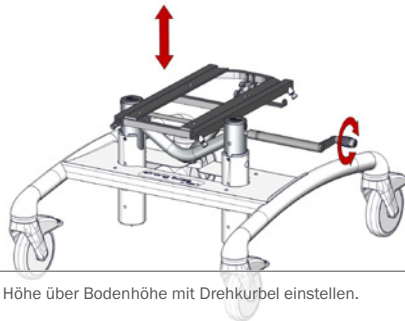

Höhe über Bodenhöhe mit Drehkurbel einstellen.

4.

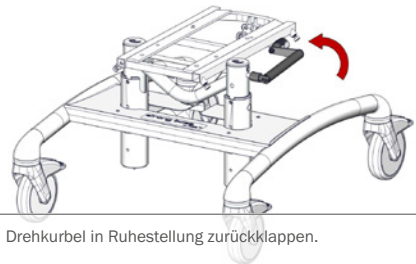


Drehkurbel in Ruhestellung zurückklappen.

5.




01

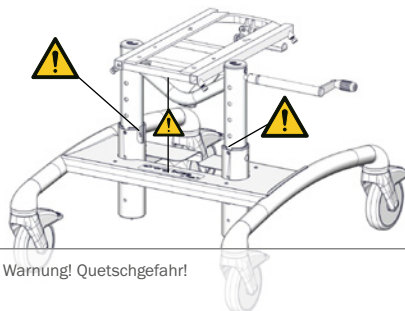

Warnung! Quetschgefahr!


6.

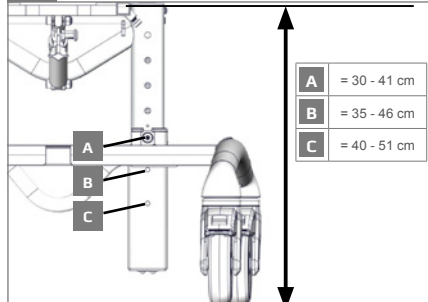

Höhenverstellungstabelle


1.

## Einstellen der Höhe

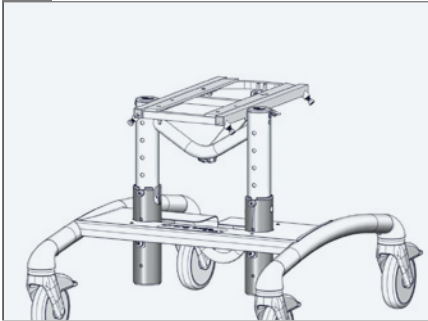

Höhenverstellung mit Rahmenrohren


2.

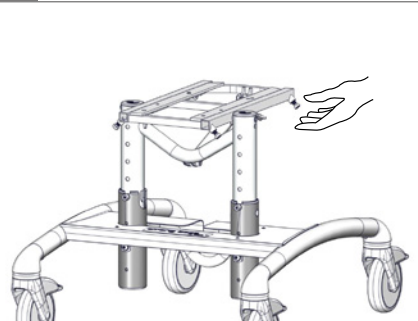

Achtung! Adapterplatte unterlegen, um einen Absturz bei der Höhenverstellung zu vermeiden.

3.


⊕ 5 mm

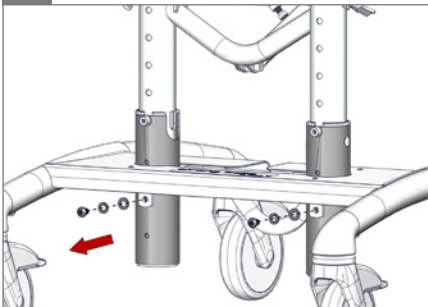

Markierte Schrauben und Unterlegscheiben mit 5 mm Inbusschlüssel lösen, entfernen und zur späteren Verwendung (Abbildung 7) aufbewahren.


4.

⊕ 5 mm

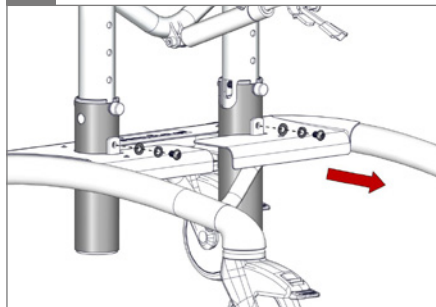


Markierte Schrauben und Unterlegscheiben mit 5 mm Inbusschlüssel lösen, entfernen und zur späteren Verwendung (Abbildung 8) aufbewahren.

5.

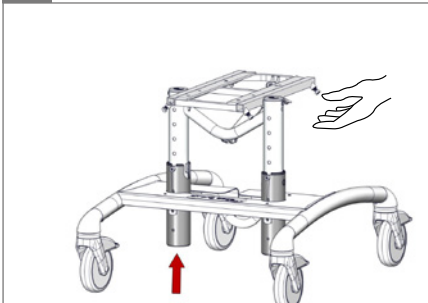

Höhe einstellen. Achtung! Adapterplatte unterlegen, um einen Absturz bei der Höhenverstellung zu vermeiden.


6.

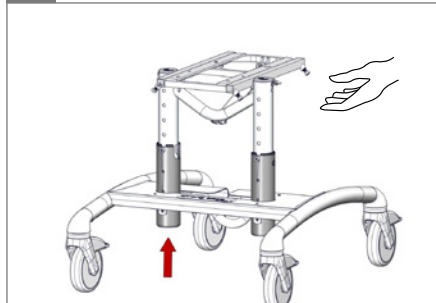

Höhe einstellen




7.

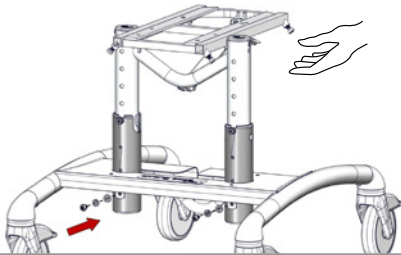

Nach Abbildung 3 entfernte Schrauben und Unterlegscheiben mit 5 mm Inbusschlüssel montieren, um Rohre am Rahmen zu befestigen.


8.

5 mm, 13 mm - 2,5 Nm

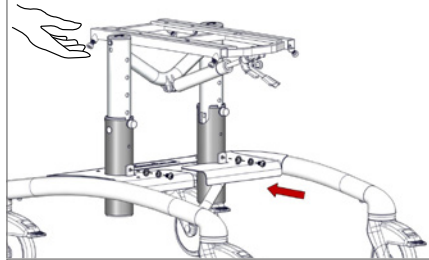


Nach Abbildung 4 entfernte Schrauben und Unterlegscheiben mit 5 mm Inbusschlüssel montieren, um Rohre am Rahmen zu befestigen.

9.

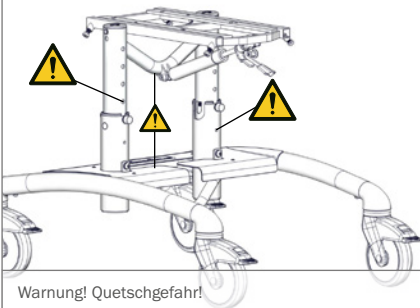

Warnung! Quetschgefahr!

10.

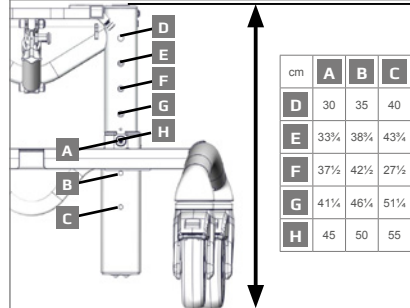


Höhenverstellungstabelle

cm	A	B	C
D	30	35	40
E	33½	38½	43½
F	37½	42½	27½
G	41½	46½	51½
H	45	50	55


1.

## Einstellen der Höhe

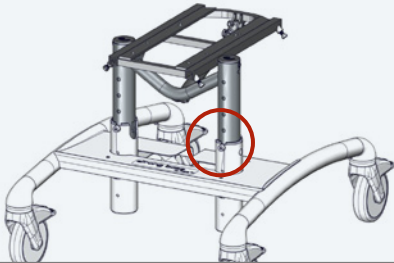

Höhenverstellung ohne Drehkurbel


2.

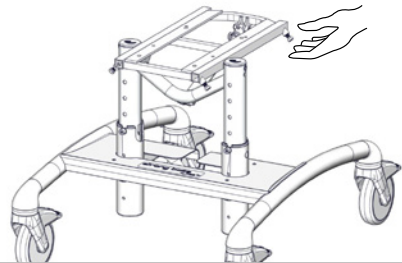

Achtung! Adapterplatte unterlegen, um einen Absturz bei der Höhenverstellung zu vermeiden.


3.

⊕ 6 mm, ⚙ 13 mm

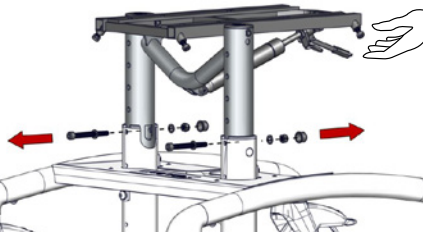

Sicherungsbolzen, Unterlegscheiben und Muttern mit 6 mm Inbusschlüssel und 13 mm Schraubenschlüssel entfernen.


4.

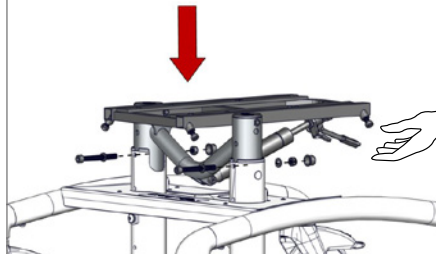

Höhe über Bodenhöhe einstellen

5.


⊕ 6 mm, ⚙ 13 mm - 2,5 Nm

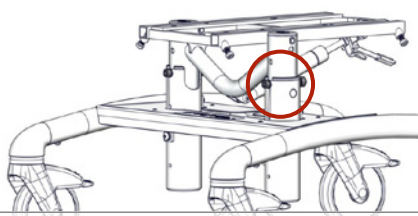

Sicherungsbolzen, Unterlegscheiben und Muttern mit 6 mm Inbusschlüssel und 13 mm Schraubenschlüssel montieren.

6.

01

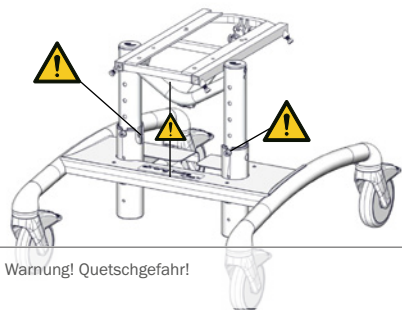

Warnung! Quetschgefahr!






### 1. Einstellen der Neigung




### 2.

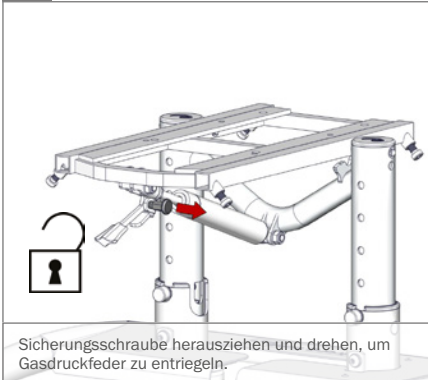


Sicherungsschraube herausziehen und drehen, um Gasdruckfeder zu entriegeln.

### 3.

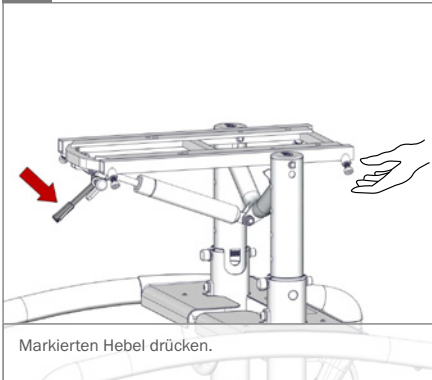


Markierten Hebel drücken.

### 4.

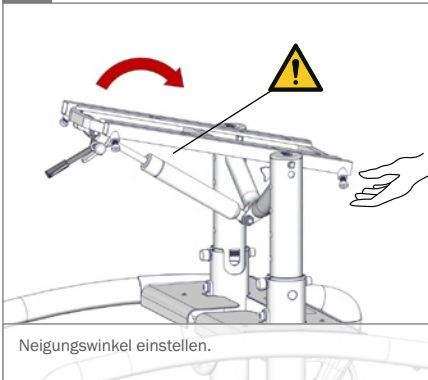


Neigungswinkel einstellen.

### 5.

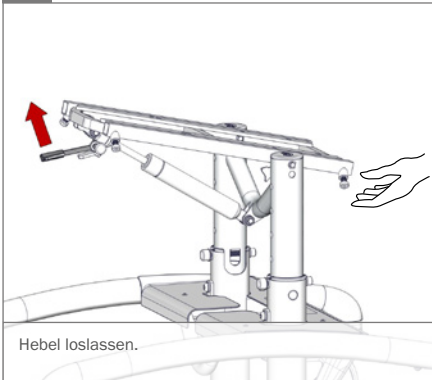

Hebel loslassen.

### 6.

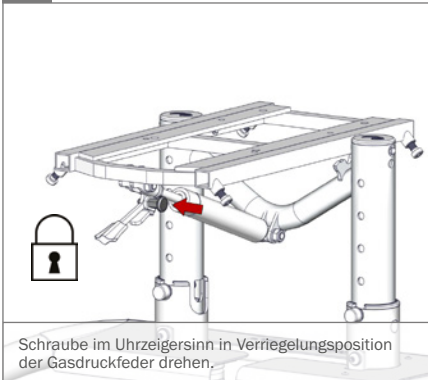

Schraube im Uhrzeigersinn in Verriegelungsposition der Gasdruckfeder drehen.




1.

## Lenkrollen




2.

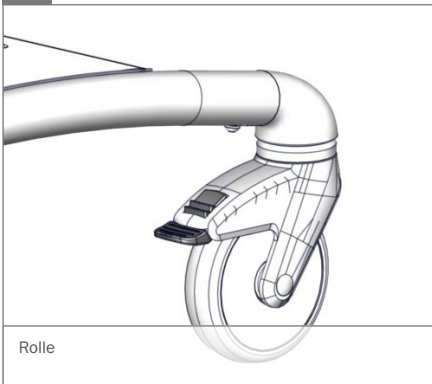


Rolle

3.

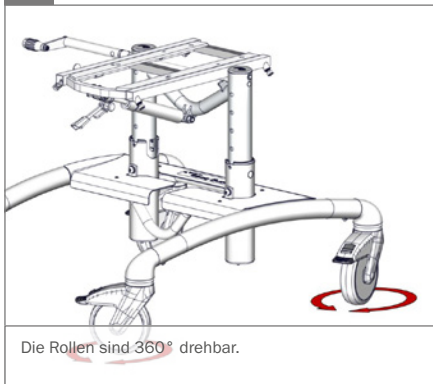


Die Rollen sind 360° drehbar.

4.

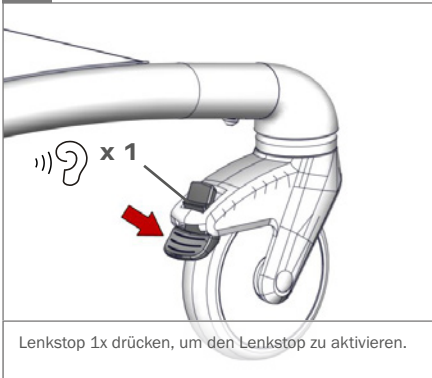

Lenkstop 1x drücken, um den Lenkstop zu aktivieren.

5.

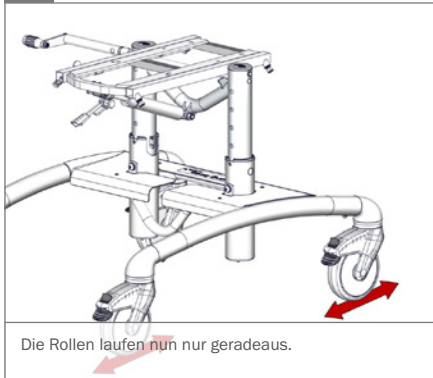

Die Rollen laufen nun nur geradeaus.




1.

Lenkrollen




2.

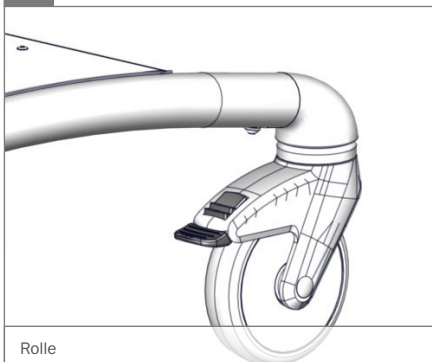


Rolle

3.

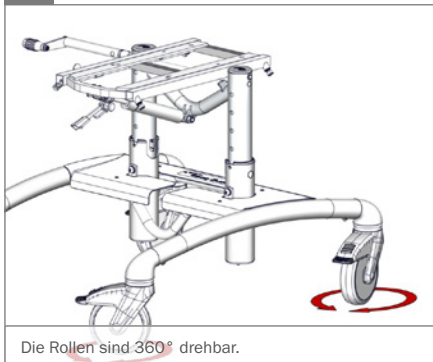


Die Rollen sind 360° drehbar.

4.

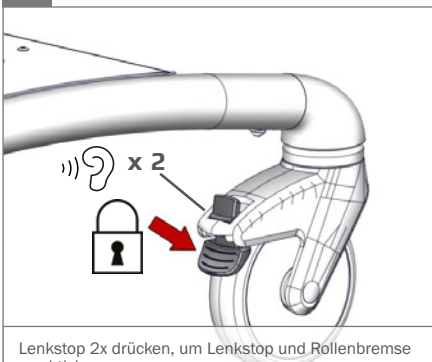


Lenkstop 2x drücken, um Lenkstop und Rollenbremse zu aktivieren.


5.

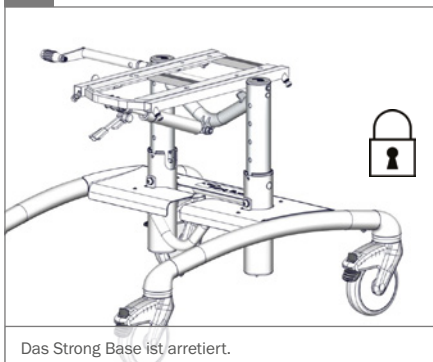

Das Strong Base ist arretiert.

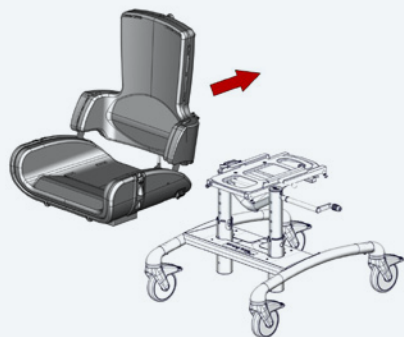**1. Montage der Sitzeinheit mit Adapter****2.**


Strong Base und Adapterplatte

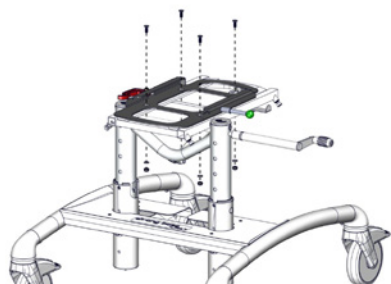**3.  $\odot$  4 mm,  $\text{⌘}$  10 mm - 2,5 Nm**


Adapterplatte auf Strong Base aufsetzen und mit 4 mm Inbusschlüssel und 10 mm Schraubenschlüssel am Gestell befestigen.

**4.**

Sitzeinheit und Strong Base mit Adapterplatte

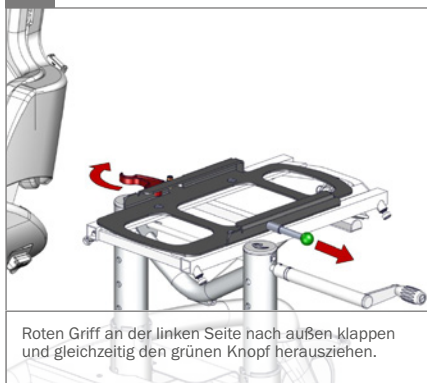**5.**


Roten Griff an der linken Seite nach außen klappen und gleichzeitig den grünen Knopf herausziehen.

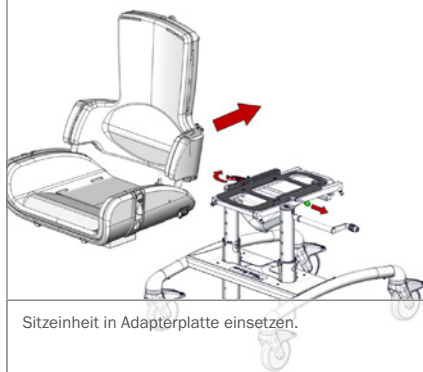**6.**

Sitzeinheit in Adapterplatte einsetzen.



7.

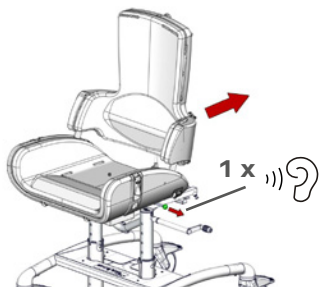


Grünen Knopf eine Raste herausziehen, um die Sitzeinheit auf dem Gestell einzustellen oder um die Sitzeinheit vom Gestell abzunehmen.

8.




Verwenden Sie nicht das erste Loch, in das der Sitz einrastet. Dieses ist ein Sicherheitsloch, das den Sitz auffängt, wenn den roten Griff versehentlich gelöst wird.

9.

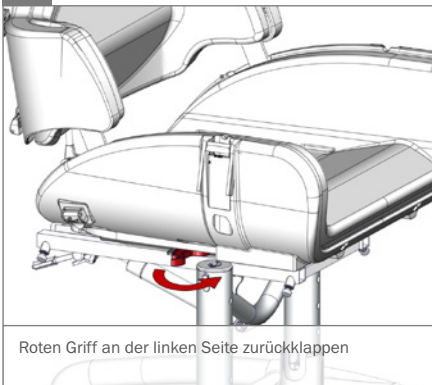

Roten Griff an der linken Seite zurückklappen

10.

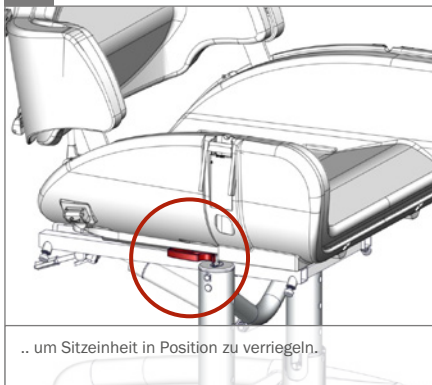

.. um Sitzeinheit in Position zu verriegeln.




## 1. Montage der Sitzeinheit ohne Adapter



Montage der Sitzeinheit ohne Adapter

## 2. $\text{O} 6 \text{ mm} - 2,5 \text{ Nm}$

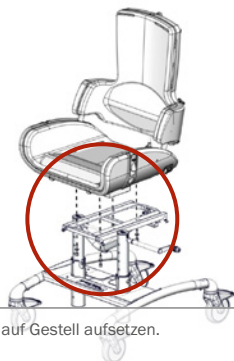


Sitzeinheit auf Gestell aufsetzen.

## 3. $\text{O} 6 \text{ mm} - 2,5 \text{ Nm}$




Sitzeinheit mit Inbusschrauben und Unterlegscheiben mit 6 mm Inbusschlüssel montieren.



## 4.

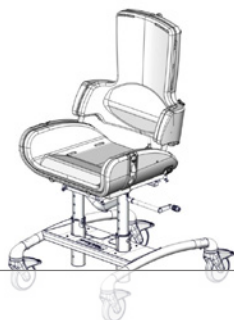

## 5.

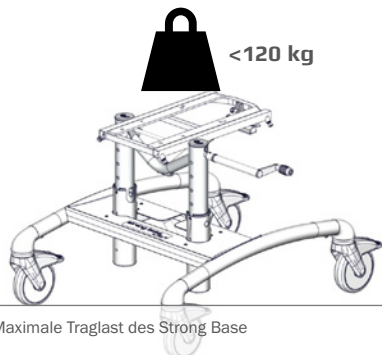


Maximale Traglast des Strong Base

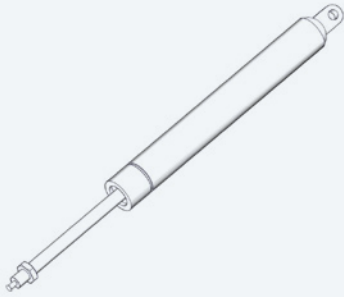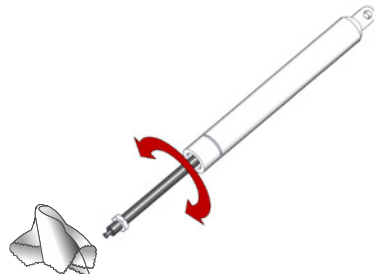**1. Federkrafteinstellung an der Gasdruckfeder****2.**

Achtung! Bei Einstellarbeiten an der Gasdruckfeder immer ein Tuch zwischen 17 mm Schraubenschlüssel und Einstellmutter legen.

**3.**

⌘ 17 mm

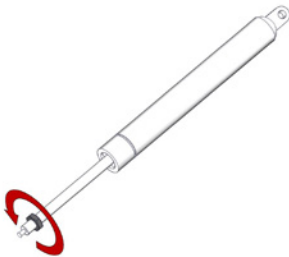

Für stärkere Dämpfung (trägere Reaktion) Kolbenstange der Gasdruckfeder gegen den Uhrzeigersinn drehen.




**4.**

⌘ 17 mm




Für geringere Dämpfung (schnellere Reaktion) Kolbenstange der Gasdruckfeder im Uhrzeigersinn drehen.


## Übertragungstechniken

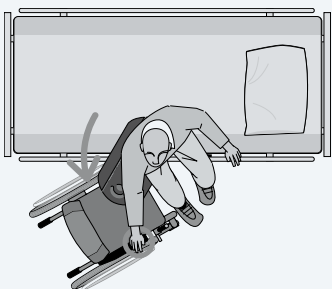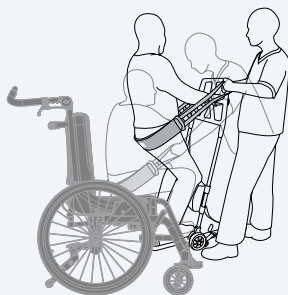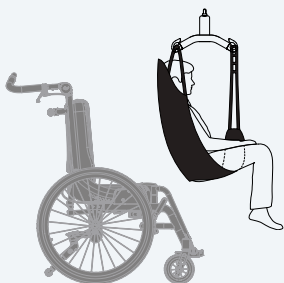

## Transporthinweis

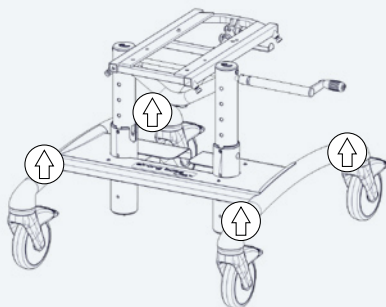

## Typeschild und Seriennummer

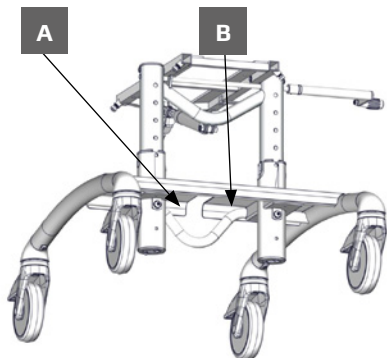

A

XXXXXX Max load: xxxx kg  
 DMR ver.: XXXX Max load: xxxx kg  
 Art. no.: XXXXXXXX  
 Product: XXXXXXXX - Size X



(xx)xxxxxxxxxxxxxxxxxx(xx)xxxxxx(xx)xxxxxx

B

**R82** 

Parallelvej 3  
 DK-8751 Gedved  
 R82.org  
 Made in Denmark



YYYY-MM-DD



## Maße

mm



Breite (inkl. Schiebegriff)

600

600



Länge, Faltmaß

700

700



Höhe, Faltmaß

300 - 550

300 - 510

Gesamthöhe inkl. Schiebegriff

795 - 1045

795 - 1045

Gesamtlänge inkl. Schiebegriff

300 - 550

300 - 550

Sitzhöhe über Boden, Vorderkante/  
hinten. x:panda 4

420 - 670

420 - 630

Sitzhöhe über Boden, Vorderkante/  
hinten. + Panda Futura 5

450 - 700

450 - 660

Abstand Fußbrett bis Adapterplatte

160 - 350

160 - 350



Rückenwinkel

-10° - +25°

-10° - +25°



Gewicht, gesamt

14 kg

15,5 kg

Max. Belastbarkeit (Nutzer und  
Zubehör)

120 kg

120 kg


## Inhaltsverzeichnis: Zubehör



Montage des adapters  
auf das Strong base  
9996097265  
Seite 23



Montage des Schiebe-  
bügels  
9996097703  
Seite 24 - 25

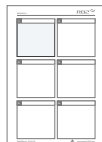

Montage der Fußstütze  
9996097118  
Seite 26

## DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Wahl des neuen Produktes von R82 - einem weltweiten Lieferanten von Hilfsmittel und Therapiegeräte für behinderte Kinder und Jugendliche. Um alle Möglichkeiten des Produktes kennen zu lernen, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung zu lesen und für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

### Zweckbestimmung

Das Strong Base ist ein Untergestell für größere Sitzeinheiten. Es ist stabil und robust und eignet sich für die Sitzeinheiten Panda Futura 5, x;panda 4 oder auch individuelle Sitzschalen. Das Strong Base ist in einer Größe und in 2 Varianten erhältlich, mit einer manuellen Höhenstellung bzw. mit einer Höheneinstellung über eine Spindel. Diese Produkt ist nur für den Einsatz im Innenbereich zugelassen und darf nur in einem Notfall in den Außenbereich gebracht werden.

### Mitgelieferte Werkzeuge:

- 5 & 6 mm Inbusschlüssel, 13 mm Schraubenschlüssel.

### Konformitätserklärung -

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte. Das CE Zeichen muss entfernt werden, wenn das R82 Produkt umgebaut, verändert oder in Kombination mit Produkten von anderen Herstellern verwendet wird. Das CE Zeichen erlischt ebenfalls, wenn nicht R82 Originalersatzteile oder kein R82 Originalzubehör verwendet wird.

### R82 Garantie

R82 gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf die Verarbeitung und das Material sowie eine Garantie von 5 Jahren auf das Metallgestell (gegen Bruchschäden an Schweißnähten). Die Garantie erlischt, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur täglichen Pflege und/oder Wartung gemäß den vom Hersteller vorgegebenen und/oder in der User Guide genannten Richtlinien und Intervallen nicht nachkommt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von R82 unter „Download“.

Ein Garantieanspruch besteht nur, wenn das R82-Produkt in demselben Land benutzt wird, in dem es erworben wurde, und wenn sich das Produkt anhand seiner Seriennummer identifizieren lässt. Von der Garantie ausgeschlossen sind Unfallschäden sowie Schäden, die durch falsche Verwendung oder Fahrlässigkeit verursacht wurden. Die Garantie beinhaltet keine Teile, die einem Verschleiß oder einer normalen Abnutzung unterliegen, z.B. Reifen, Polster usw.. Diese Verschleißteile müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf getauscht werden.

Die Garantie erlischt, wenn andere als Originalteile/Originalzubehörteile verwendet werden oder wenn das Produkt nicht den Richtlinien und Abständen entsprechend gewartet, repariert oder verändert wird, die vom Lieferanten vorgeschrieben und/oder im User Guide aufgeführt sind. R82 behält sich das Recht vor, das fragliche Produkt sowie die relevanten Unterlagen in Augenschein zu nehmen, bevor ein Garantieanspruch anerkannt wird, und zu entscheiden, ob das defekte Produkt ausgetauscht oder repariert wird. Der Kunde ist verpflichtet, das fragliche Produkt (zu dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird) an die Kaufadresse zurückzugeben.

## DEUTSCH

## Symbole



Für den Innengebrauch



Bedienungsanleitung

Die neueste Version der User Guide ist auf der R82 Internetseite verfügbar und steht zum Download bzw. Ausdruck zur Verfügung



Warnung

Dieses Symbol erscheint in der Bedienungsanleitung zusammen mit einer zu den nachfolgenden Anleitungen gehörenden Nummer. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf Situationen, die für das Produkt oder den Betreuer ein Sicherheitsrisiko darstellen können.

01 = Quetschgefahr



Verbot

Nicht auf der Fußstütze stehen



Achtung

Ziehen oder heben Sie den Rollstuhl, insbesondere auf Treppen, nicht mit dem Schiebebügel bzw. den Schiebegriffe



Manuelle Reinigung

Halten Sie das Produkt sauber um eine optimale Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten



Inspektion



Achten Sie auf das Klicken.



Waschsymbol



Feinwäsche bei höchstens 60 °C

### Recycling Information -

Am Ende des Produktlebenszyklus, kann das Produkt durch das Trennen und Separieren der einzelnen Materialien entsorgt und recycled werden. Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf die lokalen Behörden, um sich über die Möglichkeit der umweltfreundliche Wiederverwendung der einzelnen Materialien des Produktes zu informieren. Bitte kontaktieren Sie die lokalen Behörden, um sich über die Möglichkeiten einer umweltfreundlichen Wiederverwertung des gebrauchten Produktes zu informieren.

## DEUTSCH

### Sicherheitshinweise

Zeichen, Symbole und Anleitungen sind auf diesem Produkt angebracht und müssen auch während der gesamten Lebensdauer des Produktes angebracht bleiben und deutlich lesbar sein. Beschädigte, unlesbare oder entfernte Zeichen, Symbole oder Anleitung müssen sofort ersetzt werden. Setzen Sie sich hierzu mit dem zuständigen Fachhandel in Verbindung.

### Eltern, Therapeuten, Pflegedienst

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam vor dem ersten Gebrauch des Produktes und verwahren Sie diese für den späteren Gebrauch. Die Sicherheit des Nutzers kann beeinträchtigt werden, wenn Sie nicht den Anweisungen der Anleitung folgen.
- Nutzen Sie das Hilfsmittel immer nur zu dem Anwendungszweck, für den es von R82 entwickelt wurde
- Lassen Sie den Nutzer niemals unbeaufsichtigt das Produkt benutzen. Stellen Sie sicher, dass der Nutzer immer durch einen Erwachsenen beaufsichtigt wird
- Für Reparaturen bzw. beim Austausch von Teilen dürfen nur neue Original R82 Ersatz- und Zubehörteile verwendet, die Bedienungsanleitung muss beachtet und die Intervalle für Wartungen, die durch den Lieferanten vorgegeben sind, müssen eingehalten werden
- Wenn Zweifel an der Sicherheit des genutzten R82 Produktes bestehen bzw. wenn Teile defekt oder fehlerhaft sind, stellen sie bitte sofort die Nutzung des Produktes ein und informieren sind umgehend, den für Sie zuständigen Fachhändler

### Umfeld

- Stellen Sie das Produkt aus Sicherheits- und Komfortgründen bei direkter Sonneneinstrahlung erst in den Schatten und lassen Sie es abkühlen, bevor es genutzt wird
- Nutzen Sie das Produkt nur auf ebenen Untergrund ohne Hindernisse bzw. anderen Unebenheiten. Bitte beachten Sie die eingeschränkte Manövrierfähigkeit auf glattem Untergrund
- Bitte beachten Sie die entsprechenden Angaben (siehe Abmessungen), wenn Sie dieses Produkt auf einem Untergrund mit Gefälle nutzen

### Nutzer

- Wenn der Nutzer mit seinem Gewicht nah an der max. Belastbarkeit des Produktes ist und / oder er stärkere ungewollte Bewegungen hat, z.B. Spastiken, sollte überlegt werden, ob eine größere Größe des Produktes mit einem höheren Nutzergewicht oder ein anders R82 Produkte die bessere Wahl ist

### Produkt

- Führen Sie alle Einstellung bzw. Anpassung der Zubehörteile zur Positionierung des Nutzers durch und überprüfen Sie, ob alle Schrauben, Handschrauben und Verschlüsse korrekt angezogen bzw. verriegelt sind, bevor das Produkt genutzt wird. Das Werkzeug darf sich nicht in der Reichweite des Nutzers befinden
- Betätigen Sie die Bremsen bevor der Nutzer im Produkt platziert wird
- Stellen Sie sicher, dass die Stabilität bzw. Standsicherheit des Produktes gewährleistet ist, bevor der Nutzer im Produkt platziert wird
- Informieren Sie den Nutzer bevor Sie die Rücken- und / oder Sitzneigungen einstellen
- Stellen Sie sicher, dass die Räder und Reifen funktionstüchtig und sicher sind bevor das Produkt genutzt wird
- Überprüfen Sie das Produkt bzw. die Zubehörteile und ersetzen Sie abgenutzte Teile, bevor das Produkt genutzt wird
- Achten Sie auf Ihre Finger!
- Die Gasfeder niemals Druck, Hitze oder Perforation aussetzen!
- Achten Sie darauf, dass die Kolbenstange nicht zerkratzt wird usw. Wenn die Gasfeder mit Hilfe von Werkzeugen eingestellt wird, muss unbedingt ein Tuch oder Ähnliches verwendet werden
- Dieses Produkt ist nicht für den Transport im Fahrzeug mit dem Nutzer geeignet. Der Nutzer muss in einem geeigneten Autositz gesichert sein und das Produkt gesichert im Gepäckraum transportiert werden
- Der Nutzer darf sich nicht in dem Produkt befinden, wenn er über eine Hebebühne, Lift oder Rampe in oder aus einem Fahrzeug steigt bzw. gesetzt wird

### Umgebungsbedingung

- Temperatur beim Einsatz: +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchte: 5% bis 90%
- Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

## DEUTSCH

### Wartung

Die Verantwortlichkeit für die Wartung des medizinischen Hilfsmittels bzw. Therapiegerätes liegt in der Verantwortung des Eigentümers bzw. Besitzers des Produktes. Die Nichteinhaltung der Wartungen bzw. der Wartungsintervalle gemäß dem Zeitplan der Bedienungsanleitung des Produktes kann das Erlöschen der Garantie dieses Produktes zur Folge haben. Weiterhin kann die Nichteinhaltung der Wartungen zu einer Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit führen bzw. die Sicherheit des Nutzers und / oder der Pflegekraft bzw. Begleitperson gefährden.

#### 1. Tag

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch des Produktes und bewahren Sie diese für die spätere Verwendung auf
- Verstauen Sie das Werkzeug auf/an dem Produkt

#### Täglich

- Benutzen Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung
- Optische Inspektion. Defekte oder abgenutzte Teile müssen umgehend ersetzt oder repariert werden. Versichern Sie sich das alle Befestigungen an ihrem Platz sind
- Versichern Sie sich das alle Befestigungen an ihrem Platz sind
- Überprüfung der Gurte, Westen, Verschlüsse auf Verschleisspuren
- Achten Sie bei alle Einstellungen auf die MAX Angaben bzw. Kennzeichnungen

#### Wöchentlich

- Überprüfen Sie, dass sich alle Radgabeln einwandfrei drehen und dass alle Radbremsen bzw. Radfeststeller einwandfrei funktionieren
- Nutzen Sie ein Tuch mit warmen Wasser und ein mildes Reinigungsmittel, um Schmutz zu entfernen und das Produkt zu reinigen. Trocknen Sie das Produkt ab, bevor es wieder genutzt wird

#### Monatlich

- Alle Schrauben, Muttern und anderen Verriegelungen müssen regelmäßig überprüft und festgezogen werden, um ungewollten Fehlern vorzubeugen
- Ölen Sie die beweglichen Teile, wir empfehlen ein professionelles Schmiermittel

#### Jährlich

- Überprüfen Sie den Rahmen und die Rahmenteile auf Verschleiß bzw. Nutzen Sie niemals ein Produkt mit festgestellten Fehlern oder Mängel. Lassen Sie min. einmal im Jahr die Inspektion durchführen

#### Reinigung

Waschen; Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten. Gestell mit pH-neutraler Mischung aus warmen Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel, Seifenlauge oder 70 prozentiger Desinfektionsmittellösung reinigen und anschließend trocknen lassen. Eine Liste geeignete Reinigungsmittel finden Sie auf <http://www.r82.org/support/>

Verwenden Sie für die Reinigung der Teile keinen Hochdruckreiniger.

#### Reinigung in einer Spezialwaschmaschine

Dieses Produkt kann, z.B. für die Aufbereitung für den Wiedereinsatz, in einer speziellen Waschmaschine, die für Medizinprodukte geeignet ist, gereinigt und desinfiziert werden. Es kann hierzu 15-20 Minuten bei 60 ° mit einem milden handelsüblichen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel gewaschen werden. Entfernen Sie hierzu vorher alle Zubehörteile vom Hauptprodukt. Reinigen Sie die Zubehörteile in einem separaten Waschgang. Das Produkt vor der erneuten Verwendung trocknen lassen

#### Zubehör und Ersatzteile

Das R82 Produkt kann mit einer Vielzahl von verschiedenen Zubehörteilen geliefert werden, um es an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers optimal anzupassen. Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich. Sie finden die verschiedenen Ausführungen des Zubehörs auf unserer Homepage, fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren Informationen.

#### Serviceintervalle

Eine umfassende Inspektion des Produktes muss alle 12 Monate durchgeführt werden (bei starker Beanspruchung bzw. schweren Nutzern alle 6 Monate) und zusätzlich jedes mal, wenn das Produkt für einen Nutzer verwendet wird. Die Inspektion muss von einer technischen Fachkraft durchgeführt werden, die für dieses Produkt geschult worden ist.

Bitte informieren Sie im Falle einer Reparatur ihren Fachhändler.






#### Nutzungsdauer

Die Lebensdauer dieses Produktes beträgt bei normalem Einsatz 5 Jahre unter der Voraussetzung, dass jeder Service und jede Wartung innerhalb der Intervalle des Wartungsplans des Herstellers durchgeführt und dokumentiert worden ist.

#### Wiedereinsatz

Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsatzbarkeit obliegt dem Fachhandel. Das Hygiene-System ist für den Wiedereinsatz geeignet. Für den Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen. Im Falle einer Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur Platzersparnis auf das kompakteste Maß einzustellen

Detaillierte Angaben zum Wiedereinsatz finden Sie in der Dokumentation Strong Base Wiedereinsatz unter <http://www.r82.org/support/>

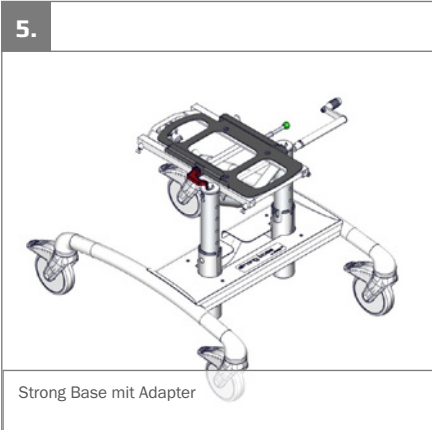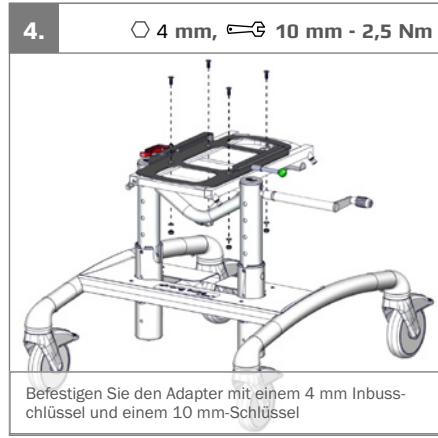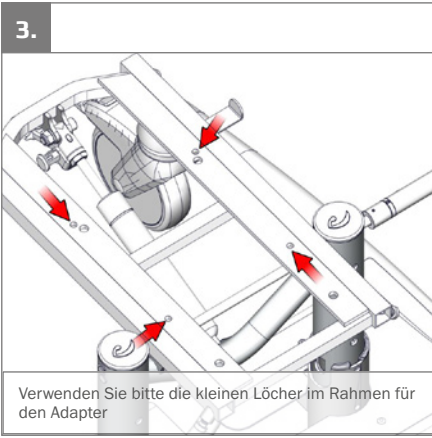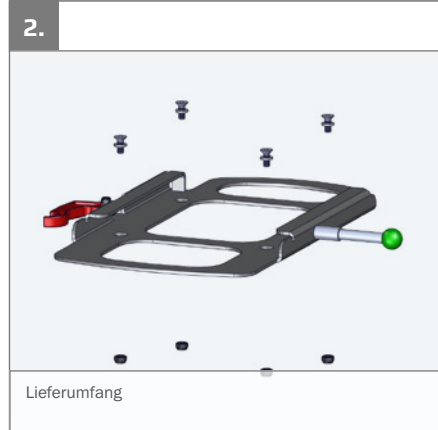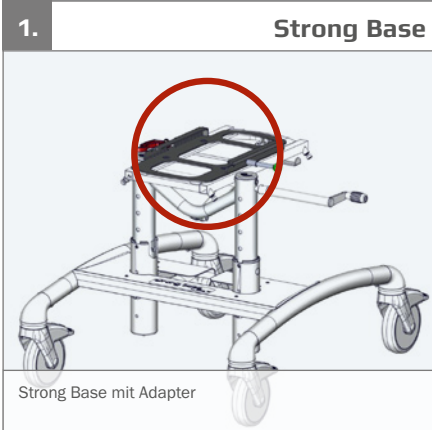

1.




Strong base, Nandu und High-low/High low:x mit  
Schiebebügel

2.




Lieferumfang

3.

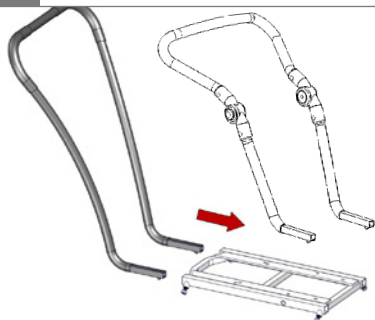


Bilder 3 - 6: Schrauben am Gestell mit 5 mm Inbusschlüssel lösen und Schiebepügel einsetzen.

4.

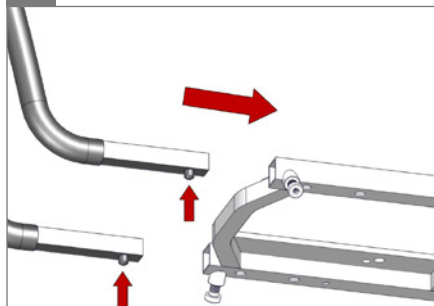

5.

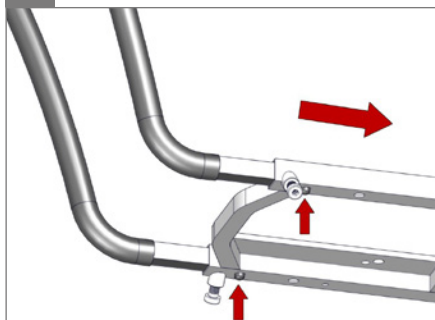


6.






**7.**

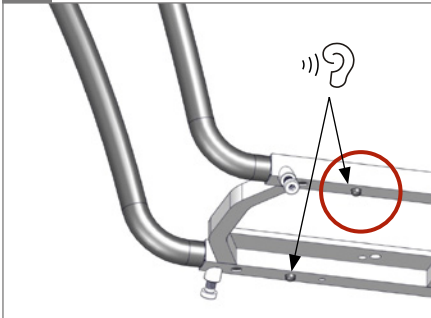

Der Schiebebügel rastet mit einem „Klick“ in der korrekten Position ein.

**8.** ⬡ 5 mm - 2,5 Nm

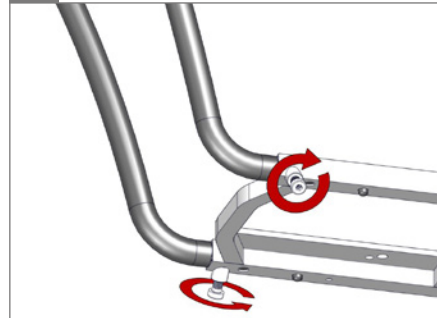

Beide Schrauben mit 5 mm Inbusschlüssel festziehen.

**9.** 👁️



Sicherstellen, dass die Schrauben gemäß Wartungsanweisungen in der Gebrauchsanweisung festgezogen sind.

**10.** 🚫🚶



Nicht am Schiebebügel hochheben!

**1.**




Strong Base, Nandu und High Low/High Low:x mit Fußstütze

**2.**



Lieferumfang

**3.**

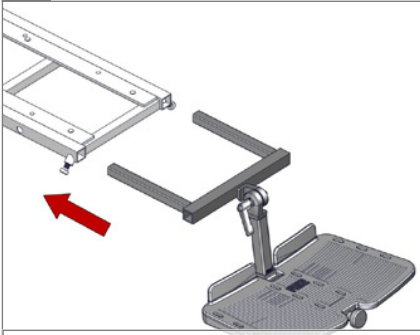

Fußstütze in Gestell einsetzen.

**4.**  5 mm - 2,5 Nm




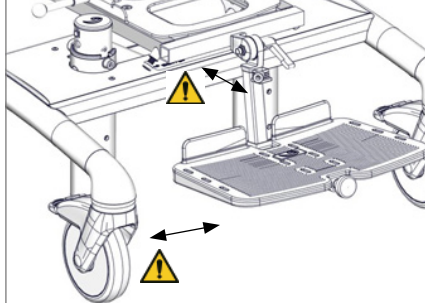
Fixieren und Schrauben auf beiden Seiten des Gestells mit 5 mm Inbusschlüssel festziehen.

**5.**



Nicht auf die Fußstütze stellen! Sicherstellen, dass die Schrauben gemäß Wartungsanweisungen in der Gebrauchsanweisung festgezogen sind.

**6.**  01





nothing compares to a smile!



#### R82 A/S

Parallevej 3  
8751 Gedved  
Denmark  
Tel +45 79 68 58 88  
Fax +45 75 66 51 92  
R82@R82.com  
R82.org

Supplier for:  
Rest of the world

#### R82 UK Ltd.

England  
Tel. +44 (0)121 561 2222  
Fax +44 (0)121 559 5437  
R82uk@R82.com  
R82.co.uk

Supplier for:  
United Kingdom, Ireland

#### R82 GmbH

Germany  
Tel +49 (0)6132 710 70  
Fax +49 (0)6132 710 710  
R82de@R82.com  
R82.de

Supplier for:  
Germany, Switzerland, Austria

#### R82 Nederland B.V.

The Netherlands  
Tel +31 (0)513 68 16 86  
Fax +31 (0)513 68 19 84  
R82nl@R82.com  
R82.nl  
R82.be

Supplier for:  
The Netherlands, Belgium

#### R82 au Pty Limited

Tel +61 (02) 8213 6666  
Fax +61 (02) 8213 6655  
R82.com.au  
facebook.com/R82Australia

Supplier for:  
Australia

Find your local dealer  
**R82.org**

DISTRIBUTOR: