



HMI-nr 32542 fra hmi-basen.dk



Nova 500 NG ståløfter

 **etac**[®]



Teknisk information Nova 500 NG ståløfter

Max belastning:	180 kg	Højde på underbensstøtternes midte, over fodplade:	29-40 cm
Løfteinterval:	67-166 cm	Samlet vægt:	49 kg
Antal forflytninger med 80 kg:	Ca 80 (batteriets kapacitet)	Chassi:	Pulverlakeret stål
Understellets bredde:	63-101 cm (udv), 51-89 cm (inv)	Højde til krogens nederste kant ved løftearmens maksimale udstrækning:	95 cm
Understellets højde:	14,5 cm	Beskyttelsesklasse motor:	IP43
Understellets længde:	100 cm	Beskyttelsesklasse håndbetjening:	IP65
Hjuldiameter:	100 mm	Opfylder kravene i henhold til:	EN 60601-1-1, EN60601-1-2, EN 60068-2-32, MDD 93/42/EEC, ISO 10535
Maksimal rækkevidde:	ca. 69 cm		
Vendediameter:	ca 118 cm		

Vi gør opmærksom på, at vi ved brug af Nova 500 NG ståløfter anbefaler, at der anvendes Nova ståsejl - se bagside.



Stilrent design og smarte funktioner

Nova 500 NG ståløfter er beregnet til personer, der har svært ved at rejse sig. Personen skal aktivt kunne medvirke ved oprejsning og forblive i den stående stilling. Med hjælp fra forlængerbånd kan ståløfteren også anvendes til forflytninger fra siddende stilling eller liggende fra gulv. Ved den type forflytninger anvendes det sejl, som normalt bruges til personløft. Tyngdepunktet er centreret og medvirker til en tryk og sikker forflytning. Det gennemtænkte design betyder, at Nova 500 NG ståløfter passer ind i de fleste miljøer.

Let at manøvrere

Ståløfterens forskellige funktioner styres enkelt via håndbetjeningen. Understellet er elektrisk regulerbart i bredden. Hjullene ruller let ved forflytning og er låsbare. Takket være løftearmens store bevægelsesområde kan løfteren anvendes til både børn og voksne.



Gennemtænkte detaljer som giver et stilrent udseende

Detaljer



Overskueligt display

Enkel håndtering med tydelig nødstop og nedsænkning. Tilslut direkte til vægkontakt ved opladning.



Justerbar knæstøtte

Den blødt polstede knæstøtte kan enkelt vinkles og justeres i både højde og dybde.



Trinløs benspredning

Løfteren har elektrisk V-benspedning som foregår trinløst.



Lavt placeret fodplade

Den lave fodplade ligger vandret mod gulvet. Kan nemt afmonteres alt efter behov.

Beskrivelse	Art.nr.	HMI-nr.
Nova 500 NG ståløfter	16030207	32542
Tilbehør		
Skridsikring til fodplade	81766	
Tværrebøjle med ekstra ophængskroge	26901	

Tilbehør - sejl

Nova Stand-up, ståsejl

Funktion


Sejlet støtter den centrale del af ryggen. Det er blødt polstret og har skridsikring samt bælte. Centreringsbånd og lomme letter placeringen på brugeren.



HMI-nr 31830 fra hmi-basen.dk


Anvendelse

Ståsejlet benyttes til brugere med nedsat balance, men som i øvrigt har god stabilitet i kroppen og kan stå selv. Sejlet anvendes ved forflytning fra siddende til stående stilling. Benyttes kun sammen med ståløfter.

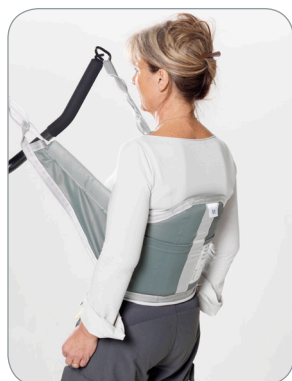

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XS	31830	1650321
S	31831	1650322
M	31832	1650323
L	31833	1650324
XL	31834	1650325

	XS	S	M	L	XL
A	28	33	31	34	34
B	12	24	38	54	60
D	57	86	100	114	130

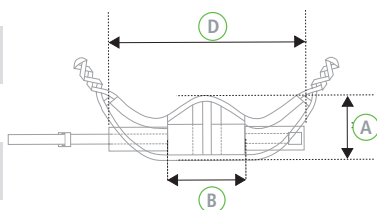

Tilbehør til sejl



Forlængerstropper

Anvendes bl.a. i situationer, hvor en bestemt siddestilling, siddevinkel eller løftehøjde ønskes. Finde i to længder.

Art. nr. 81570, 14 cm

Art. nr. 81571, 18 cm



Afmærkningsbånd

Anvendes til afmærkning af afprøvet stropning for at markere den optimale placering ved løft af en specifik bruger.

Art. nr. 81584