



Etac Prio +
Shape Up!

 **etac**®

Etac Prio+ handler om form og støtte

Det handler om den enkeltes funktionsniveau. Det er vores mål, at brugerens funktionsniveau udnyttes fuldt ud, ved hjælp af form og støtte. En korrekt siddestilling forbedrer aktivitets- og mobilitetsniveauet.

Det er det, vi kalder Ability Based Seating™.

Ability Based Seating™

Med alderen vil vores fysiske evner blive mindsket.

Og evner, der ikke bruges, vil mindskes hurtigere. Det er derfor vigtigt at udnytte alle aktiveringsmuligheder.

Prio+ er den eneste multifunktionskørestol, der tilbyder dynamisk bækkenstøtte. Støtten deaktiveres i hvile og genaktiveres i den aktive position.

Den dynamiske bækkenstøtte er bare ét eksempel på Prio+s innovative funktioner, der rent faktisk forbedrer siddetolerancen over tid.


Det kalder vi Ability Based Seating™.



Advarsel om bivirkninger


Hvor mange kørestolsbrugere er immobile og afhængige af hjælp, fordi bruger får utilstrækkelig støtte i siddestillingen? Hvad er risikoen ved at bruge al sin energi på at holde overkroppen og hovedet opret? En dårlig holdning påvirker vejrtrækning, tygning og synkning og kan også give problemer med fordøjelsen og med blærekontrol. Utilstrækkelig eller forkert siddestøtte skal undgås!

Form

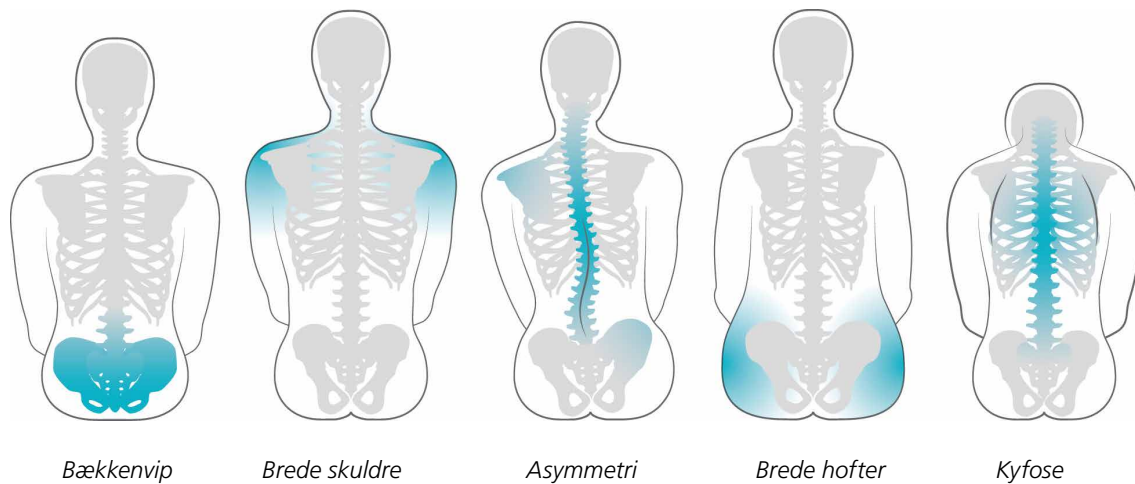


Stropryg med justerbar spænding gør ryglænet formbart. Ryghynden følger den form, der skabes.

Tilsammen muliggør dette, at kørestolsryggen kan formes med brugeren i kørestolen. Yderligere støtte skabes ved hjælp af ryggiler.

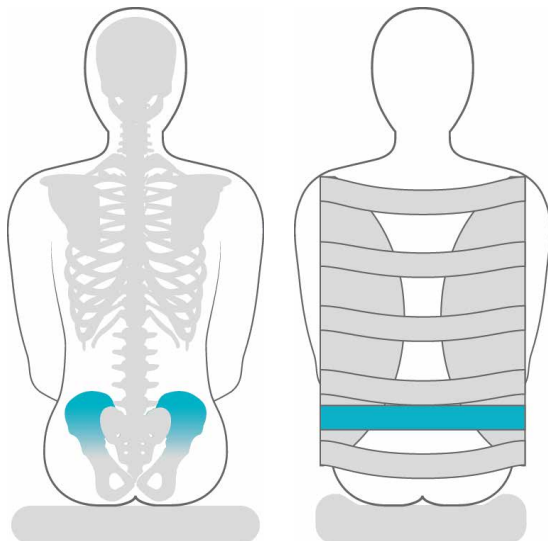

Dynamisk bækkenstøtte

Prio+s dynamiske bækkenstøtte tilpasser sig både aktivitet og hvile. En opret stilling kræver en aktiv støtte. Når der skiftes til tilbagelænet stilling, frigøres spændingen automatisk, så bækken kan vippe nogle få grader bagud, hvorved lænderyggen rettes ud. Den dynamiske bækkenstøtte er højdejusterbar.

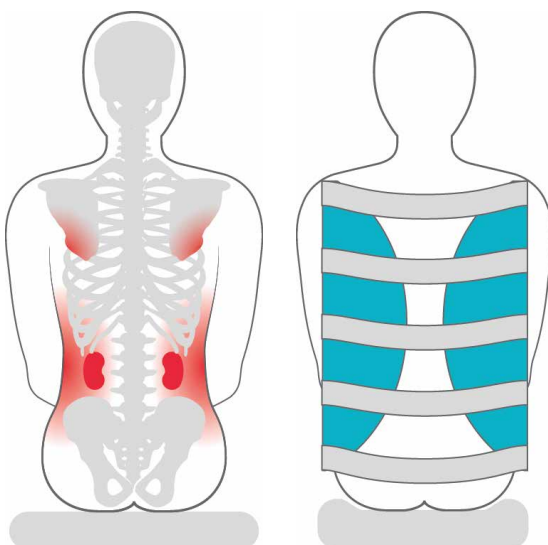

Trykfølsomme områder

Nederst på siderne af brystkassen, skulderbladene og nyrerne er områder, der er særligt følsomme over for koncentreret tryk. Prio+s rygpølstring er forsynet med "skjold", der giver ekstra beskyttelse mod tryk på disse følsomme områder.

Shape Up!

Det eneste du behøver at kende, er brugerens hoftebredde. Alle de andre funktioner kan tilpasses, tilføjes, ændres eller udskiftes! Formen skabes med brugeren i stolen. Rygselerne med justerbar spænding og rygkilerne er to enkle teknikker, der anvendes til at skabe den rette form.

Aktiv brug af funktionerne sædevip og tilbagelæning er vigtigt.



Desuden kan sædehøjden og baghjulenes position justeres.



Nøgler til ændring af indstillinger

To unbraco-nøgler er lettilgængeligt og diskret placeret bag på ryglænet.

Egenskaber



Deaktiveret bækkenstøtte
Bækkenstroppens spænding mindskes automatisk, når man læner sig tilbage i en behagelig hvilestilling.



Kiler
Prio+ har rigelig siddeplads, så der er plads til at bruge kiler og sidepolstring til at skabe form og støtte.



Aktiv bækkenstøtte
Når ryglænet rettes op igen, aktiveres bækkenstøtten. Denne variation påvirker rygsøjlen og stimulerer den dybe muskulatur.



Flyt hjulene frem
For at opnå den rette balance, giver Prio+ mulighed for at vælge mellem tre baghjulspositioner.

Sund afslapning

En jævn trykfordeling er vigtig for at forebygge tryksår. Med sædekip alene vil det være nødvendigt med en vinkel på 45° for at opnå tilstrækkelig aflastning af bagdelen. Ved at kombinere funktionerne sædekip og tilbagelæning, bevares den tilsvarende omfordeling af trykket. Desuden bliver hvilestillingen mere behagelig, og brugeren vil opleve komfort og tryghed.



Rygskjold
Skjoldene fordeler trykket fra stroppryggen. Dette muliggør brug af en tynd og fleksibel rygpude, der former sig nøjagtigt efter stroppryggens justering.



Blød hovedstøtte
Den bløde hynde er formet til nakken og hovedet. Hukommelsesfunktionen sikrer, at den vender tilbage til samme højdeposition.

Find den rette position


Med følgende funktioner kan du på forhånd konfigurere hvile- eller aktivitetsindstillinger. Brugeren garanteres komfort og tryghed.



Komfortlås
Sikrer, at en forudindstillet kipposition kan findes. Der er fire mulige indstillinger (0°, 4°, 8° eller 12°). Vælg én position, der hyppigt anvendes til aktivitet eller hvile.




Gaspatrionklips
Hver klips, der tilføjes, mindsker kip- og/eller tilbagelæningsområdet. Gaspatrionklips fås som tilbehør.

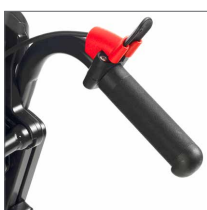


Låsbart greb
Forhindrer aktivering af tilbagelæning eller kip. Hvis positionen skal justeres, trækkes låseanordningen opad og derefter ned igen for at låse grebet. Låsbart greb fås som tilbehør.

Funktioner og muligheder

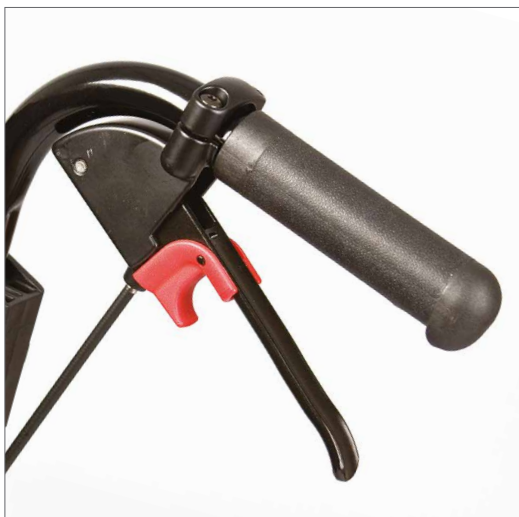

Ledsagerbremse

Med skridsikker håndtagsbelægning. 10 cm mellem håndtagsgrebet og bremsegrebet. Ledsagerbremse er ikke standard på Prio+.

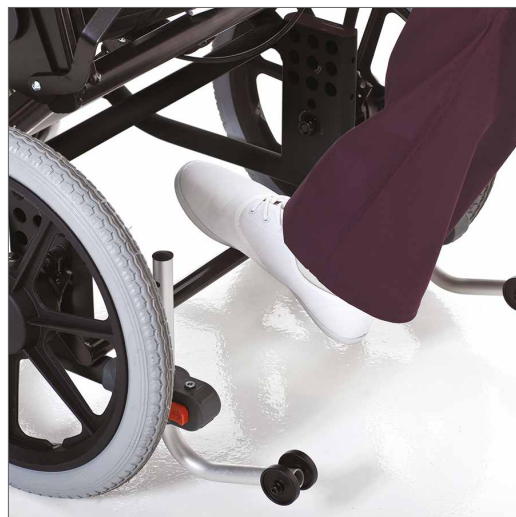

Fodbremse

Kun kombineret med 16" transporthjul. Forsynet med bremsegreb til brugeren. Fodbremse er ikke standard på Prio+.



Brugerbremsegreb til Fodbremse

Fodbremsen er forsynet med et brugerbremsegreb i højre side. Brugerbremse er ikke standard på Prio+.

Etac Prio+ 3D

Ability Based Seating™


Vi er stolte over at kunne præsentere vores nye 3D-ryglænsystem. Det er en patentansøgt nyskabelse, der er formbar i alle retninger og ideel til asymmetri og kyfose.

Kyfose påvirker hele kroppen

Aldring påvirker rygsøjlenes krumning. Hvis rygsøjlenes krumning overstiger 50 grader, stilles diagnosen kyfose. Vi har skabt et ryglæn, der giver plads og støtte i alle retninger for brugere med kyfose og andre asymmetrier.

Evnen til at være aktiv

En foroverbøjet siddestilling påvirker evnen til at være aktiv. Hovedet sænkes og falder ned foran brystkassen, hvilket også forskyder tyngdepunktet. Den øvre overkrops krumme form begrænser skulderbladernes mobilitet, hvilket igen påvirker armenes mobilitet. En kyfose accelerer problemet. Man bruger en masse energi til at holde hovedet oppe, siddestillingen bliver ustabil og aktivitetsniveauet begrænses. Målet er at fremme en bedre hovedposition og skabe en støttende og afslappet stilling, der gør det muligt at være aktiv. Shape Up!

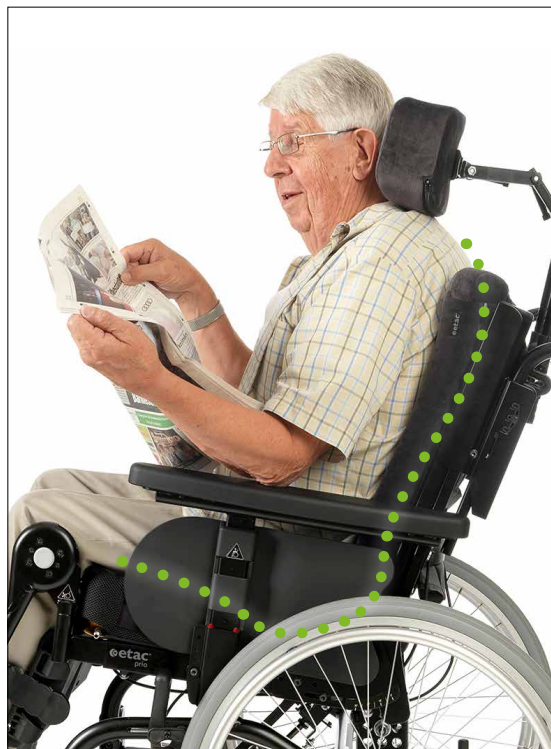


Ryglænets tredimensionelle formbarhed absorberer kyfosen og støtter brystvirvelsøjlen. Den dynamiske bækkenstøtte giver ekstra støtte og stabilitet.

Funktioner og valgmuligheder Prio+ 3D



3-delt ryghynde

Sidepanelerne giver lateral støtte og danner en vandret kontureret form. Midterpanelet følger kyfosens lodrette form.

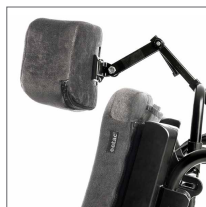


Traditionel hovedstøtte

Hovedet kan være placeret foran overkroppen. Det stiller krav til hovedstøttens dybdejustering.



Ryglænsenhøjde

En kyfotisk ryg kræver en lavere ryghøjde. Prio+ 3D ryglænet kan justeres fra 45 til 60 cm.

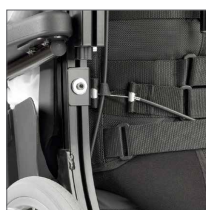

Dynamisk bækkenstøtte

Bækkenet skal støttes hos en bruger med kyfose for at forhindre yderligere bagudklipning. Den dynamiske bækkenstøtte giver perfekt støtte og variation.


Etac Prio+ tilbehør og reservedele



Hovedstøtte, blød

Højde- og dybdejusterbar, med hukommelsesfunktion. Bredde 37 cm.

Betræk	Varenr.
Grå velour	28152-60
Koralgrøn hygiejne	28152-64
Grå hygiejne	28152-65

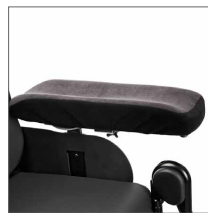

Hemiplegiarmlæn

Med lettilgængelige vinkelindstillinger fortil.

	Varenr.
Højre	28034-60-1
Venstre	28034-60-2




Hovedstøtte, traditionel

Højde- og vinkeljusterbar, aftagelig. Anbefales ved kyfose. Betræk: Velour eller grå hygiejnebetræk.

Betræk	Varenr.
Grå velour	27861-60
Grå hygiejne	27861-63
Hovedstøtteholder*	28024

**Anvendes hvis der skiftes fra hovedstøtte, blød til hovedstøtte, traditionel.*

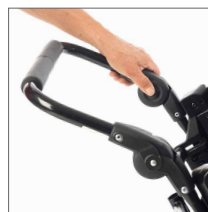

Skubbebøjle, vinkeljusterbar

Højde- og vinkeljusterbar, og aftagelig. Kan kombineres med hjælpebremse. Passer til Prio+ 40 cm, 45 cm og 50 cm bredde.

Str.	Varenr.
Prio+ 40 cm	27163
Prio+ 45 cm	27165
Prio+ 50 cm	27167



Ryghynde

Blød og fleksibel ryghynde, fastgjort med lynlås. Betræk:

Grå velour (xx=60),
Koralgrøn hygiejnetekstil (xx=64)
Grå hygiejnetekstil (xx=65)

Str.	Varenr.
Prio+ 40 cm	27771-xx
Prio+ 45 cm	27772-xx
Prio+ 50 cm	27773-xx
Prio+ 55 cm	27774-xx




Skubbebøjle

Højdejusterbar og aftagelig.

Kan kombineres med hjælpebremse.

Str.	Varenr.
Prio+ 40 cm	25580-01
Prio+ 45 cm	25582-01
Prio+ 50 cm	25583-01
Prio+ 55 cm	26069-01

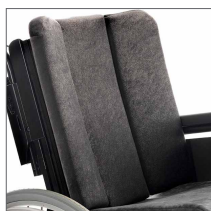

Prio+ 3D-ryghynde

3D er et unikt rygssystem, der giver støtte og plads til en kyfotisk ryg eller asymmetrier. Grå velour. OBS! Stolen skal være monteret med 3D-ryg.

Hynde str.	Varenr.
Prio+ 40 cm	28015-60
Prio+ 45 cm	28016-60
Prio+ 50 cm	28017-60
Prio+ 55 cm	28018-60



Skubbehåndtag

Højdejusterbart og aftageligt, håndtag med skridsikker belægning. Leveres som kit inkl. udløser for enten rygfældning eller sædetilt - med og uden monteret ledsagerbremse.

Skubbehåndtag	Varenr.
Med rygfældning	28219-01
Med sædetilt	28220-01
Med ledsagerbremse og rygfældning	28221-01
Med ledsagerbremse og sædetilt	28222-01



Armlæn

Højde- og dybdejusterbar, aftageligt.

	Varenr.
Højre	27714-1
Venstre	27714-2

Etac Prio+ tilbehør og reservedele



Sædepude, Komfort

Komfort-puden er lidt lavere bagtil. For endnu bedre stabilitet har den en aftagelig indsats af viskoelastisk skum og konturering til lårene. Betræk: Grå velour (xx=60), Koralgrøn hygiejnetekstil (xx=64), Grå hygiejnetekstil (xx=65).

Sædepude Komfort	Varenr. Ekstra kort pude L42-46 cm	Varenr. Kort pude L46-50 cm	Varenr. Lang pude L52-56 cm
Prio+ 40 cm	28066-xx	27755-xx	27763-xx
Prio+ 45 cm	28067-xx	27756-xx	27764-xx
Prio+ 50 cm	28068-xx	27757-xx	27765-xx
Prio+ 55 cm	-	27758-xx	27766-xx



Fakta om sædepude, Komfort


Konturen skabes på undersiden. Det holder toppen af betrækket udstrakt og mindsker risikoen for generende folder i stoffet.



Sædepude, Standard

Standardpuden er lidt lavere bagtil. Betræk: Grå velour (xx=60), Koralgrøn hygiejnetekstil (xx=64), Grå hygiejnetekstil (xx=65).

Sædepude Standard	Varenr. Kort pude L46-50 cm	Varenr. Lang pude L52-56 cm
Prio+ 40 cm	27751-xx	27759-xx
Prio+ 45 cm	27752-xx	27760-xx
Prio+ 50 cm	27753-xx	27761-xx
Prio+ 55 cm	27754-xx	27762-xx

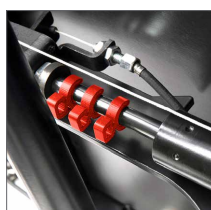

Gaspatronklips

Hver klips, der tilføjes, mindsker kip- og/eller tilbagelæningsområdet. Der kræves intet værktøj.


	Varenr.
Pose med 10 stk	28163



Bremse med vinklet greb

Til 20", 22" og 24" baghjul. Giver en større gribeblade. Det vinklede greb fås i sort eller rød.


	Varenr.
Højre, rød	27951-1
Venstre, rød	27951-2
Højre, sort	27894-1
Venstre, sort	27894-2

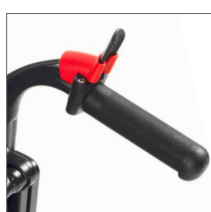

Låsbart greb

Forhindrer aktivering af tilbagelæning eller kip. Hvis positionen skal justeres, trækkes låseanordningen opad og derefter ned igen for at låse grebet.

	Varenr.
1 stk	28047

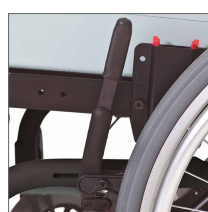

Bremseforlænger

Bremsegrebet kan vinkles fremad for at lette sideværts forflytninger.


	Varenr.
1 stk	25515

Etac Prio+ tilbehør og reservedele



Skab en form med rygkiler

Foruden det justerbare ryglæn, rygkilerne og udvidelseskittet er der yderligere valgmuligheder til formning og tilpasning af Prio+s størrelse. Kilerne, der kan kombineres og klippes til, fås i tre størrelser og leveres i sæt med 2 stk.

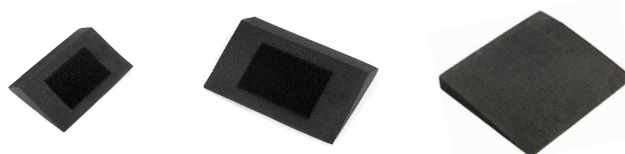

Model	Varenr.
Small (L13 x B9,5 x H2 cm), 2 stk	28030
Medium (L19 x B12 x H2 cm), 2 stk	28139
Large (L20 x B17 x H2,5 cm), 2 stk	28140



Bredningssæt

Øger afstanden mellem armlænene med 2,5 cm

	Varenr.
1 sæt	27892




Sidepuder

Mindsker sædebredden med 2 cm. Til montering på sidepladerne.

	Varenr.
1 sæt	28021

Sidestøtte
Svingbar

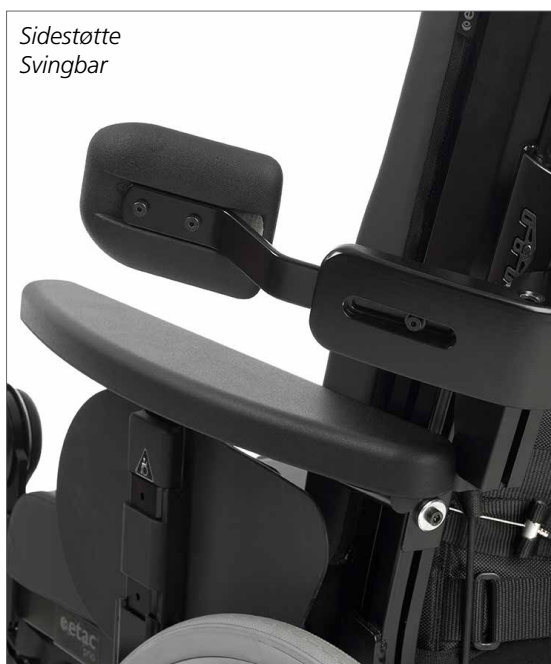

Sidestøtter

Sidestøtter kan være nødvendige for at give tilstrækkelig stabilitet og forhindre sammenfald. Der er to modeller at vælge imellem:

Sidestøtte, svingbar

Justerbar i højden, dybden og bredden. Armlænet kan fjernes, når sidestøtten er foldet til side, hvilket er ideelt ved sideværts forflytning. Pude: Polyurethan.

Sidestøtte, justerbar

Justerbar i højden, dybden og bredden. Let at fjerne og montere uden værktøj. Pude: Polyurethan.

Model	Varenr.
Justerbar	28020
Svingbar, højre	28019-1
Svingbar, venstre	28019-2




Sidestøtte
Justerbar

Etac Prio+ tilbehør og reservedele



Fodplade

Fodpladen giver en gulvforfølelse og stimulerer bevægelse. Sammenklappelig og aftagelig. OBS! Kan kun bruges sammen med 6" forhjul.

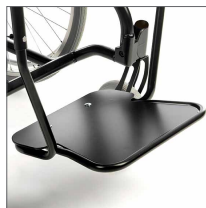

Model	Varenr.
Hel fodplade	23955



Fodstøtte, standard

Sammenklappelig, højde- og vinkeljusterbar. Længde: 15 cm. Hælrem skal bestilles separat. Højre (x=1) Venstre (x=2)


Model	Varenr.
Prio+ 40 cm	82354-x
Prio+ 45 cm	82356-x
Prio+ 50 og 55 cm	82357-x



Benstøtte, fast vinkel

Kan svinges til side og er aftagelig.

	Varenr.
Højre	27951-1
Venstre	27951-2

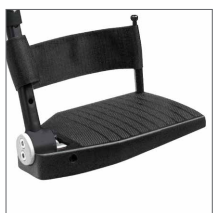

Fodstøtte, Cross

Højde- og vinkeljusterbar. Længde: 13 cm. Hælrem skal bestilles separat.

Højre (x=1) Venstre (x=2)

Model	Varenr.
Prio+ 40 cm	25650-x
Prio+ 45 cm	25737-x
Prio+ 50 og 55 cm	25652-x



Benstøtter, eleverbare

Kan svinges til side og er aftagelige. Inkl. lægstøtter, justerbare i højde og dybde.

Betræk lægstøtter: Koralgrøn hygiejnetekstil (xx=64) eller Grå hygiejnetekstil (xx=65).

Model	Varenr.
Prio+ 40 cm Højre	27857-xx-1
Prio+ 40 cm Venstre	27857-xx-2
Prio+ 45 cm Højre	27858-xx-1
Prio+ 45 cm Venstre	27858-xx-2
Prio+ 50 cm Højre	27859-xx-1
Prio+ 50 cm Venstre	27859-xx-2
Prio+ 55 cm Højre	27860-xx-1
Prio+ 55 cm Venstre	27860-xx-2



Hælrem

Skal anvendes på delte fodstøtter. Justerbar i dybden.

Str.	Varenr.
One size	24458



Fodpladeforlænger

Monteres på Cross-fodstøtten. Længde: 21 cm.

Prio+ sædebredde	Varenr.
40,0 cm	50798
45,0 cm	50799
50,0 cm	50800
55,0 cm	50885

Etac Prio+ tilbehør og reservedele



Lægbånd

Længdejusterbar og aftagelig.

Sædebredde	Varenr.
40 cm	25357
45 cm	25358
50 cm	25359
55 cm	26062



Dropstativ

Til to poser.

	Varenr.
One size	28160



Polstring til lægbånd

Aftagelig. Fås i længder på 20, 30 og 40 cm.

Længde	Varenr.
20 cm	26845
30 cm	26846
40 cm	26847



Kurv til iltflaske

Kan også bruges som bærekurv.

	Varenr.
One size	28162



Bord

Transparent, monteres på armlænet.

Prio+ sædebredde	Varenr.
40 cm	27971
45 cm	27972
50 cm	27973
55 cm	27974

Etac Prio+ tilbehør og reservedele



Abduktionklods

Aftagelig og dybdejusterbar.


	Varenr.
One size	28022



Forhjul

6" eller 8".

Str.	Varenr.
6"	27864
8"	27863

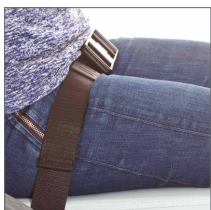

Hoftesele

Monteres på sæderammen. Todelt. Længde 100 cm


	Varenr.
One size	25668



Drivhjul

20", 22" eller 24". Massive dæk (pur). Quick Release, aluminiumdrivring.


Str.	Varenr.
20" OBS: Kun i pos. 1	82486
22" OBS: Kun i pos. 1+2	82485
24"	82484

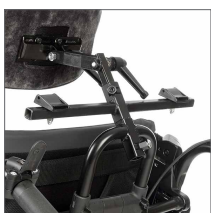

Selefæste

Kun til traditionel hovedstøtte/hovedstøtte m/sidestøtte

	Varenr.
One size	28186

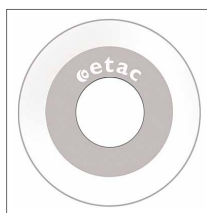

Egerbeskytter

Fås med gråt eller gult tryk.

Str.	Varenr.
20" gråt tryk	25502-28
22" gråt tryk	25503-28
24" gråt tryk	25504-28
20" gult tryk	25502-29
22" gult tryk	25503-29
24" gult tryk	25504-29

Polstring og hyndebetræk



Mørkegrå,
velourbetræk



Lagunegrøn,
hygiejnebetræk



Mørkegrå,
hygiejnebetræk

Alle betræk kan vaskes ved 60 °C. Hygiejnebetrækket til sædehynden kan vaskes ved 95 °C. Hygiejnebetrækket kan også tørres af med en fugtig klud. For øvrige vaskeanvisninger, se mærket på den enkelte hynde.



Tekniske data

Ryglæn, vinkling
0°-30°

Sædekip
+3°-20°

Sædehøjde
43-52 cm
Målt uden sædehynde

Max. brugervægt
135 kg

Samlet bredde
Sædebredde + 19 cm

Transportbredde
Sædebredde + 16 cm

Transportvægt
22,9 – 24,1 kg

Baghjul, balanceret tilstand
20", 22" og 24" (tre forskellige
balancepositioner pr. sædehøjde)

Produktvægt
33,5-34,4 kg

Bestilling af Prio+


Sædebredde	Varenr.	HMI-nr.
Prio+ 40 cm	13420205	102496
Prio+ 45 cm	13420209	102497
Prio+ 50 cm	13420213	102498
Prio+ 55 cm	13420217	102499

Prio+ standard leveres med:

- Standard sædepude
- Dynamisk bækkenstøtte
- Komfort tiltlock
- Hovedstøtte med hukommelses-funktion
- Højdejusterbare armlæn
- Eleverbare benstøtter
- Højdejusterbare skubbehåndtag
- Tipsikringer
- Stelfarve: Sort
- Betræk. Mørkegrå Hygiejne betræk
- 24" drivhjul m. aludrivringe,
8" Forhjul, begge massive.

Antropometriske dimensioner

To personer, der er lige høje, kan have forskellig benlængde, mens afstanden mellem bagdel og PSIS (dvs. bækkenstøttens placering) kun afviger lidt. Antropometriske målinger sikrer, at vi både dækker normalspændet for kropsmål, samt yderlighederne. Antropometriske målinger er indsamlede data, der indikerer normal kropsvariation mellem to punkter af fast væv. Her viser vi målingerne for normal, aldersbetinget og sammenfaldet siddestilling.

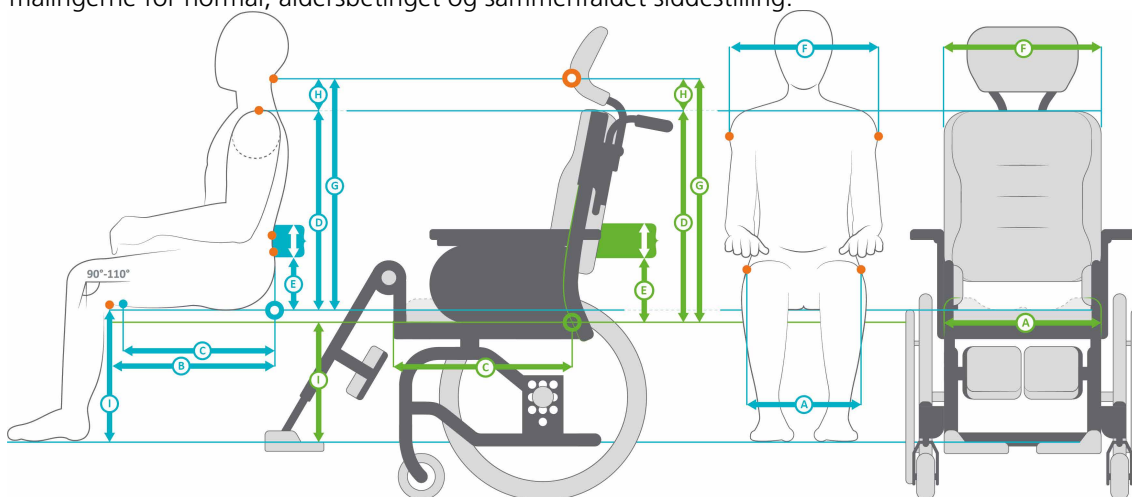

- Antropometriske mål
- Beregnede mål
- Baseret på sædereferencepunkt (SRP)
- Baseret på hårdt sæde (ingen hynde)
- Hovedstøttens frontpunkt (HFP)

Prio+ bruger	Normal siddestilling	Ældet siddestilling	Sammenfalden siddestilling	Prio+ produktmål		
A Hoftebredde, siddende	n/a	n/a	n/a	40, 45, 50 og 55 cm	Sædebredde	A
SRP – læggens bagside (knæbøjning 90°)	44–54 cm	43–53 cm	43–54 cm	n/a		
C SRP – læggens bagside (ekskl. 2-5 cm frirum)	39–49 cm	38–48 cm	38–49 cm	39–51 cm	Sædedybde	C
D SRP – skuldre	52–66 cm	49–63 cm	47–60,5 cm	55–70 cm* (standard) 45–60 cm* (3D ryg)	Hovedstøttens højde	D
E SRP – øvre/sacrum	15–22 cm	14–21 cm	12–19 cm	Ubegrænset justering	Bækkenstøtte, højdejustering	E
F Skulderbredde	34–42 cm	34–42 cm	34–42 cm	Ikke relevant (kørestole vælges ud fra hoftemål)	Rygbredde	F
G SRP – baghoved	65–78 cm	62–75 cm	60–73 cm	61–91 cm	Hårdt sæde–HFP	G
H Gennemsnitlig afstand mellem skulder og baghoved	11–15 cm	11–15 cm	11–15 cm	6–21 cm	Ryglænets top–HFP	H
I Sål - knæhase	40–52 cm	38–50 cm	38–50 cm	38,5–55 cm (standard) 31–47,5 cm (korteste version)	Fodstøtte hård sædebund	I

A: Hoftemålet danner grundlag for bestilling af en kørestol. Antropometriske mål er ikke relevante. Sædebredden kan justeres yderligere med sidepuder eller bredningssæt.

C: Formen og den endelige sædedybde skabes ved justering af ryglænet med brugeren i stolen.

D, G, H: Af hensyn til sammenligning af produktmålene med brugerreferencen skal det bemærkes, at kørestolsmålene er målt uden sædehynde. En hynde vil løfte brugeren 2–6 cm.

H: Målene henviser til hovedstøtten "Blød". Hovedstøtten "Traditionel" er mere justerbar.



Shape Up!

Vedligeholdelse og endda forbedring af en kørestolsbrugers funktionsniveau kræver en optimalt tilpasset kørestol. Med kørestole fra Etac skabes form og støtte af fagpersonalet, mens brugeren sidder i kørestolen.

Med en tilgang baseret på den enkelte brugers funktionsniveau kan vi styrke brugerens aktivitetsniveau.

Vi kalder dette Ability Based Seating™.



“Enhver bør kunne leve et frit og selvstændigt liv og forfølge sine drømme uanset de fysiske omstændigheder”

For at få de seneste nyheder og løbende opdaterede produktoplysninger – besøg:
www.etac.dk