
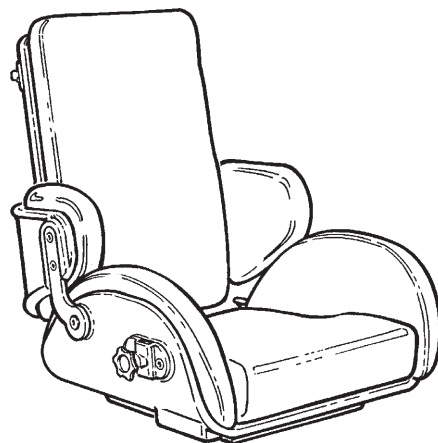


# panda futura<sup>™</sup>

## Svensk Användarhandbok

## INNEHÅLL

Panda Futura - Avsett ändamål .....	3
Säkerhet .....	4
Underhåll .....	5
Produkt märkning .....	6
Mätningar.....	6
Symboler .....	7
Lyftteknik .....	7
Tillbehör .....	8
Sitsar - Mounting / Montering / demontering av sits .....	9
Ryggfällning / Ryggförlängare .....	10
Huvudstöd .....	11
Körhandtag .....	12
Svängbara axelhållare.....	13
Fasta bålstöd / Svängbara bålstöd .....	14
Svängbara knästöd / Sitsförlängare .....	15
Fotplatta/Fotplattor .....	16
Armstöd och bord .....	17
Montera fixlock .....	18
Väst och kryssväst / Sternumsele .....	19
5-punktsbälte / H-sele polstrad.....	20
Höftbälte / Y-bälte .....	21
Abduktionssele / Ankelsele.....	22
Fotremmar / Handleds manschett .....	23
H-seleband / Åkpåse med selar / Regnpåse med huva ..	24

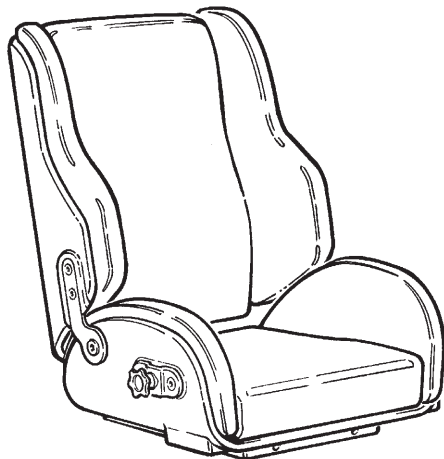



Vi uppskattar att du väljer en ny produkt från R82, en global leverantör av tekniska hjälpmedel och anordningar för barn och vuxna med särskilda behov. Läs denna användarhandbok före användning och spara den för framtida behov, för att dra full nytta av valmöjligheterna som erbjuds genom denna produkt.

#### Avsett ändamål

Enheten är ett modulärt sittsystem för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

#### Indikationer

Enheten kan användas av barn och vuxna med funktionsnedsättning som saknar förmåga att bibehålla en sittande ställning. Produktens målgrupp baseras på funktionsförmåga och inte på ett specifikt hälsotillstånd eller ålder

Användaren är den person som sitter i enheten. Vårdgivaren är den person som hanterar enheten. Lämna aldrig användaren utan uppsikt i denna enhet. Säkerställ att en vårdgivare ständigt har uppsikt över användaren.

Användningen av enheten kommer att avbrytas fler gånger under dagen då användaren ligger, står eller sitter i ett annat hjälpmedel eller ett konventionellt alternativ.

Enheten lämpar sig för transport av barn och vuxna från 22 kg upp till den högsta angivna användarvikten för transport.

#### Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer

#### Försiktighetsåtgärder

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hänsyn till produktens konfiguration och användningen av tillbehören för användare med begränsningar av:

- Sensoriska funktioner och smärtekänsla gör att man bör överväga en extra kontroll av trycket som orsakas av stödet från enheten och dess tillbehör.
- För rörelsefunktion (t.ex. upplevelse av ofrivilliga rörelser), överväg att använda en anordning med dynamiskt ryggstöd.
- För förmågan att bibehålla en sittande ställning, använd produkten med tillbehör (t.ex. sidostöd, västar, bälten eller armstöd och en bricka).
- Förmågan att bibehålla huvudets läge. Överväg att använda tillbehör eller en produkt som ger stöd åt huvudets läge.

#### Användningsområden

Produkten är avsedd för inom- och utomhusbruk

#### Medföljande verktyg:

- 5 mm insexnyckel

#### Deklaration om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller kraven i förordningen för medicintekniska produkter (2017/745). CE-märkningen måste tas bort när produkten byggs om, används i kombination med produkter från en annan tillverkare eller vid användning av reservdelar och utrustning som inte är R82-originaldelar. Denna produkt uppfyller även kraven i:

- EN 12182
- EN 12183



#### Information om återvinning

En uttjänt produkt ska plockas isär och sorteras efter materialslag så att delarna kan återvinnas eller kasseras på rätt sätt. Du kan kontakta din lokala återförsäljare för en exakt beskrivning av varje material. Vänligen kontakta dina lokala myndigheter för information om möjligheterna för återvinning eller ett miljövänligt sätt att kasta använd produkt.

#### Tillbehör och reservdelar

Det finns flera olika tillbehör till produkten från R82. Tillbehören är anpassade för varje brukares behov. Reservdelar kan fås på begäran. De specifika tillbehören finns på vår webbplats och du kan kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.

#### R82-garanti

R82 lämnar en 2-årsgaranti med avseende på brister som orsakats av tillverkningsfel eller bristfälligt material och en 5-årsgaranti när det gäller brott på metallramen orsakade av bristfälliga svetsfogar. Det kan ha en negativ inverkan på garantin om kunden underlåter att utföra erforderlig service och/eller dagligt underhåll i enlighet med riktlinjerna och föreskrivna intervaller som anges av leverantören och/eller i User Guide. För mer information – se etac:s webbplats/ nedladdning.

Livslängden för produkten vid normal användning är åtta år om allt underhåll och all service registreras och utförs enligt tillverkarens anvisningar. Enheten kan återutges under sin livstid

Garantin gäller endast i det land där produkten har köpts, och om produkten kan identifieras med ett serienummer. Garantin täcker inte skada genom olyckshändelse, inklusive skada orsakad av felaktig användning eller försummelse. Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar, t.ex. däck eller klädsel, som utsätts för normalt slitage och behöver bytas ut regelbundet.

Garantin blir ogiltig om andra delar än originaldelar används, eller om produkten inte har underhållits, reparerats eller ändrats i enlighet med riktlinjerna i våra instruktioner och enligt de intervaller som rekommenderas av leverantörerna och/eller anges i vår User Guide. R82 förbehåller sig rätten att granska både den produkt som garantianspråket gäller och relevant dokumentation innan garantianspråket godkänns, samt att avgöra om den defekta produkten ska repareras eller bytas ut. Kunden ansvarar för att returnera den produkt som garantianspråket avser till inköpsstället.

#### Information om förhandsförsäljning

- [www.etac.com](http://www.etac.com)



## Säkerhet

Skyltar/etiketter, symboler och instruktioner på produkten får aldrig täckas över eller tas bort, utan måste förbli synliga och möjliga att läsa under hela produktens livslängd. Byt ut eller lappa ihop oläsliga eller skadade skyltar/etiketter, symboler och instruktioner omgående. Kontakta din lokala återförsäljare för instruktioner.

Om en biverkning uppstår i samband med produkten ska den utan dröjsmål rapporteras till den lokala återförsäljaren och den behöriga nationella myndigheten. Den lokala återförsäljaren kommer att vidarebefordra informationen till tillverkaren.

## Vårdare

- Läs igenom User Guide noggrant före användning och behåll dem för framtida behov. Om produkten används felaktigt kan brukaren skadas allvarligt
- Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningrisk om de tas bort från deras avsedda plats
- Använd alltid korrekt lyftteknik och hjälpmedel som är lämpliga för ändamålet
- Lämna aldrig brukaren i produkten utan uppsikt. Se till att en vuxen har ständig uppsikt
- Vid reparation/byte av delar får endast nya originaldelar och originaltillbehör från R82 användas, och arbetet måste utföras i enlighet med de riktlinjer och intervall som föreskrivs av leverantören
- Avbryt användningen av produkten och kontakta din lokala återförsäljare så fort som möjligt om något inträffar som gör att din produkt från R82 inte känns säker eller om några delar går sönder
- Information om ram- och säteskombinationer inklusive maxbelastning per kombination finns på: [etac.com](http://etac.com)
- Information om transport finns i dokumentet "Transportation in Motor Vehicles" (Transport in Motor Vehicles) som medföljer produkten

## Miljö

- Kontrollera hur varm produkten är på ytan innan brukaren placeras i den. Detta är särskilt viktigt för brukare med okänslig hud eftersom de inte känner värmen. Låt produkten svalna innan den används om ytan är varmare än 41 °C.

## Brukare

- Om brukarens vikt ligger nära produktens maxvärden och/eller om brukaren gör många ofrivilliga rörelser, t.ex. gungar, kan det vara lämpligt att i stället välja en större storlek, som klarar av högre belastning, eller en annan produkt från R82

## Produkt

- Gör alla lägesinställningar för produkten och tillbehören och kontrollera att alla vred, skruvar och spännen sitter fast ordentligt före användning. Förvara alla verktyg utom räckhåll för barn
- Kontrollera produktens stabilitet innan du placerar brukaren i den
- Kontrollera produkten och alla tillbehör och byt ut alla utslitna delar innan användning
- Det är viktigt att använda en trasa eller liknande om verktyg används vid justering av gasfjäders
- Produkten har provats gällande antändlighet och är icke-antändlig enligt EN 1021-1, EN 1021-2 och ISO 7176-16
- Produkten kan förlora sina flammhämmande egenskaper om den används med stoppning som inte kommer från R82.

### Underhåll

Underhållet av en medicinteknisk produkt är helt ägarens ansvar. Om instruktionerna gällande underhåll inte följs kan detta göra att garantin upphör att gälla. Dessutom kan underlåtenhet att underhålla produkten äventyra det kliniska tillståndet eller säkerheten för brukare och/eller vårdare.

### Dagligen

- Använd en torr trasa för att rengöra produkten
- Visuell inspektion. Reparera eller byt ut eventuella skadade eller utslitna delar
- Se till att alla fästen sitter där de ska och har monterats på rätt sätt
- Kontrollera att inga fästen och spännen är utslitna
- Observera eventuella MAX-markeringar innan justering

### Varje vecka

- Använd en trasa som doppats i varmt vatten med mild rengöringsmedel/tvål utan blekmedel och som vridits ur för att torka bort skräp och smuts. Torka torrt före användning.
- Desinfektera produkten; mer information finns i avsnittet om desinfektion i denna bruksanvisning

### Varje månad

- Alla muttrar och bultar på denna produkt måste kontrolleras och dras åt för att undvika onödiga fel
- Olja de svängbara delarna. Vi rekommenderar att du använder ett professionellt system för smörjning

### Årligen

- Kontrollera att ramen inte har några sprickor och utför punkterna på checklisten för service. Använd aldrig en produkt där något fel misstänks. Vänligen se checklisten för service

### Tvätt:

Dynan är avtagbar och överdraget kan tvättas i max. 40 °C med ett mildt tvättmedel i en tvättmaskin. Klädseln har inkontinensskydd och kan tvättas för hand i varmt vatten. Låt skumdynorna torka innan de sätts tillbaka i överdraget. Klädselns skick ska kontrolleras minst var sjätte månad och bytas ut vid behov. Det är viktigt för rullstolens hållbarhet att hålla chassit rent.

Rengöring i tvättmaskin

Denna produkt kan tvättas i 60° med ett mildt rengöringsmedel i 15-20 minuter i en tvättmaskin avsedd för medicinsk enheter. Använd tvättmaskinens torkfunktion för att torka produkten. Rengör tillbehören separat.

Ta bort följande delar före tvätt och rengör dem separat:

- Tillbehör
- Dynor

### Desinfektion

Produkten, utan tillbehör och dynor, kan desinficeras med en 70 % isopropanollösning. Vi rekommenderar att man använder en trasa som doppats i varmt vatten med mild rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort skräp och smuts. Låt torka före desinficering.

Serviceintervall

En utförlig kontroll av produkten måste göras en gång om året (en gång i halvåret vid mer frekvent användning) och varje gång som produkten tas i bruk efter uppehåll. Klädseln är avtagbar och kan tvättas i 60° (R82 rekommenderar att klädseln tvättas i 40°). Kontrollen bör utföras av en tekniskt kunnig person som har utbildats i hur produkten används.

Checklista för service:

Kontrollera och justera så att följande fungerar enligt avsedd användning. Reparera eller byt ut eventuella skadade eller utslitna delar. Kontrollera:

- Ryggstöd och handtaget för att låsa ryggstödet i ett läge
- att tillbehör kan föras in och låsas i fästena längst upp på ryggstödet med hjälp av vredet och handtagen som sitter på fästena
- att insatser för fästen på ryggstödet och sätet är i gott skick
- att produktens muttrar och bultar är åtdragna
- fästen och spännen med avseende på slitage
- Att produkten inte har några sprickor eller utslitna delar
- att alla etiketter på produkten är oskadade

### TEKNISKE DATA

Sits: PAG – återvinningsbar

Skum: Flamsäker

Överdrag: Gemma

Underrede: Pulverlackerad aluminium

### TILLVERKARE

R82 A/S

Parallelvej 3

8751 Gedved

### ÅTERFÖRSÄLJARE

ETAC SVERIGE AB



BOX 203, 334 24 ANDERSTORP

SWEDEN

TEL 0371-58 73 00

FAX 0371-58 73 90

INFO@ETAC.SE WWW.ETAC.SE

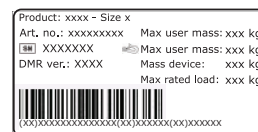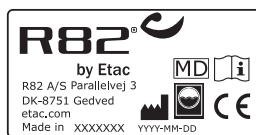

## PRODUKT MÄRKNING


### Sits till Panda Futura Standard och Aktiv

#### A) Tillverkare

Etiketten sitter på undersidan av sitsen.

#### B) Serienummer

Etiketten sitter på undersidan av sitsen.

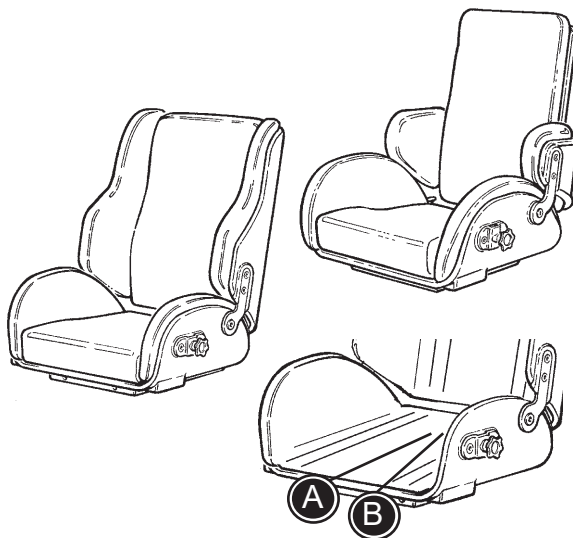

S  
V

	Sittdjup mm (inch)	Sätetsbredd mm (inch)	Rygg höjd mm (inch)	Armstöd till sittplatsavstånd mm (inch)	Enhetsmängd kg (lb)
Panda Active, size 2	240 (9 1/2")	220 (8 3/4")	350 (13 3/4")	130-180 (5-7")	5,2 (11.5)
Panda Active, size 2 1/2	280 (11")	250 (9 3/4")	380 (15")	130-180 (5-7")	5,6 (12.3)
Panda Active, size 3	310 (12 1/4")	290 (11 1/2")	400 (15 3/4")	130-240 (5-9 1/2")	6,2 (13.7)
Panda Active, size 4	360 (14 1/4")	320 (12 1/2")	450 (17 3/4")	130-240 (5-9 1/2")	7,5 (16.5)
Panda Standard, size 1	220 (8 3/4")	220 (8 3/4")	290 (11 1/2")	130-180 (5-7")	5,7 (12.5)
Panda Standard, size 2	240 (9 1/2")	220 (8 3/4")	390 (15 1/4")	130-180 (5-7")	5,7 (12.5)
Panda Standard, size 2 1/2	280 (11")	250 (9 3/4")	410 (16 1/4")	130-180 (5-7")	6,2 (13.7)
Panda Standard, size 3	310 (12 1/4")	290 (11 1/2")	440 (17 1/4")	130-240 (5-9 1/2")	7,3 (16.1)
Panda Standard, size 4	360 (14 1/4")	320 (12 1/2")	535 (21")	180-240 (7-9 1/2")	8,7 (19.2)

	Max användarmängd kg (lb)	Max användarmängd vid transport kg (lb)	Tillbaka tillt mm (inch)	Armstödetts framkant mm (inch)	Max nominell last
Panda Active, size 2	30 (66.1)	-	-4° - +27°	280 (11")	37,2 (82)
Panda Active, size 2 1/2	50 (110.2)	-	-10° - +20°	280 (11")	57,6 (126.9)
Panda Active, size 3	50 (110.2)	-	-9° - +27°	370 (14 1/2")	58,2 (128.3)
Panda Active, size 4	60 (132.3)	-	-6° - +17°	480 (19")	69,5 (153.2)
Panda Standard, size 1	30 (66.1)	-	-3° - +28°	280 (11")	37,7 (83.1)
Panda Standard, size 2	30 (66.1)	30 (66.1)	-15° - +32°	280 (11")	37,7 (83.1)
Panda Standard, size 2 1/2	50 (110.2)	50 (110.2)	-10° - +35°	280 (11")	58,2 (128.3)
Panda Standard, size 3	50 (110.2)	50 (110.2)	-5° - +36°	370 (14 1/2")	59,3 (130.7)
Panda Standard, size 4	60 (132.3)	57 (125.7)	-5° - +30°	370 (14 1/2")	70,7 (155.8)

## Symboler



För inom- och utomhusbruk



Se anvisningarna

Den senaste versionen av anvisningarna finns alltid tillgänglig och kan skrivas ut i större storlek från R82:s webbplats






Varning













Den här symbolen används i handboken tillsammans med ett nummer som hänvisar till instruktionerna nedan. Den uppmärksammar på situationer som kan utgöra en säkerhetsrisk för produkten, användaren eller vårdgivaren.

- 01 = Risk att fastna
- 02 = Tipprisk
- 03 = Transport i fordon
- 05 = Klämrisk

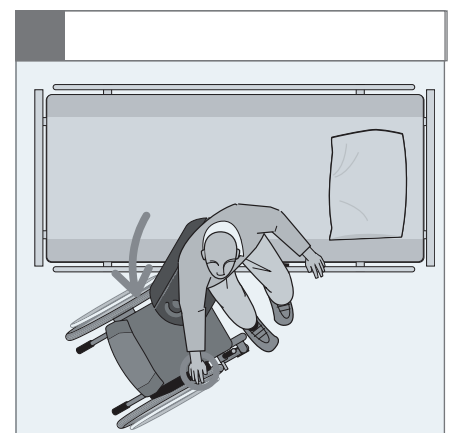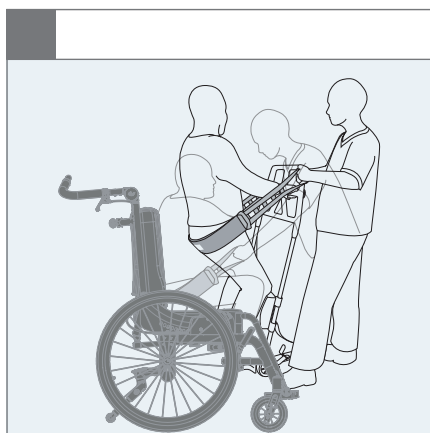
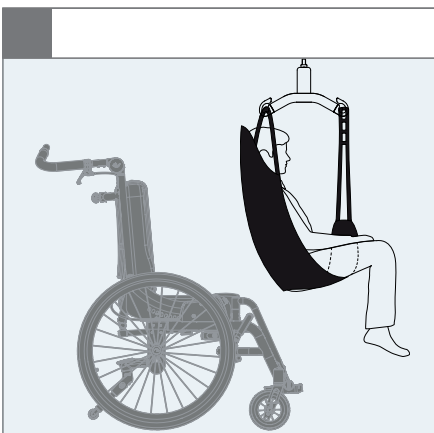
## Lyftteknik

Använd alltid korrekt lyftteknik och hjälpmedel som är lämpliga för ändamålet

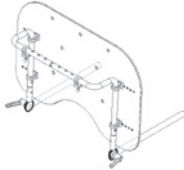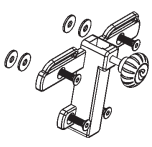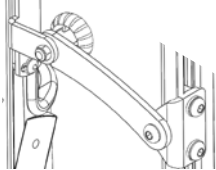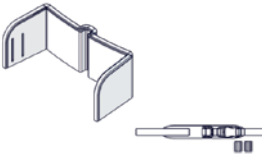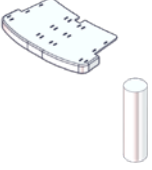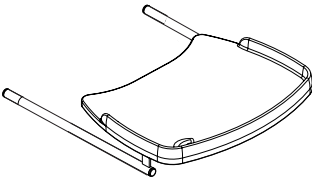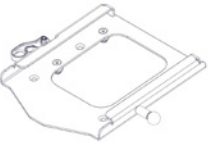

付属品					
	9996097901			9996097725	
	9996097699			9996097738	
S V		9996097128		N/A	
		9996097338		N/A	
		9996097339		N/A	
		9996097699		N/A	
		9996097714		N/A	
		9996097720		N/A	



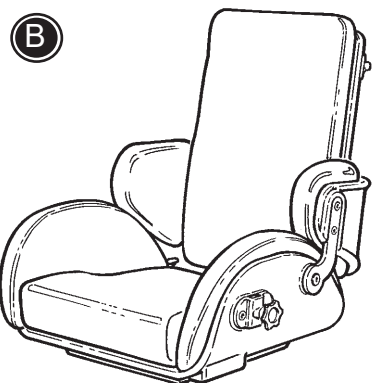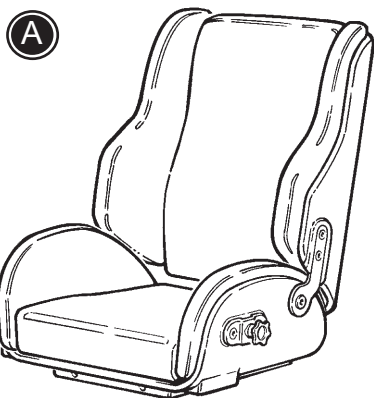

## SITSAR

Panda kan utrustas med en sits av typ A STANDARD i någon av fem storlekar, eller av typ B AKTIV i någon av 4 storlekar.

Den avgörande skillnaden mellan de båda typerna är att typ AKTIV ger barnet stor rörelsefrihet för axlar och armar, genom att det sitter bålstöd bara på den nedersta tredjedelen av ryggstödet, medan typ STANDARD har högre sidor som ger stöd i sidled och hindrar armarna från att röra sig bakåt.

Barnets behov av stöd avgör vilken typ av sits som passar bäst. Båda typerna är förberedda för montering av olika tillbehör efter behov.

## MONTERING / DEMONTERING AV SITS

Montering av sitsen:


Vid montering skjuts sitsen in i adaptern till stopp, så att det "snäpper" fast.



Använd inte det första hålet där sitsen snäpper fast. Detta är ett säkerhetshål som är avsett att fånga upp sitsen om spärren skulle hoppa ur vid en olycka.




Demontering av sitsen:

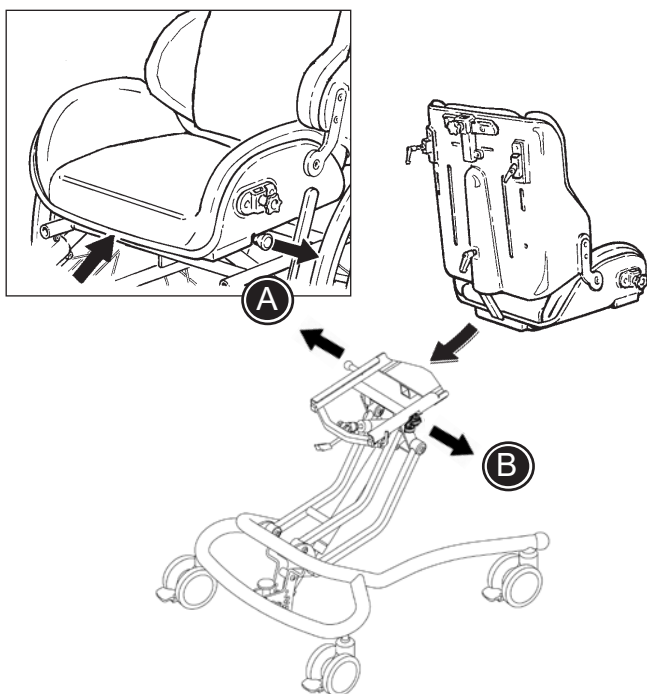
Lås upp det röda handtaget (B). Dra ut knappen (A). Dra sitsen framåt och lyft samtidigt.



## RYGGFÄLLNING


Lossa låsspaken A för att fälla ryggen.


-  Håll alltid i stolsryggen med ena handen när låsspaken lossas.
-  Var försiktig så att fingrarna inte fastnar mellan ryggstöd och sits när du vinklar ryggstödet bakåt.
-  Varning 05 Klämrisk mellan ryggstöd och stomme/körbygel vid inställning av ryggstödsvinkel.

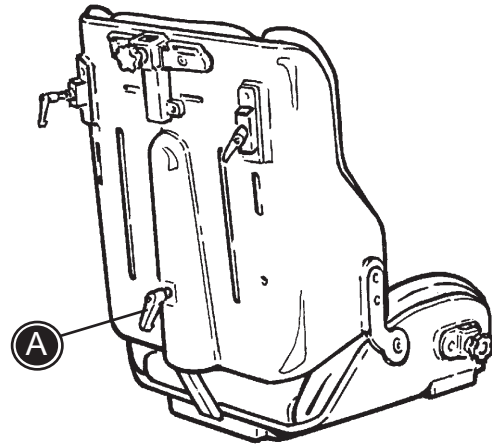


## RYGGFÖRLÄNGARE

- 1) Montering och höjjustering av ryggförlängaren.
- 2) Montering av huvudstöd på ryggförlängaren.


-  Var försiktig så att fingrarna inte hamnar i kläm mellan ryggförlängare och sits när du justerar ryggförlängaren.

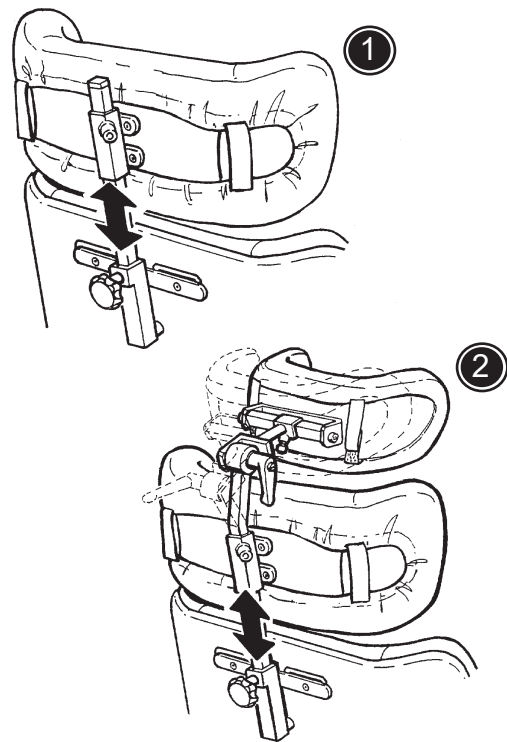


## HUVUDSTÖD

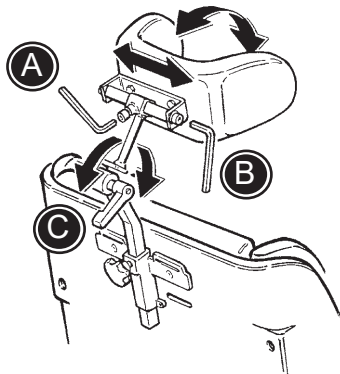

A) Justering av huvudstödet i sidled.

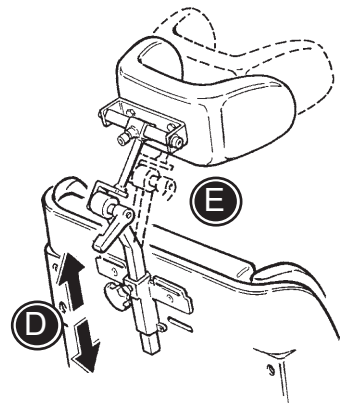


B) Vinkling av huvudstödet.

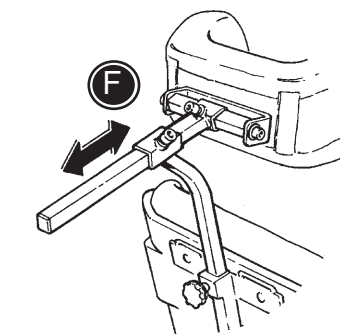

C) Vinkling av huvudstödsarmen.

D) Höjdinställning av huvudstödet.

**!** Om alla förskruvningarna A, B, C och D är lösa kan huvudstödet passas in exakt.

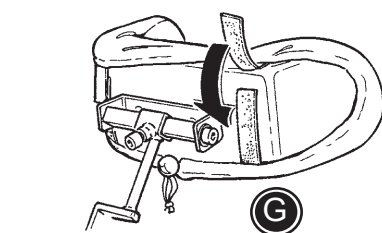

E) När rätt läge och vinkel har ställts in dras förskruvningarna A, B, C och D fast. Om huvudstödet behöver sitta långt fram kan stolpen för huvudstödet vridas ett halvt varv.

F) Huvudstöd med svanhalsmekanism används om huvudstödet trots vridning ett halvt varv inte räcker tillräckligt långt fram.

G) Överdraget på huvudstödet är fastsatt med kardborreband.

**!** Varning 05 Klämrisk mellan huvudstöd och stomme/körbygel vid inställning av ryggstödet.

S  
V




## KÖRHANDTAG

Panda Futura Standard:


Beslagen monteras på ryggstödet med insexnyckel (A). Körhandtagen monteras i beslagen. Handtagen låses fast med låsspaken C.

Panda Futura Aktiv:

Montera beslagen på ryggstödet med insexnyckel (B). Skjut in körhandtagen i beslagen. Handtagen låses fast med låsspaken C.

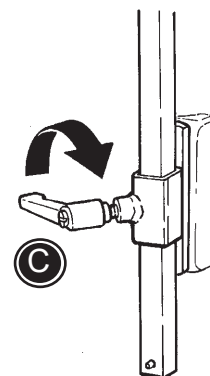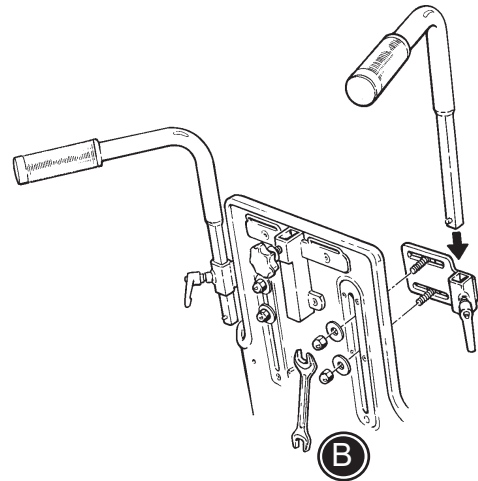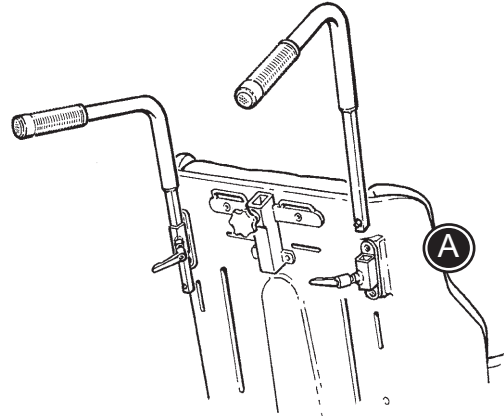


## SVÄNGBARA AXELHÅLLARE

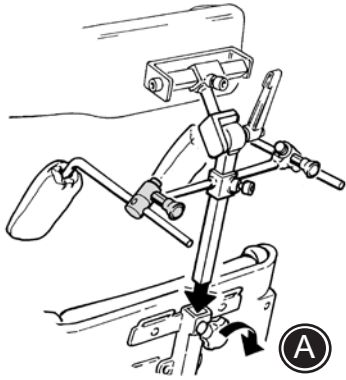

A) Axelhållarna monteras på staget för huvudstödet innan detta monteras i beslaget.

B) Dra ut knoppen så att axelhållarna kan vridas åt sidan.


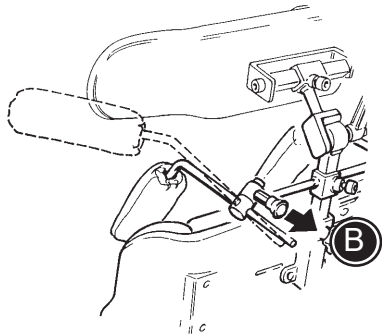


C) Axelhållarna regleras i höjded med hjälp av insexnyckeln.

D) Axelhållarna regleras i djupled med hjälp av insexnyckeln.




De rörliga delarna bör smörjas regelbundet med en liten mängd olja.

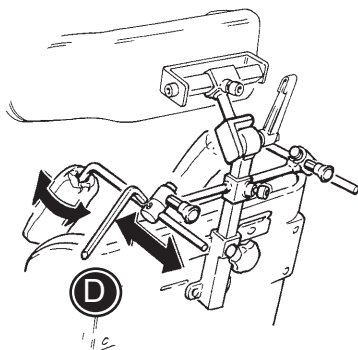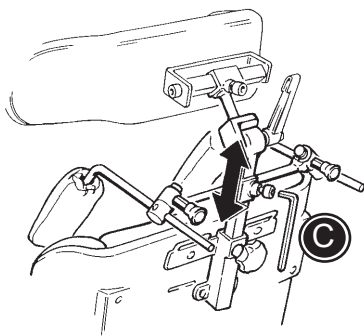

## FASTA BÅLSTÖD

Tag bort ryggstödsdynan och montera bålstöden i urtagen med hjälp av medföljande skruvar A.

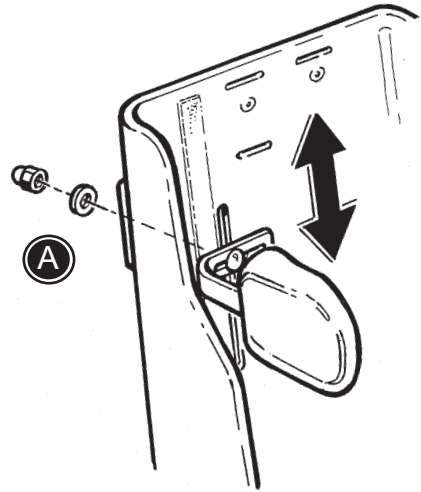


## SVÄNGBARA BÅLSTÖD

Tag bort ryggstödsdynan och montera de svängbara bålstöden i urtagen med hjälp av medföljande skruvar A.

Bålstöden kan svängas när den röda knappen B hålls intryckt.




De rörliga delarna bör smörjas regelbundet med en liten mängd olja.

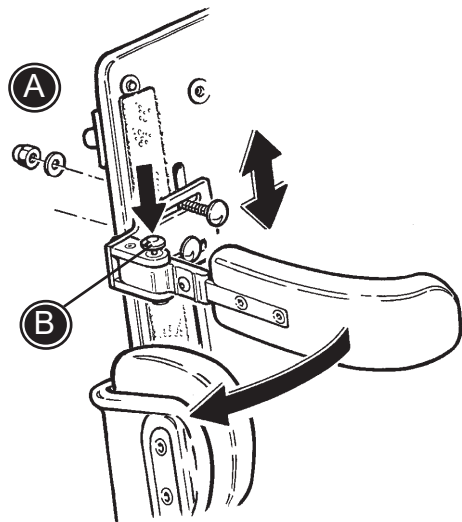

## SVÄNGBARA KNÄSTÖD

Fäst anordningen (A) under sitsen med 4 mm-insexnyckeln. För in knästöden i anordningen och dra åt med 6 mm-insexnyckel (B)

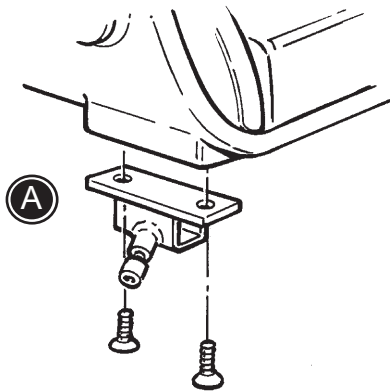

\* Lossa skruvarna (C) med 6 mm-insedxnyckel för att justera vinkeln på knästödsskenorna.


\* Lossa skruvarna (B) eller (D) med 4 mm- eller 6 mm-insexnyckel för att justera djupet.

\* Knästöden kan vinklas och justeras i sidled (E) med 4 mm-insexnyckel.

\* Tryck ned den röda knappen på anordningen (F) om du vill vinkla undan knästöden.



Ansvarig för skötseln av produkten bör kontrollera och olja svängbara delar regelbundet, minst var tredje månad.

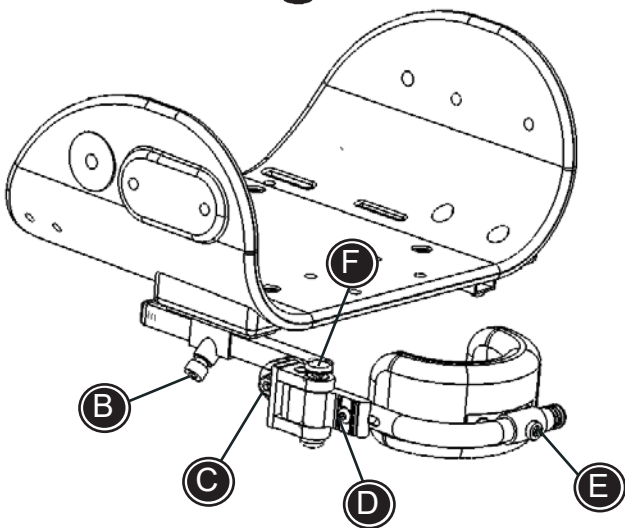

## SITSFÖRLÄNGARE

Sitsförlängaren skjuts in i beslaget under sitsen och ställs in i önskat läge. Läget fixeras med låsspaken A under sitsen.

## FOTPLATTA/ FOTPLATTOR

A) Lossa låsspaken för att montera och djupjustera staget till fotplattan/fotplattorna.





B) Använd spaken för att vinkeljustera staget .

C) Fotplattornas höjdläge ställs in med hjälp av insexnyckeln.

D) Fotplattornas lutningsvinkel ställs in med hjälp av insexnyckeln.

E) Fotplattornas höjdläge ställs in med hjälp av insexnyckeln.

F) Fotplattornas lutningsvinkel ställs in med hjälp av insexnyckeln.

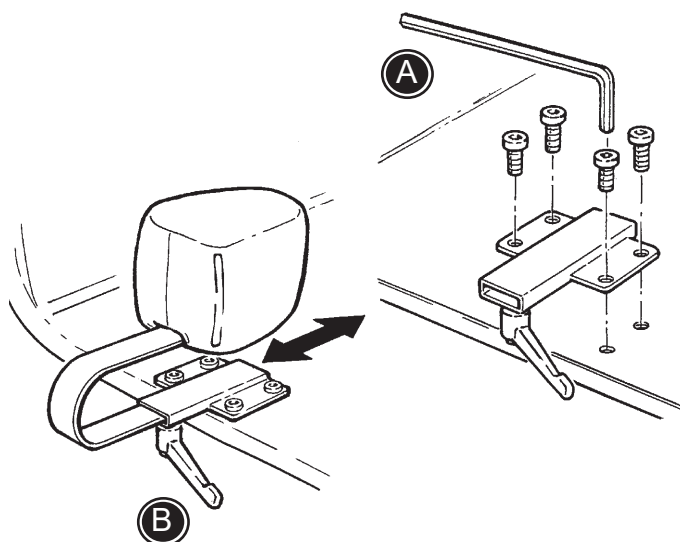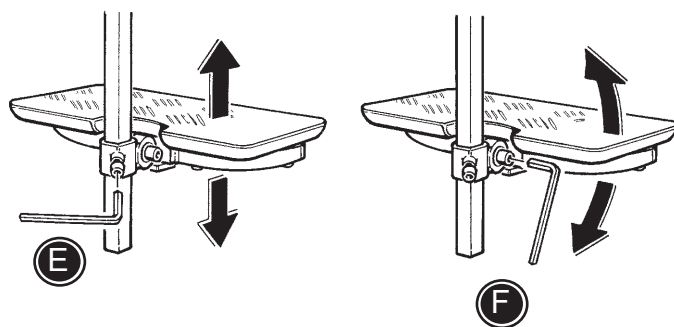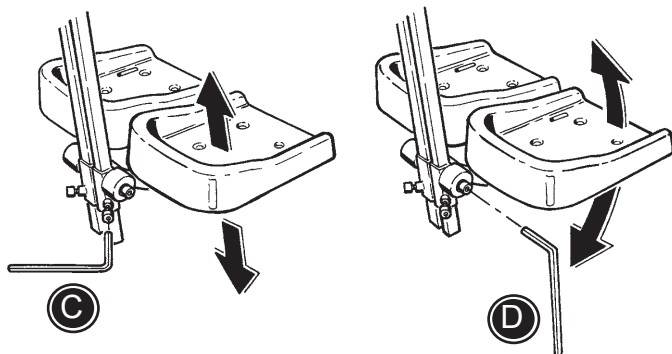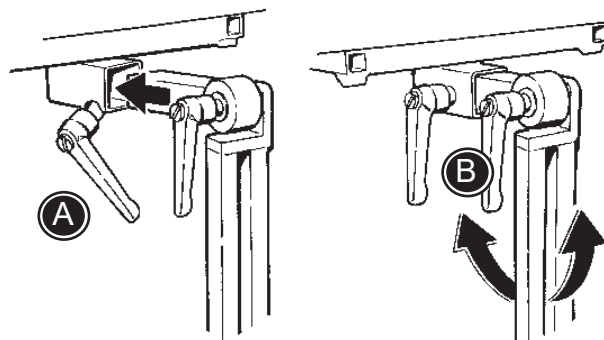




## ARMSTÖD OCH BORD


A) Inställning av armstödet höjdläge och lutning.

B) Inställning av bordet i sidled.




C) Inställning av bordet i djupled.


D) Inställning av bordets lutning.

 Bordet kan bara monteras på Panda-stolar som har armstöd.


 Var försiktig så att fingrarna inte hamnar i kläm mellan stolen och armstödet när du justerar armstödet.

 Håll inte i armstödet när du bär produkten

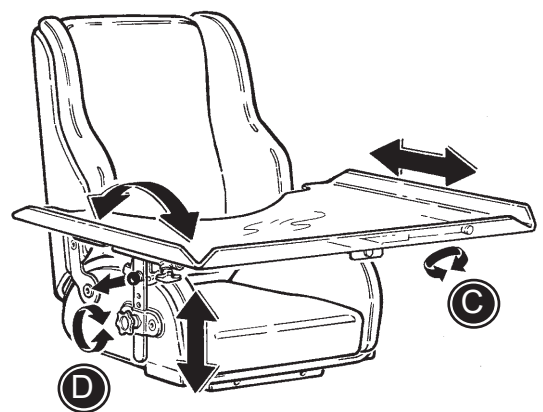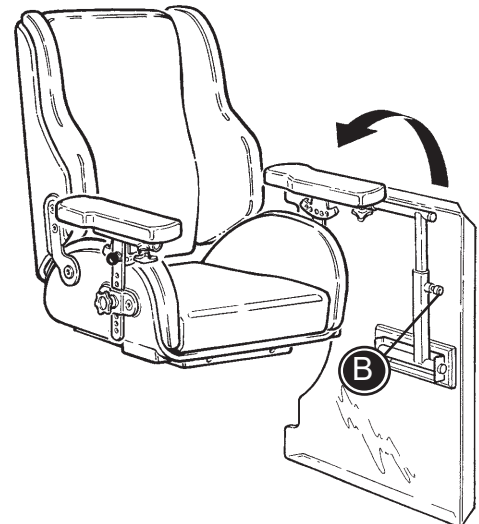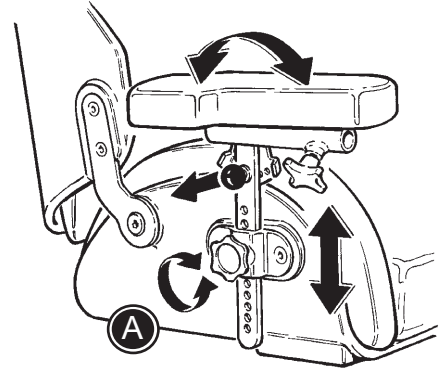


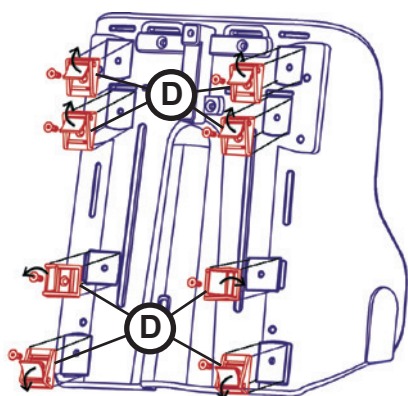

Standard

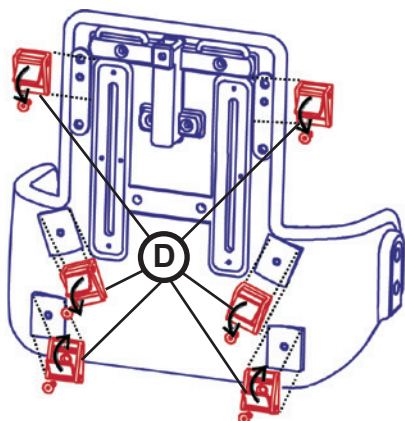


Aktiv

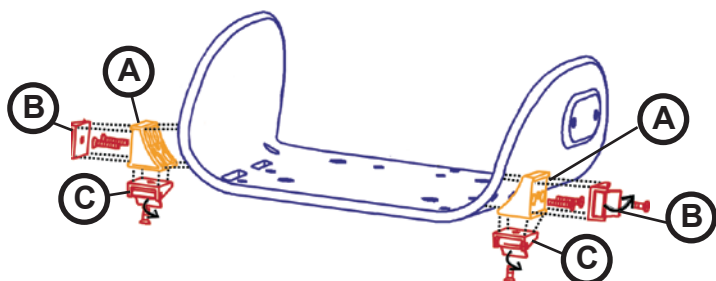

## Montering på sitsen

- 1) På var sida av sitsen monteras ett syntetiskt adapterblock (A) med två sexkantskruvar.
- 2) Ett fixlock (B) monteras på var sida av sitsen med en sexkantsnyckel (sats A) för Y-bälte och abduktionssele (modell 3189108-x).

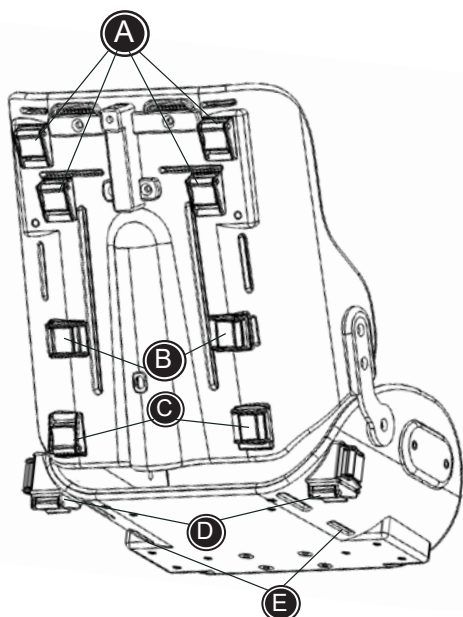

## MONTERA FIXLOCK

Fixlock kan fästas på Panda-sitsen, för att snabbt och enkelt kunna fästa och justera västar och selar.

Y-bälte (3185427-x), abduktionssele (3189108-x), H-sele (3185428-x) och kryssväst (3189625-x) kan då snabbt fästas i korrekt position. En sexkantsnyckel krävs för att installera dem.

### Montering på ryggstödet

- 1) Sex fixlock (sats D) fästs på ryggstödet med sexkantskruvar. De övre två kan också ställas in i en lägre position så att remmarna kan träs genom sätena (efter att de skurits upp).
- 2) Kryssvästens remmar kan träs igenom skårorna och fästas med fixlock.

Obs!

Remmarna kan kortas ned till rätt längd efter installationen (kontrollera att ändarna är ihopsmälta).

Använd den här skissen tillsammans med beskrivningarna på följande sidor.

## VÄST OCH KRYSSVÄST



Montera fixlocken i bakplattan.  
Västen och kryssvästen kan öppnas och stängas med spännena och dragkedjan.

Följ anvisningen nedan.

- \* Montera axelremmarna i bältesbeslagen på ryggplattans övre del. (A)
- \* Montera de övre remmarna i sidobältesbeslagen på ryggplattan (B).
- \* Montera de nedre remmarna i sidobältesbeslagen på ryggplattans nedre del (C).



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

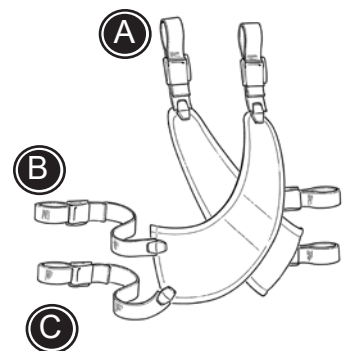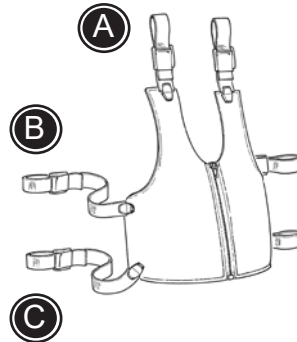

## STERNUMSELE

Montera fixlocken i bakplattan.


Sternumselen kan öppnas och stängas med spännena.


Följ anvisningen nedan.

- \* Montera axelremmarna i bältesbeslagen på ryggplattans övre del. (A)
- \* Montera de övre remmarna i sidobältesbeslagen på ryggplattan (B).
- \* Montera de nedre remmarna i sidobältesbeslagen på ryggplattans nedre del (C).



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

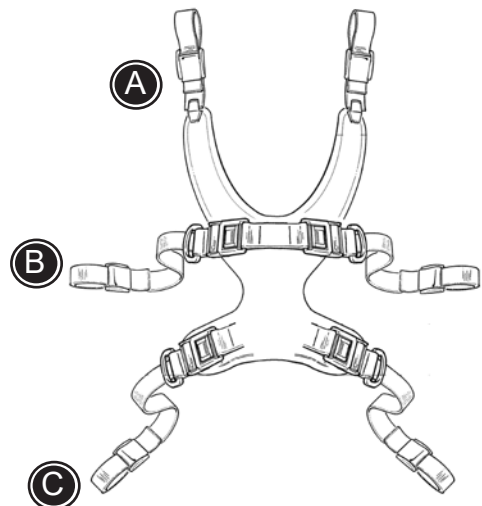

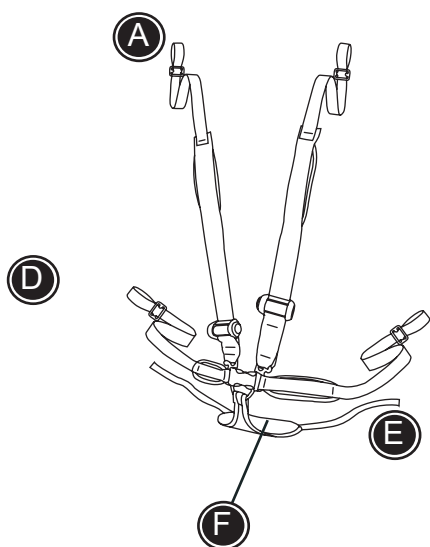

## 5-PUNKTSBÄLTE


Montera fixlocken i bakplattan. 5-punktsbältet kan öppnas och stängas med spännena.

Följ anvisningen nedan:

- \* Montera sidoremmarna (E) i bältesbeslagen i sitsen eller i bältesbeslagen (D).
- \* Placera brukaren i stolen sittande på "triangeln" (F).
- \* Sidoremmarna (D) monteras i bältesbeslagen i sitsen.
- \* Montera axelremmarna i bältesbeslagen på rygglattans övre del.



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

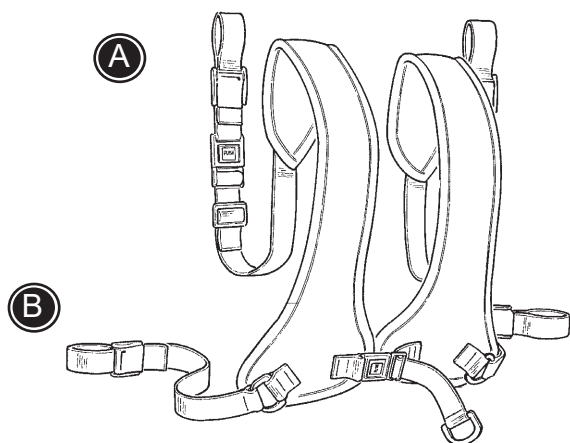

## H-SELE POLSTRAD

Montera fixlocken i bakplattan.

H-selen kan öppnas och stängas med spännena.

Följ anvisningen nedan.

- \* Montera axelremmarna i bältesbeslagen på rygglattans övre del. (A)
- \* Montera de sidoremmarna i bältesbeslagen på rygglattan (B).



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

## HÖFTBÄLTE

Montera fixlocken i sitsen.


Höftbältet kan öppnas och stängas med spännena.

Följ anvisningen nedan.

\* Montera remmarna i bältesbeslagen under sitsen (D).



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

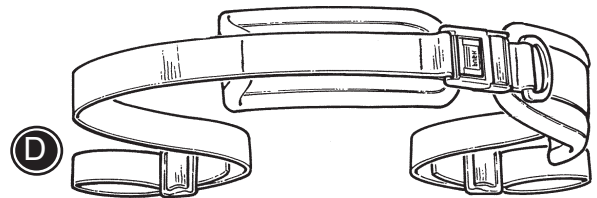

## Y-BÄLTE

Montera fixlocken i sitsen.

Y-bältet kan öppnas och stängas med spännena.

Följ anvisningen nedan.


\* Montera remmarna i bältesbeslagen under sitsen (D).


\* Montera remmarna (E) i de främre glidbyglarna i sitsen.

E och D är utbytbara.



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

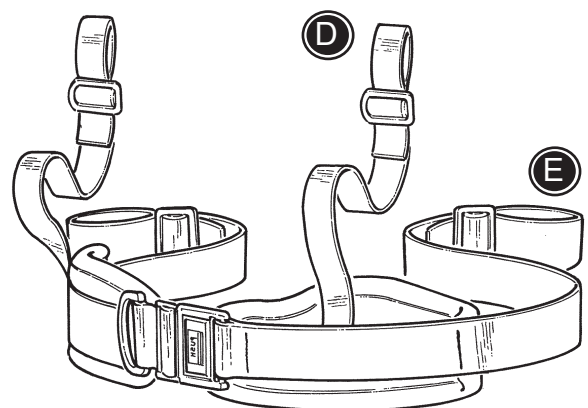

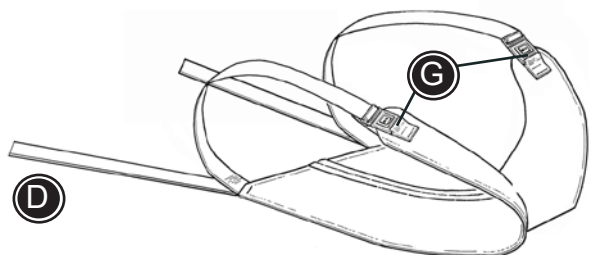

## ABDUKTIONSSELE


Montera fixlocken i sitsen.

Följ anvisningen nedan.

- \* Öppna spännena (G).
- \* Montera remmarna (D) i bältesbeslagen under sitsen (D).
- \* Placera brukaren på bältet och stäng spännena (G) över höfterna.



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

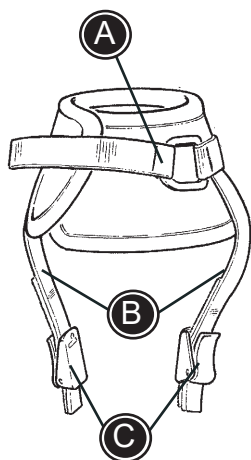

## ANKELSELE

Ankelselarna kan öppnas och stängas med kardborrbandet eller spännets (A).

Följ anvisningen nedan för att montera.

- \* Ta bort spännena (C).
- \* Dra remmarna (B) genom glidbyglarna i fotplattformarna.
- \* Montera spännena (C) igen och kontrollera att remmarna inte glider av.



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

## FOTREMMAR


Fotremmarna kan öppnas och stängas med korborrhäftet eller spännet (A).

Följ anvisningen nedan för att montera.

- \* Öppna remmarna och dra dem (A) genom glidbyglarna i fotplattorna.
- \* Stäng remmarna runt brukarens fot.



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

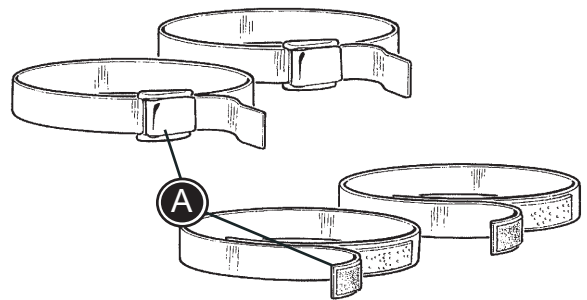

## HANDLEDS MANSCHETT


Handledsmanschetten kan öppnas och stängas med spännet (A).

Följ anvisningen nedan för att montera.

- \* Montera handledsmanschetten runt brukarens handled.
- \* Montera remmen (B) runt armstödsstången.



Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

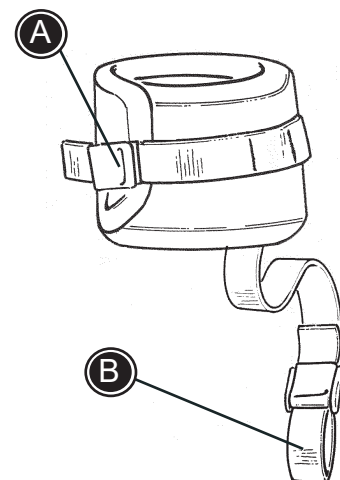


## H-SELEBAND


Montera fixlocken i bakplattan.

H-selebåndet kan öppnas och stängas med spännet.

Följ anvisningen nedan.

- \* Montera axelremmarna i bältesbeslagen på ryggplattans övre del. (A)
- \* Montera sidoremmarna i bältesbeslagen på ryggplattan (B).


 Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

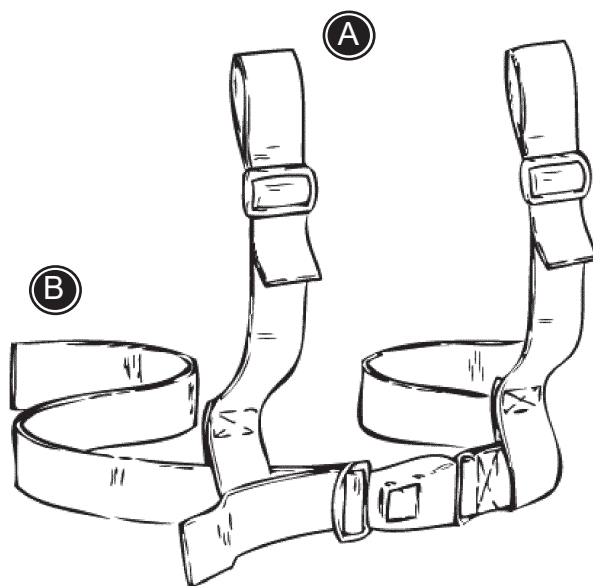


## ÅKPÅSE MED SELAR

- \* Placera åkpåsen i stolen.
- \* Öppna åkpåsen i sidorna och placera brukaren i den.
- \* Stäng den igen.


Det finns kardborrband i åkpåsens sidor, vilket gör att den även går att använda som höftbälte.

 Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.

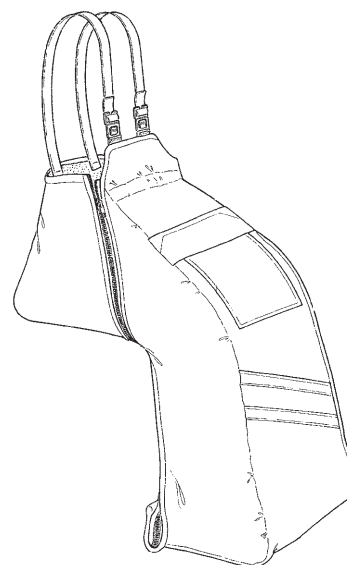

## REGNPÅSE MED HUVA

Regnpåsen räcker över ryggstödet, runt brukarens kropp och under fotstödet. På så sätt täcker den också stolen.

 Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats. Gör en sådan kontroll med jämna mellanrum.