



TechniCare
Improving Healthcare

TOBA Basic



TOBA Line

User manual 2022
V2.0

Index

Index	1
Introduction and warnings.	3
Safety warnings.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Warranty	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Product description	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Intended use	4
Models	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Environmental condition	4
Commissioning TOBA.....	5
Parts	6
Product label	7
Technical details.....	8
Replacement advice	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Functionalities	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Head rest	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Arm rests.....	11
Seating.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Foot rest	11
Castors	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Remote control	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Cleaning and maintenance.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Cleaning	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.2. Maintenance advice	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
EG Verklaring van Conformiteit	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage I, Product referentielijst.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Attachment A: Data Sheets electrical components	17

Manufacturer

TechniCare Ridderkerk B.V.
 Nikkelstraat 24
 2984AM Ridderkerk
 +31 (0)85 0870 421
www.technicare.nl
info@technicare.nl

MD	Medical Device		Pay attention
UDI	Unique Device Identifier		Read user manual
REF	Article number		Date of production
SN	serialnumber		Details manufacturer
LOT	Batchnumber	 = kg	Max. user weight

Introduction and warnings.

Takk for at du bruker TOBA dusjstol. TOBA-stolen er designet for at klienter skal bli vasket og tatt vare på på en sikker og ergonomisk måte. Bruken av TOBA dusjstol er spesielt ment for bruk innen sykehus, omsorgsboliger og andre omsorgsorganisasjoner.

Ta gjerne kontakt med din lokale distributør av produsenten i tilfelle spørsmål.

For å bruke TOBA dusjstol er det viktig å følge advarslene og bruke TOBA dusjstol på riktig måte. Vennligst sørg også for å følge sikkerhetsinstruksjonene.

Det er ikke tillatt å endre, endre eller plassere noe på TOBA dusjstol uten å først kontakte produsenten og motta en skriftlig godkjenning fra produsenten.

Sikkerhetsadvarsler

- Sørg for å kontrollere omgivelsene og rommet for gjenstander eller potensielle farlige situasjoner før du bruker produktet.
- Sørg for å fjerne løse kabler eller løse gjenstander på gulvet før du bruker produktet.
- Før du plasserer pasienten på TOBA dusjstol, må du sørge for at alle 4 hjulene er på bremsen.
- Før du justerer høyde eller helling, må du sørge for at armlenene er plassert riktig.
- Sørg for at fotplaten alltid er i nedre stilling for å gi klienten ekstra komfort etter at klienten er posisjonert.
- Sørg for å plassere klientens armer på de bestemte armlenene.
- Sørg for at ekstra puter er plassert på en trygg og ergonomisk måte når de brukes.
- Det er kun tillatt å kjøre TOBA-stolen i den laveste stillingen.
- Det er kun tillatt å kjøre TOBA-stolen i en rett stilling.
- Sørg for at batteriet til TOBA-stolen er ladet før du bruker den.
- TOBA dusjstol kan bare brukes på flate overflater. Det er ikke tillatt å bruke TOBA dusjstol på overflater med en vinkel på mer enn 10 prosent.
- Vennligst sørg for å lese instruksjonene nøye.



Garanti

Produktene til TechniCare har en garanti på 24 måneder, med unntak av PUR-justeringer.

Produktbeskrivelse

Avsiktet bruk

TOBA dusjstol er en toalett- og dusjstol med formål å brukes til toalettbesøk, dusjing og vask av klienten av helsepersonell.

TOBA dusjstol er en høyde-/lavdusjstol, laget av rustfritt stål, med elektrisk justering for høyde og lav, samt tiltjustering. TOBA leveres komplett med hodestøtte, fotstøtte og justerbare armlener.

TOBA dusjstol er utviklet for vanlig bruk og er spesielt egnet for pasienter med komplekse omsorgsbehov.

Modeller

Vi tilbyr forskjellige modeller for ulike klienter og pasienter. Vi tilbyr følgende modeller:

- | | |
|-----------------------|---|
| - TOBA Dusjstol Basic | Standard stol for vanlig bruk |
| - TOBA Ekstra Lav | Standard stol med ekstra lav posisjon |
| - TOBA XL | Med en maksimal vektgrense på 250 kg, beregnet for overvektige kunder |
| - TOBA Junior | Beregnet for barn opp til 160 cm i lengde |
| - TOBA Move | Selvkjørende med 2 rullestolhjul |

Miljøbetingelser

Klimatiske forhold under bruk av TOBA dusjstol må være i samsvar med følgende:

Under bruk

- | | |
|-------------------------|---|
| - Temperatur: | +5 to +40 |
| - Relativ luftfuktighet | 20% to 80% - non condensing |
| - Atmosfærisk trykk: | 700 to 1060hPa (kan brukes på en høyde opptil ≤ 3000 m) |



Under lagring

- | | |
|-------------------------|--|
| - Temperatur | -10 to +50 |
| - Relativ luftfuktighet | 20% to 80% non-condensing 700 to 1060 hPa |
| - Atmosfærisk trykk - | 700 to 1060 hPa (Rated to be stored at an altitude ≤ 3000 m) |

During transport

- | | |
|-------------------------|--|
| - Temperatur | -10 to +50 |
| - Relativ luftfuktighet | 20% to 80% non-condensing 700 to 1060 hPa |
| - Atmosfærisk trykk - | 700 to 1060 hPa (Rated to be stored at an altitude ≤ 3000 m) |

Igansettelse TOBA

- Trinn 1:
 - Om nødvendig, plasser batteriet i batteriboksen til TOBA
- Trinn 2:
 - Sett alle fire hjul på brems før du plasserer pasienten i TOBA-stolen.
- Trinn 3
 - Om nødvendig, sørg for at TOBA-stolen er i laveste posisjon og i en rett posisjon. Før du plasserer pasienten i stolen, snu armlenene oppover for å sikre åpen vei for pasienten.
- Trinn 4
 - Snu også fotstøttene oppover
- Trinn 5
 - Hvis forrige trinn er fulgt, kan pasienten plasseres i stolen. Hjelp pasienten med å komme seg trygt ned i stolen hvis nødvendig.
- Trinn 6
 - Lukk armlenene
- Trinn 7
 - Sett fotplaten i en horisontal posisjon slik at pasienten kan hvile føttene på platen.
- Trinn 8
 - Hvis pasienten trenger å bli overført til badet, sett alle fire hjul fra brems-posisjon til fri posisjon.
- Trinn 9
 - Før du overfører pasienten, kontakt og forklar hva du har planer om å gjøre
- Trinn 10
 - Kjør pasienten til badet eller toalettet.
- Trinn 11
 - Før du vasker og/eller går på toalettet, sørg for at TOBA-stolen er i brems-posisjon.
- Trinn 12
 - vis alle fire hjul er på brems-posisjon, kan du justere TOBA-stolen i høyde- og tiltfunksjonen.

For å få pasienten ut av TOBA-stolen, følg disse trinnene i omvendt rekkefølge av de ovennevnte trinnene.

Følg rengjøringsinstruksjonene etter hver bruk av TOBA-stolen.

Parts





Douchestoel TOBA Basic		 = 150KG	
Shower chair TOBA Basic			
REF	16.050.01		XX-XXXX
SN	XXXXXXXX - XXX		
LOT	XXX		TechniCare B.V. Nikkelstraat 24 2984 AM Ridderkerk www.technicare.nl
UDI	MD		 
 (01)8720299268036((11))20220830(21)30220075002			

Tekniske detaljer

Materialer

Del	materiale
Ramme	Rustfritt stål 304 Dobbelt pulverlakkert RAL 9010
Hengseldeler	Rustfritt stål 304 Dobbelt pulverlakkert RAL 2004
Sete, ryggstøtte og armlener	PUR-materiale med innside av tre og metall.
Armlene	Rustfritt stålrør sandblåstet
Hjul	Forsterket glassfylt polyamid Ø125mm Svingkrans med to kulelager
Elektriske komponenter	LINAK-deler Se datablad

Målinger og spesifikasjoner

Spesifikasjon	tekniske detaljer
Maks brukervekt	150 kg
Vekt stol	50KG
Sittedybde	50mm
Deating depth	420mm
Sittedybde 420mm	420mm
Total bredde	600mm
Total lengde	800mm
Total høyde	480mm-1060mm
Total tilt laveste posisjon	-7° - +11°
Total tilt høyeste posisjon	16° - 32°
Bredde ryggstøtte	400mm
Høyde ryggstøtte	380mm
Armlener	Slås opp
Lengde armlener	500mm
Montering for sengepanne	Standard integrert
Sengepanne	Ikke inkludert
Fotplatebredde	250mm
Fotplatelengde	250mm
Egnet for toalettthøyde	420 mm
Hjulmerke	TENTE
Hjuldiameter	100 mm
Bremsesystem for hjul	Dobbelt bremsesystem
Fotstøtter	Valgfrie og avtakbare
Elektrisk komponentmerke	LINAK

Anbefalt Utsifting

Spesifikasjon	Tekniske detaljer
Sete	1 år
Ryggstøtte	3 år
Armlener	2 år
Batteri	3 år
Løftmotorer	Ved behov

Funksjonaliteter


Vennligst finn mer informasjon nedenfor angående de forskjellige funksjonalitetene til TOBA-stolen.

- Hode-støtte
- Arm-støtte
- Sete
- Fotskammel
- Hjul
- Fjernkontroll

Hode-støtte

Hode-støtten er justerbar både i høyde og form og posisjonering.

Hode-støtten kan justeres på fire forskjellige punkter, som er vist i bildet nedenfor. Dette gjør at du kan justere både høyden på hode-støtten og posisjoneringen.

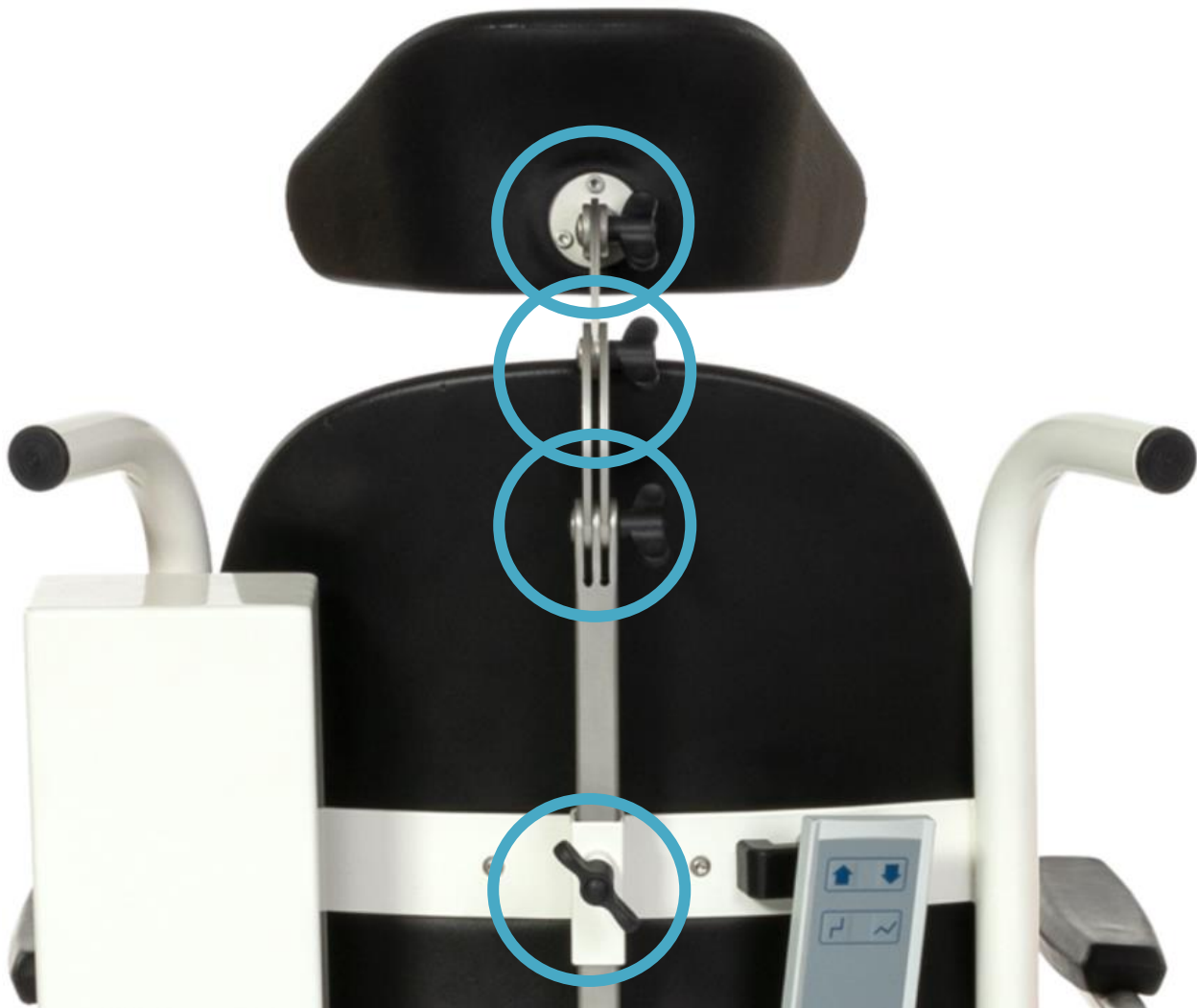

Armlener

Arm støttene er sammenleggbare for enkel inn- og utstigning

- Arm støttene er enkle å fold og kan foldes separat.
- TOBA er standard utstyrt med armstøtter inkludert frontlukking.
- Begynn med å vende armstøtten ut og deretter ved siden av hodet til klienten.
- Vennligst beskytt klienten når du vender armstøtten opp og ned.
- Vær oppmerksom på de oransje hengslene for å unngå knuter.
- Pass på at armene hviler på klientens lår når du folder armstøttene.



Sittingen

Sittingen er laget av PUR og er enkel å feste og ta av TOBA-stolen. Dette gjør det enkelt å rengjøre rammen og plassere sittingen tilbake igjen.




Sittingen har også standard integrert holder for en bedpanne.

- Bedpannen skal plasseres under sittingen fra baksiden av stolen.
- Bedpannen skal plasseres under sittingen før klienten plasseres i stolen.
- Bedpannen skal fjernes etter at klienten har forlatt stolen.
- Bedpannen og sittingen skal rengjøres etter hver bruk av TOBA-stolen.
- Forsikre deg om at TOBA alltid er i sitteposisjon når du bruker TOBA som en toalettstol.
- TOBA-stolen passer til flere toaletter. Imidlertid avhenger det av toaletttypen om det passer eller ikke.
- Maksimumshøyden på TOBA-stolen er ca. 55 cm.
- Sittingen på TOBA-stolen kan fjernes fra stolen for optimal rengjøring.
- Ved å trekke i midten av sittingen, vil den løsne.
- Når du setter tilbake sittingen, plasserer du den tilbake og trykker på begge sider av sittingen.
- Når du føler et klikk, er sittingen godt plassert på rammen.

Fotstøtten

Fotstøtten sørger for en behagelig sittestilling for brukeren.

- Fotstøtten kan justeres i høyden for forskjellige brukere.
- Fotstøttene er sammenleggbare for å komme seg inn og ut av TOBA-stolen.
- Med vingemutterne på baksiden av fotstøtten kan høyden på fotplaten justeres.
- Det er ikke tillatt å stå på fotplaten.
- Brukeren skal ha føttene i midten av fotplaten.

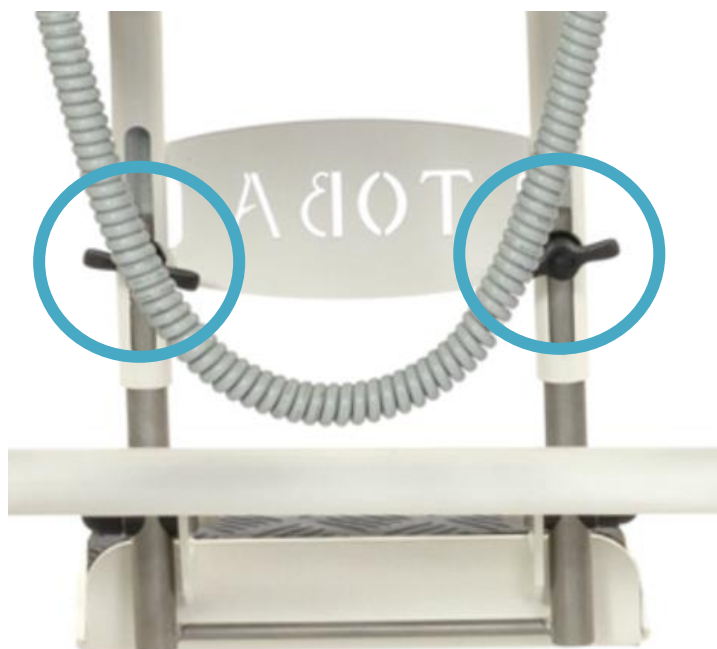

Hjulene

Alle fire hjulene kan låses med brems når kunden plasseres i TOBA dusjstol.



Fjernkontrollen

Som tidligere nevnt, har TOBA dusjstol muligheten til å bli justert både i høyde og tilt. På denne måten kan fagpersoner ta vare på klienten på en ergonomisk måte, noe som forbedrer omsorgen både for fagpersoner og klienter.



Batteri og fjernkontroll

Batteriet kan enkelt byttes ut med et nytt batteri. Den hvite hetten kan løftes av, og du kan erstatte batteriet med en ladet en.



- Batteriet kan lades i en LINAK-ladestasjon, som er standard inkludert med hver TOBA-levering.
- Batteriet har en nødknapp inkludert.
- I tilfelle nødsituasjon, trykk på knappen.
- I tilfelle strømbrudd, kan TOBAen bringes tilbake til original posisjon med en pennknapp som kan finnes på batteriet.
- Ved å vri knappen til høyre, kan du bruke batteriet igjen.
- Fjernkontrollen har fire knapper
 - o Opp-posisjon
 - o Ned-posisjon
 - o Tilt +
 - o Tilt -
- TOBA en vipper allerede litt når den beveger seg i oppoverposisjon.



Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring

Rengjørings skjema	
Etter hver bruk	Rengjør rammen med vann og bestemte desinfeksjonsmidler. Rengjør PUR-deler med spesiell oppmerksomhet.

Desinfeksjonsmidler

Ved bruk av desinfeksjonsmidler, må du sørge for å sjekke om produktet ditt er på listen nedenfor. Hvis ikke, kontakt din lokale distributør eller produsent for å forsikre deg om at desinfeksjonsmiddelet er egnet for TOBA-stolen. Ettersom stolen er laget av rustfritt stål, egner 99% av desinfeksjonsmidlene seg til rengjøring av TOBA-stolen.

Product name	Amount	Product name	Amount
Incidin Plus (Ecolab)	2%	Actichlor Plus (Ecolab)	1000 ppm
Kodan Tinktur Forte (Schulke)	Puur	Anios DDHS (Anios Laboratories)	Puur
Mikrobac Forte (Hartmann)	4%	B45 Orochemie)	Puur
Sodiumhypochlorite (Standaard)	1000 ppm	Bacillol 30 Foam (Hartmann)	Puur
Octenispect (spray) (Schulke)	Puur	Clinell Sporidical Wipes (Garna Healthcare)	Puur
P3-topax 66 (Ecolab)	5%	Chlor-Clean tablets (Guest Medical)	1000 ppm
Sagrotan (spray) (Reckitt Benckiser)	Puur	Dettol (Reckitt Benckiser)	5%
Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)	Puur	Dismozon Pur (Hartmann)	4%
Spring (Kalle Original)	Puur	Formaldehyde (Pharmacy)	30%
Sprint 200 (Diversey)	2%	Germatol (Kiarah Chem)	5%
Suma Bac D10 (Johnson Diversey)	1%	Hansamed (spray) (Beiersdorf AG)	Puur
Surfa'Safe (Anios Laboratories)	Puur	Haz-Tabs (Guest Medical)	1000 ppm
Topmax 421 (Ecolab)	5%	Hibicet (Molnlycke Health Care)	Puur
Virkon (Du Pont)	10 g/l	Incidin Extra N (Ecolab)	2%
Volvone (Oyar)	40%		

2.2. Vedlikeholdsråd

Vedlikeholdsskjema	
Etter bruk	Visuell kontroll om alle komponenter er tilgjengelige Visuell kontroll av skader.
Ukentlig	Visuell kontroll av skader Visuell kontroll av batteristatus Rengjøring med fokus på hjulene for hår, støv og såperester.
Månedlig	tens kontroll av skader.
Årlig	Kontroll av periodisk inspeksjon • Kontroll av lesbare etiketter • Kontroll på stolens skader • Kontroll på alle bolter og muttere • Utskifting av PUR-sete • Kontroll av ryggstøtte og armlener • Kontroll av hjul og bremseser • Kontroll om alle 4 hjul er i kontakt med gulvet • Kontroll på armlener • Kontroll at armlener er i samme posisjon • Kontroll på fotstøtter for skader og fungering • Periodisk testing av LINAK-utstyr • Periodisk testrapport i henhold til NEN: EN62353-2014

Attachment A: Data Sheets electrical components