



R82 Wombat Living 2

Funktionel arbejdsstol til skole,
institution og hjemme

 **etac**[®]

INDHOLD

- 3 Når design møder funktion
- 3 Nye features med Wombat Living 2
- 4 Det handler ikke bare om at sidde...
- 5 Læn dig frem, og vær aktiv
- 5 Nå nye højder
- 6 Egenskaber og funktioner
- 8 Tilbehør
- 12 Bestil din Wombat Living
- 14 Sådan måles brugeren
- 15 Mål

WOMBAT LIVING 2 ER AKTIVITETSSTOLEN, DER KAN BRUGES HELE DAGEN,
HVER DAG - HELE LIVET... **R82** 

Når design møder funktion!

Gennem løbende udvikling og tilbagemeldinger fra kunder og terapeuter har den nye Wombat Living 2 alle de egenskaber og funktioner, en funktionel aktivitetsstol kræver.

Wombat Living 2 er en cool aktivitetsstol til både børn og teenagere. Stolens størrelse kan ændres i takt med brugers vækst og er dermed en stol for livet.

Det højdejusterbare stel fås nu også med ekstra ryghøjde, og den fremadrettede vippefunktion gør det lettere at komme op at stå og sikrer, at alle unødvendige og gentagne løft undgås.

Wombat Living 2 oser af dansk design, og det minimalistiske udseende med det diskrete stel gør, at den passer ind overalt. Den fås i tre størrelser og kan konfigureres, så den passer til enhver form og størrelse bruger.

Nye features med Wombat Living 2:



1: NY længere ryg

Wombat Living 2 fås nu også med længere ryg, som er perfekt til de højere brugere, der har brug for mere støtte.

2: NYE armlæn

De nye armlæn er nemmere at indstille i korrekt højde. Positionen fastholdes, således der ikke er brug for justeringer senere.

3: NY bækkenstøtte

Den nye bækkenstøtte fås både med og uden sider. Den støtter en god positionering af bækken og hofter.

4: NYE hoftestøtter

De nye hoftestøtter har et nyt indstillings-system, der sikrer positioneringen af barnet. Hoftestøtterne kan med fordel monteres længere fremme for dermed at fungere som lårstyrer. Benyt denne som lårstyrer sammen med den nye bækkenstøtte, for at omslutte barnet og skaber en fantastisk støtte omkring bækken og lår.

Det handler ikke bare om at sidde...

Hvis du sætter lige så meget pris på god siddekomfort, som vi gør, er Wombat Living 2 stolen for dig!

Hynderne fås i forskellige størrelser og former, så alle behov med hensyn til kropsholdning kan tilgodeses. Hynderne giver god siddekomfort og fås også som konturerede hynder, der kombinerer komfort med fremragende støtte for både sæde og ryg. Hvis ekstra støtte ønskes, kan der suppleres med vores tilbehør. Hynderne er fremstillet af flammehæmmende skum, som opfylder alle standardkrav.

Når man sidder, skal man sidde godt. Derfor er Wombat Living 2 dit bedste valg.



En god siddestilling skal:

- fremme en korrekt holdning
- forebygge trykpunkter
- være behagelig
- give støtte



Læn dig frem, og vær aktiv

Wombat Living 2 kan vippes op til -15° frem (-10° for str. 3), hvilket er en kæmpe fordel ved forflytning af brugere med innervation i underekstremiteterne, og hvis fødder støtter på gulvet eller hjælpes ved selvstændig forflytning.

For flere brugere er den aktive position med til at bevare en hensigtsmæssig holdning, så det bliver muligt at være endnu mere med. Desuden har undersøgelser vist, at en fremadhældende stol retter rygsøjlen mere ud og mindsker belastningen af ryggens muskler.



Nå nye højder

Når du køber din Wombat Living 2, skal du vælge mellem to forskellige måder at justere sædehøjden på: fodbetjent gasfjeder, der kan aktiveres af assistenten, eller den elektriske håndbetjening som kan aktiveres af både assistenten og brugeren. Wombat Living 2 kan justeres fra en sædehøjde på 36 cm til 70 cm over gulvhøjde. Det højdejusterbare stel letter forflytning til stolen fra stående stilling og er med til at sikre, at unødvendige og gentagne løft undgås.

Som standard leveres Wombat Living 2 med 100 mm hjul med centralbremse, hvor sædehøjden er 38,5-67,5 cm for str 1+2 og 42,0-70,0 cm for str. 3.



Egenskaber og funktioner

Wombat Living 2 er en aktivitetsstol med mange konfigurationsmuligheder. Den er perfekt at benytte i forbindelse med daglige aktiviteter som læring og læsning i skolen, leg med vennerne og hjælp med de daglige opgaver derhjemme.

de specifikke behov. For nogle brugere er en stol med færre tilbehørsdele og enkle standardfunktioner passende. Andre kan have behov for en stol med mere tilbehør og flere tekniske funktioner, som for eksempel en elektrisk enhed til højdejustering.

Afhængig af brugerens funktionsniveau kan stolen designes med standardfunktioner, der opfylder

Der er ikke noget, der slår en skræddersyet stol!

01. Behagelige hynder med holdbare kanter
02. Mulighed for unikke stoffarver (grå er standard)
03. Kort eller lang ryg vælges ud fra brugerens behov
04. Justering af sædedybde
05. Hurtig og let tilt-in-space
06. Mulighed for fix locks, der passer til det unikke vest- og seleprogram
07. Forberedt til montering af tilbehør
08. Vinkeljusterbar skubbebøjle
09. Højdejusterbart stel for nem forflytning
10. Fodstøtte med justerbar højde, dybde og vinkel
11. Letkørende og låsbare hjul
12. Bækkenstøtte med sider
13. Hoftestøtter
14. Sidestøtter
15. Armlæn
16. Hovedstøtte



Tilbehør



Hynder og betræk

Alle hynder leveres med betræk. Ekstra betræk kan bestilles. Bestillingsnøgle for farvevalg: Grå: XXX = 228. Rød: XXX = 224
Petroleum: XXX = 225
OBS. Petroleum og rød hynde er ikke lagervarer og længere leveringstid må derfor påregnes.

Ryghynde str. 1	31955031-XXX
Ryghynde str. 2	31955032-XXX
Ryghynde str. 3	31955033-XXX
Sædehynde str. 1	31955021-XXX
Sædehynde str. 2	31955022-XXX
Sædehynde str. 3	31955023-XXX
Betræk ryghynde str. 1	31955611-XXX
Betræk ryghynde str. 2	31955612-XXX
Betræk ryghynde str. 3	31955613-XXX
Betræk sædehynde str.1.....	31955621-XXX
Betræk sædehynde str.2.....	31955622-XXX
Betræk sædehynde str.3.....	31955623-XXX



Sædehynder, inkontinens

Hynde med vaskbart betræk til inkontinente brugere. Alle hynder leveres med betræk. Ekstra betræk kan bestilles.

Sædehynde, inkontinens:	
Str. 1	31955021-223
Str. 2	31955022-223
Str. 3	31955023-223
Contour sædehynde, inkontinens:	
Str. 1	31955021-237
Str. 2	31955022-237
Str. 3	31955023-237
Inkontinensbetræk til sædehynde	
Str. 1	31955621-282
Str. 2	31955622-282
Str. 3	31955623-282



Contour hynder og betræk

Contour hynderne fås kun i farven grå. Alle hynder leveres med betræk. Ekstra betræk kan bestilles. For ekstra betræk til sædehynden, vælg ovenfor.

Contour ryghynde str. 1	31955031-238
Contour ryghynde str. 2	31955032-238
Contour ryghynde str. 3	31955033-238
Contour sædehynde str. 1.....	31955021-238
Contour sædehynde str. 2.....	31955022-238
Contour sædehynde str. 3.....	31955023-238
Betræk Contour ryghynde str.1.....	31955611-238
Betræk Contour ryghynde str.2	31955612-238
Betræk Contour ryghynde str.3	31955613-238



Høj ryg (ombygningkit)

Giver mulighed for en højere ryg, samt forudsætning for at montere Bækkenstøtter. Høj ryg kræver ikke anden type hynder.

Til Wombat str. 1.....	3195560-1
Til Wombat str. 2.....	3195561-1



DET ER SJOVT AT GÅ I BØRNEHAVE!

Tilbehør



Løftehåndtag, sæt

For at opnå optimal arbejdsposition. Fås i enten opklappelig eller fast udgave.

Opklappelige løftehåndtag..... 3195145



Sidestøtter, faste (sæt)

For ekstra støtte og sikkerhed. Kun til Wombat Living 2 str. 1+2) Mål angivet (Højde x Dybde).


One size (15 x 11 cm)..... 3195121



Skubbebøjle


For at opnå optimal arbejdsposition. Fås til Wombat Solo str. 3.

Skubbebøjle til str. 3 3195147

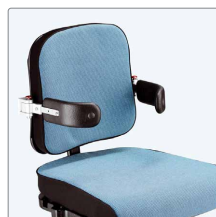

Sidestøtter, svingbare

Sikrer præcis positionering af truncus. For yderligere information henvises til afsnittet om siddestøtter under Barn/Junior på vores hjemmeside.

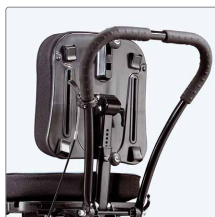

Skubbebøjle, vinkeljusterbar

Brug også skubbebøjlen, som hjælp ved justering af højde og vinkel. Monteret som standard.

Str. 1 + 2.....3195148-1
Str. 3 3195148-3



Rygforlænger

For ekstra støtte af den nedre del af ryggen. Til Wombat str. 3.

Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 3 (6 x 27 cm)3195140-60



Hovedstøtte

Find den rigtige hovedstøtte i vores store udvalg, for at korrigere hovedets stilling. For yderligere information henvises til afsnittet om hovedstøtter under Barn/Junior på vores hjemmeside.



Bækkenstøtte, flad

For stabilisering af bækkenet. Kan kun monteres på Wombat med høj ryg.

Beskrivelse Varenr.
Str. 1+23195140-61
Str. 33195140-63



Ryggile

For ekstra rygstøtte.
Tykkelse i midten: 1 cm.
Tykkelse i enderne: 2 cm.
Mål angivet (Længde x Bredde).

Str. 1 (24 x 9 cm)31955030-1
Str. 2 (28 x 11 cm)31955030-2
Str. 3 (35 x 11 cm).....31955030-3



Bækkenstøtte med sider

Kan kun monteres på Wombat med høj ryg.

Str. 13195140-64
Str. 23195140-65
Str. 33195140-66

Tilbehør



Hoftestøtter, sæt

Betræk til hoftestøtter fås separat.
Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 1+2 (8 x 19 cm).....	3195110-1
Str. 3 (10 x 25 cm)	3195111-1
Plade for mindre SB	3195110-SM
Betræk str. 1+2.....	3195110-60
Betræk str. 3.....	3195111-60



Veste & seler

Veste og seler sikrer god støtte og korrekt positionering. For yderligere information, henvises til afsnittet om veste og seler under Barn/Junior på vores hjemmeside.



Armlæn

Giver støtte til armene.
Mål angivet (Højde x Bredde x Længde).

Str. 1 + 2 (6-18 x 8 x 26 cm).....	3195112-1
Str. 1 + 2 (12-21 x 8 x 29 cm).....	3195113-1
Str. 3 (6-18 x 8 x 26 cm)	3195114
Str. 3 (6-18 x 8 x 37 cm)	3195115



Bord, tonet plast, uden kant

Giver støtte til armene. Monteres med 2 stænger. Mål angivet (Bredde x Dybde).


Str. 1+2 (60 x 34 cm)	3195125
Str. 3 (60 x 46 cm).....	3195126



Armlæn, Swing away

Sving armlænen væk for at lette forflytning til/fra stolen og gør det muligt at anvende stolen tæt på et bord, uden at armlænen er i vejen. Et kit gør det muligt at montere swing-away led på eksisterende armlæn.w


Kort	3195112-1S
Langt.....	3195113-1S
Ombygningskit.....	3195112-SW

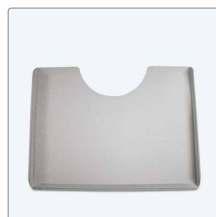

Bord med kant, grå plast model 1

Monteres med 1 stang. Ydermål: 49 x 39 cm (BxD). Udskæring: 24 cm (B).

Bord, model 1	3189220-01
---------------------	------------

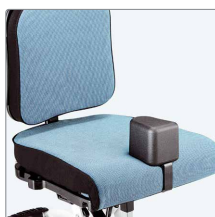

Abduktionsklods

Forhindrer brugeren i at glide ned af stolen, samt holder benene adskilt.
Mål angivet (Højde x Bredde x Dybde).

Str. 1 (9 x 9 x 9 cm).....	3195130-1
Str. 2 (9 x 9 x 12 cm).....	3195130-2
Str. 3 (9 x 9 x 15 cm)	3195130-3
Str. 4 (9 x 9 x 18 cm)	3195130-4



Bord med kant, grå plast model 2

Monteres med 1 stang. Ydermål: 59 x 54,5 cm (BxD). Udskæring: 44 x 22,5 cm (BxD)

Bord, model 1	3189220-2
---------------------	-----------



Abduktionsklods, knæ

Kan suppleres med betræk med polstring.

One size	3195230-10
Betræk.....	3195430-10260



Bord med kant, grå plast model 3

Monteres med 1 stang. Ydermål: 61 x 45 cm (BxD). Udskæring: 45 x 12 cm (BxD)

Bord, model 3	3189220-3
---------------------	-----------

Tilbehør



Fodplade med Standard indfæstningsrør
 Det korte monteringsrør gør, at fodpladen kan komme længere op under stolen.
 Monteret som standard på Wombat Living 2 str. 3.

Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) 3195145-2
 Str. 3: 41 x 24 cm (BxD) 3195145-3
 Str. 4: 48 x 24 cm (BxD) 3195145-4



Tipsikring

Tipsikring, one size 3195953



Fodplade med kort indfæstningsrør
 Det korte monteringsrør gør, at fodpladen kan komme længere op under stolen. Ekskl. stang til fodplade. Monteret som standard på Wombat Living 2 str. 1+2.

Str. 1: 31 x 19 cm (BxD) 3195145-1
 Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) 3185145-2



Beslag til håndbetjening

Monteres foran på sædet. Håndbetjeningen klikkes let på plads vha. en magnet.

Beslag til håndbetjening 3195540



Stang til fodplade
 Det korte monteringsrør gør, at fodpladen kan komme længere op under stolen. Ekskl. stang til fodplade. Monteret som standard på Wombat Living 2.

Str. 1 + 2: 20 cm (L) 3182927
 Str. 3: 28 cm (L) 3182787



Centralbremse-kit

Monteret som standard.

Centralbremse-kit str. 1 + 2 3195950
 Centralbremse-kit str. 3 3195951



Fodkassekit til hel fodplade
 Hjørnerne boltes fast på den eksisterende fodplade, og polstret monteres i kassen. Hjørnerne kan bruges på forskellige fodplader og måler 15 cm i både dybde og højde. Polstret er unikt for hver størrelse fodplade, så det passer til den enkelte fodplades bredde. Muligheden for at lave en fodkasse kan bruges til både eksisterende og nye fodplader.


Fodkassekit, sæt af hjørner og polstring:
 - Til Wombat fodplade str. 1 3195145-1BOX
 - Til Wombat fodplade str. 2 3195145-2BOX
 - Til Wombat fodplade str. 3 3195145-3BOX
 Fodpladepolster:
 - Til Wombat fodplade str. 1 3195145-1PAD
 - Til Wombat fodplade str. 2 3195145-2PAD
 - Til Wombat fodplade str. 3 3195145-3PAD
 Polster til stang, one size (12 cm) ... 3195145-150
 Ankelsele til fodkasse, one size 3195145-20



EI-kit

Komplet kit.

EI-kit til str. 1+2 3195550
 EI-kit til str. 3 3195551

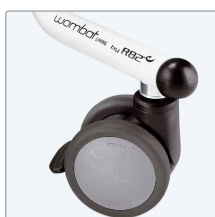

Hjul med retningsstabilisator
 Kun 100 mm hjul.

100 mm hjul, retningsstabilisator 3189592-KIT



Fix-lock på plade til sæde

Indeholder 2 beslag med hver to fix-lock.

Fix-lock på plade til sæde 3195710

Bestil din Wombat Living 2

Wombat Living 2 kan sammensættes i et utal af variationer, men for at kunne tilbyde kort leveringstid, har vi sammensat de mest populære konfigurationer, som du kan se beskrevet på næste side. Varianter markeret med * er ikke lagervarer, og længere leveringstid må påregnes.

Vælg først det ønskede stel og derefter de ryg- og sædehynder, der matcher brugerens behov.

Vælg eksempelvis mellem høj eller lav ryg



Wombat Living 2 som standard

Stel	Pulverlakeret stål, højdejustering via gasfjeder eller el. Stelfarve antracit grå
Ryg	Højdeindstillelig og vinkeljusterbar. Vælg mellem 2 højder
Sæde	ABS plast, vinkeljusterbar
Hynder	Hynder bestilles separat
Skubbebøjle	Vinkeljusterbar, monteret på stellet
Fodplade	Aftagelig, højde- og vinkeljusterbar, opklappelig
Hjul	100 mm hjul, letkørende
Bremser	Centralbremse



Wombat Living 2 (Konfigureret med centralbremse og udløser for sædetilt monteret på kørebøjlen)

Stel	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Højdejustering via fodbetjent gasfjeder. Standard ryghøjde.	Varenr. 31951232-00 HMI-nr. 107031	Varenr. 31952232-00 HMI-nr. 107032	Varenr. 31953232-00* HMI-nr. 107036*
Højdejustering via fodbetjent gasfjeder. Høj ryghøjde.	Varenr. 31955232-00* HMI-nr. 107033*	Varenr. 31956232-00* HMI-nr. 107034*	Varenr. 31957232-00* HMI-nr. 107037*
Højdejustering via el/håndbetjening. Standard ryghøjde.	Varenr. 31951236-00* HMI-nr. 107038*	Varenr. 31952236-00 HMI-nr. 107039	Varenr. 31953236-00 HMI-nr. 107040
Højdejustering via el/håndbetjening. Høj ryghøjde.	Varenr. 31955236-00* HMI-nr. 107041*	Varenr. 31956236-00* HMI-nr. 107042*	Varenr. 31957236-00* HMI-nr. 107043*
Hynder	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Ryghynde, grå	Varenr. 31955031-228	Varenr. 31955032-228	Varenr. 31955033-228
Sædehynde, grå	Varenr. 31955021-228	Varenr. 31955022-228	Varenr. 31955023-228
Ryghynde Contour, grå	Varenr. 31955031-238	Varenr. 31955032-238	Varenr. 31955033-238
Sædehynde Contour, grå	Varenr. 31955021-238	Varenr. 31955022-238	Varenr. 31955023-238

* Denne variant er ikke lagervare, og der må derfor påregnes længere leveringstid.




Eksempel: Wombat Living 2 med højdejustering via fodbetjent gasfjeder, og Contour ryg- og sædehynde.




Eksempel: Wombat Living 2 med højdejustering via el/håndbetjening, og standard ryg- og sædehynde.

Sådan måles brugeren


Dette er en simpel guide til at sikre, at stolen er korrekt konfigureret til brugeren. For at opnå de korrekte mål er det vigtigt, at brugeren ligger på et fast, fladt underlag med hofter, knæ og ankler bøjet 90 grader.

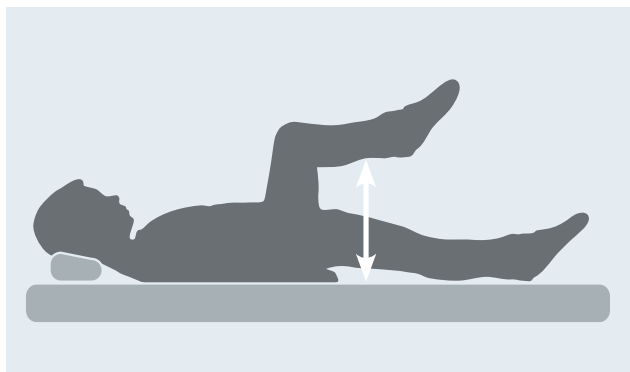


Sædedybde

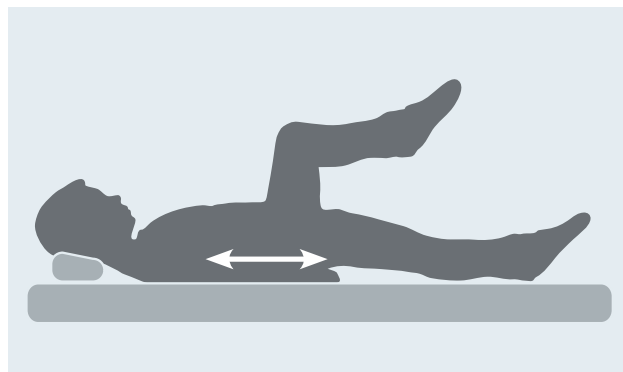


Armhulehøjde

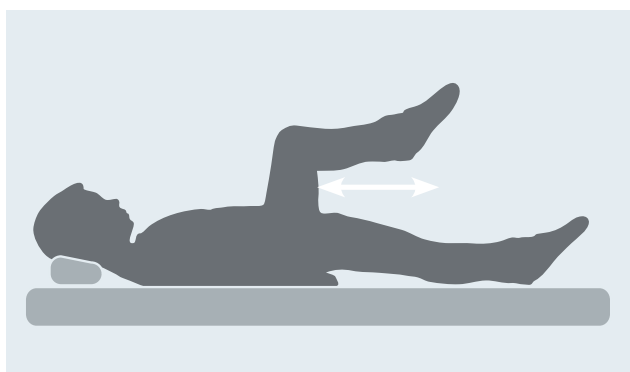

Læglængde

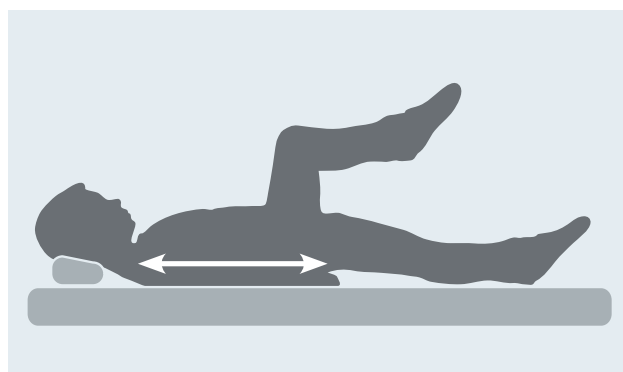


Ryghøjde

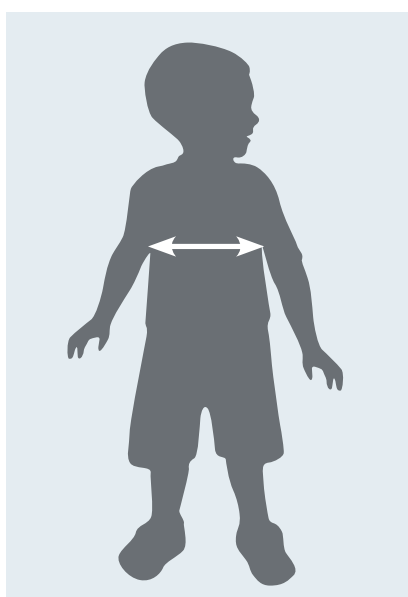

Brystbredde




Wombat Living 2 er designet til at kunne tilpasses brugerens vækst og skiftende behov. Billedet viser, hvordan sædet kan ændres - og illustrerer, hvor vigtigt det er at måle omhyggeligt.

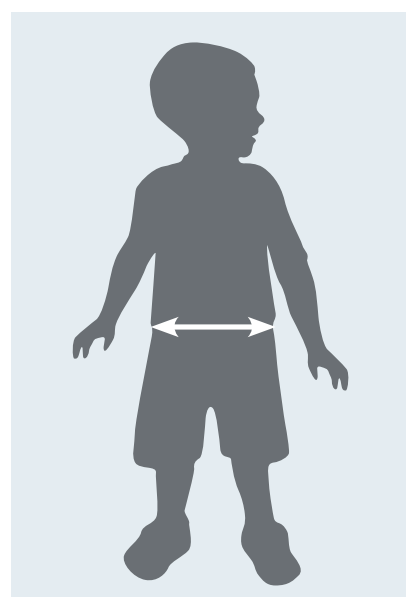

Hoftebredde

Mål

Wombat Living 2 har mange indstillingsmuligheder, f.eks. justerbar sædedybde og hoftestøtter til justering af sædebredde. Når du har målt brugeren, kan du let finde den rigtige størrelse stol i nedenstående tabel.

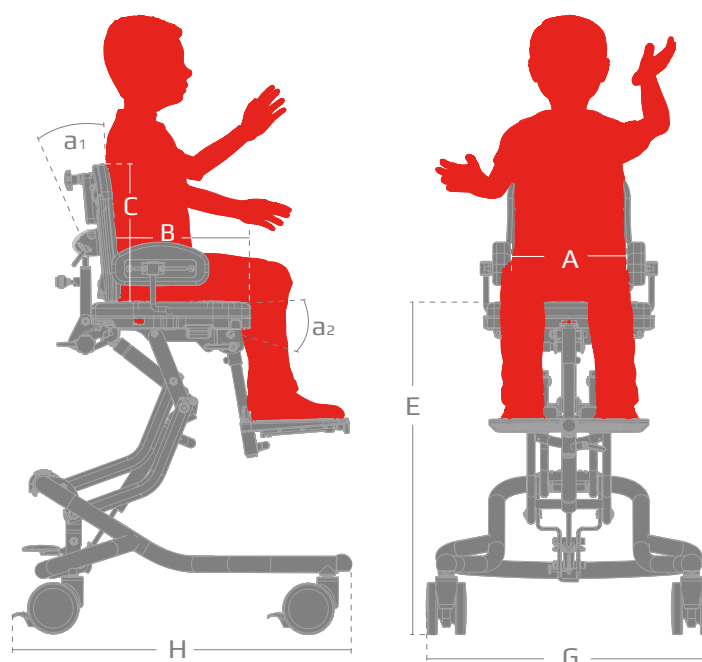

Mål

	Wombat Living 2 str. 1	Wombat Living 2 str. 2	Wombat Living 2 str. 3
Sædebredde (A)	30 cm	37 cm	42 cm
Sædebredde mellem hoftestøtter (tilbehør)	10,5-30 cm	17-37 cm	21,5-42 cm
Sædedybde (B)	18-31 cm	25-38 cm	32-50 cm
Ryghøjde (C)	28-34 cm	31-38 cm	39-50 cm
Ryghøjde, høj ryg (C)	36-43 cm	39,5-46 cm	46-57,5
Underbenslængde	15-25 cm	15-35 cm	15-44 cm
Sædehøjde over gulv, 100 mm hjul (E)	39-68 cm	39-68 cm	42-70 cm
Rygbredde, flad ryghynde	25 cm	30 cm	35 cm
Rygbredde med komfort ryghynde, målt mellem sidestøtter	17 cm	23 cm	27 cm
Armlænsenhøjde over sædehynde	6,5-17,5 cm	6,5-17,5 cm	6,5-17,5 cm
Armlænsenhøjde over sædehynde, høj ryg	6,5-26,5 cm	6,5-26,5 cm	6,5-26,5 cm
Rygvinkel (a1)	90° til 118°	90° til 118°	90° til 133°
Sædevinkel (a2)	-15° til 20°	-15° til 20°	-10° til 22°
Vinkel, fodstøttestang	-30° til 30°	-30° til 30°	-30° til 30°
Stelbredde (G)	55 cm	55 cm	61 cm
Stellængde (H)	60 cm	60 cm	72 cm
Max. brugevægt / belastning	45 kg	45 kg	70 kg
Vægt	15,5 kg	15,5 kg	22 kg



Version 1 - 2020 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Creating Possibilities