




R82<sup>®</sup>

# x:panda shape

Rengøringsguide

# Rengøringsguide

For at sikre at x:panda shape-siddesystemet forbliver sikkert for brugeren og deres pårørende, er det vigtigt at holde det rent og velfungerende. Vores mål med denne guide er at hjælpe forældre og plejere med at klare den daglige rengøring og vedligeholdelse af x:panda shape siddesystemet.\*

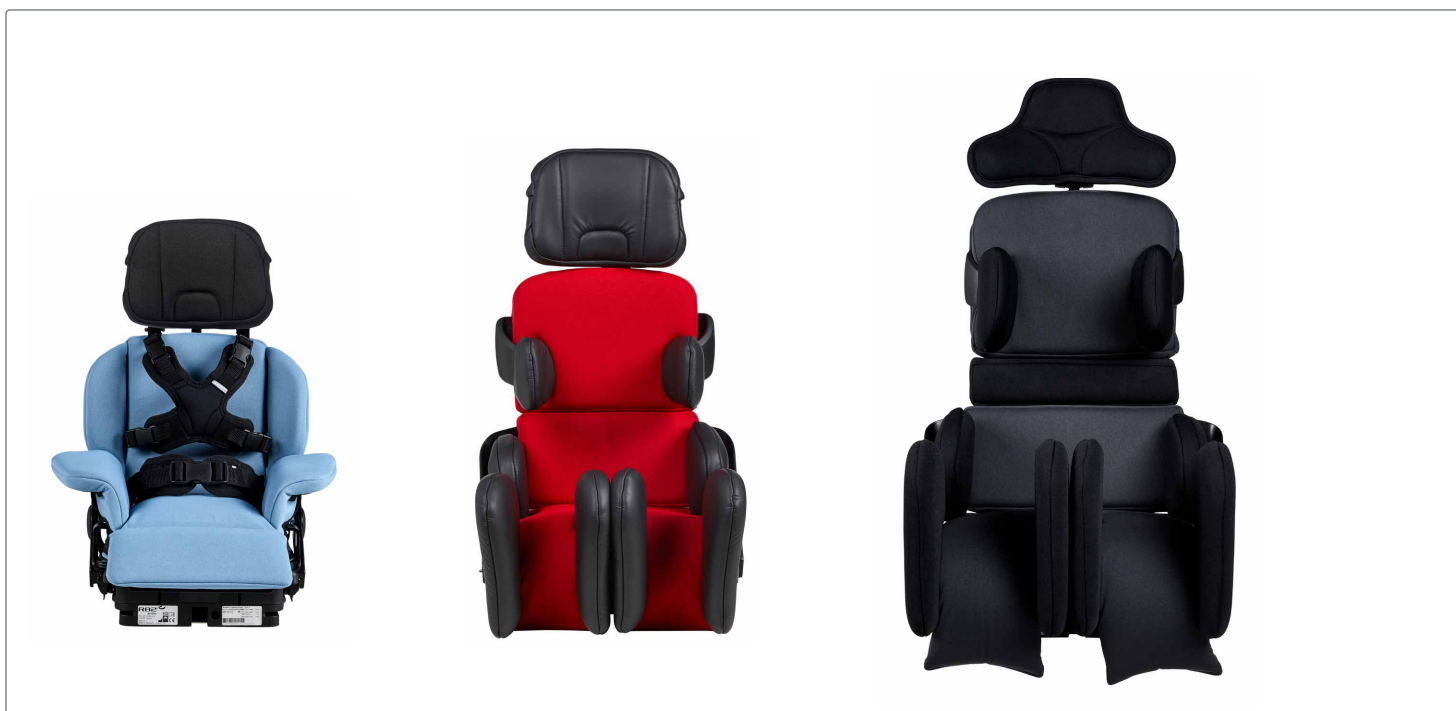

## Materialer til rengøringen

I denne guide vil vi anbefale at bruge følgende materialer:

- Klud
- Varmt vand
- Mildt rengøringsmiddel/sæbe uden klor
- 70 % Isopropylalkohol (desinfektionsmiddel)
- Vaskemaskine
- Vasketøjspose
- 5 mm unbrakonøgle



### Rengøringsstip!

Pudebetræk, tilbehørsbetræk, vest og bælte kan vaskes ved 60 °C med et mildt vaskemiddel i en vaskemaskine.

Brug en vasketøjspose til vest og bælte til beskyttelse af plastikspænder.

Under rengøringen kan det være nødvendigt at afmontere noget af tilbehøret for at kunne rengøre delene og nedenunder dem. Overvej at tage billeder af produktets indstillinger før justering og afmontering. Du kan også lave noter til de visuelle markeringer i vores ark med vigtige markeringer:



Klik eller scan for at downloade arket med vigtige markeringer fra vores hjemmeside.



\*Denne vejledning erstatter ikke brugermanualen

## Pudebetræk, tilbehørsbetræk, veste og seler

Hvis pudebetræk, betræk til tilbehør, vest og/eller sele skal rengøres, så tag billeder eller noter indstillingen af fix locks, der bruges til montering af vest og sele.

Før vask:

- Fjern vest og sele.
- Fjern puderne (sæde, nedre ryg, øvre ryg) og fjern rygpladen fra nedre- og øvre rygpude. Tag betrækket af skumpladen.
- Fjern betrækket på tilbehøret (f.eks. indvendige/udvendige knæstøtter, abduktionsklods, hofte-/bækkenstøtter, sidestøtter og hovedstøtte).

Ved rengøring under sædepuden kan det være nødvendigt at løsne eller fjerne noget af tilbehøret. Ikke alle sæder har samme tilbehør, og der kan være dele, der kan springes over. Det anbefales ikke at vaske skumdele.



Betræk og skum til øvre rygpude og sædehynde.



Fix locks ved nedre og øvre ryg til montering af vest.



Fix locks ved sædets base til montering af sele.

## Kiler

Hvis der er monteret kiler på sædet, skal du gøre følgende:

- Noter i hvilken position de er monteret. Højre og venstre side kan være forskellig.
- Overvej om det er nok at løsne dem, eller om de skal afmonteres.
- Hvis afmonteret, er der så et monterings sæt til kiler nedenunder?
- Rengør kilerne.



Placering af kilen og monterings sæt til kiler.



Løsn (1) eller afmonter (2) kilen.



### Rengøringsstip!

Kilerne og de indvendige og udvendige knæstøtter kan rengøres med en klud, varmt vand og et mildt rengøringsmiddel/sæbe uden klor. Lad alle dele tørre før brug.

Kilerne kan også desinficeres med 70 % isopropylalkohol desinfektionsmiddel. Det anbefales at rengøre med varmt vand og sæbe og lade dem tørre inden desinfektion.

## Indvendige og udvendige knæstøtter

Hvis indvendige og udvendige knæstøtter er monteret på sædet, så gør følgende:

- Overvej om det er nødvendigt at afmontere for at rengøre.
- Hvis det er nødvendigt at afmontere, notér i hvilken position de er monteret.
- Afmonter og rengør de indvendige og udvendige knæstøtter.




Placering af de indvendige og udvendige knæstøtter.

## Plader til advanced seating

Det kan være nødvendigt at rengøre under sædepladerne - gør da følgende:

- Notér i hvilken position de er monteret. Er der forskel mellem venstre og højre.
- Overvej om det er nok at løsne dem, eller om det er nødvendigt at afmontere dem.
- Rengør sædepladerne.

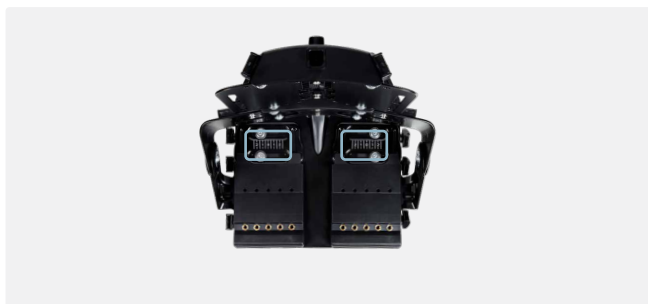

Sædepladernes vinkel- og breddeposition.



### Rengøringstip!

Sædepladerne og andre dele af sædet kan rengøres ved hjælp af en klud, varmt vand og et mildt rengøringsmiddel/sæbe uden klor. Lad alle dele tørre før brug.

Sædepladerne og andre dele af sædet kan også desinficeres med 70 % isopropylalkohol desinfektionsmiddel. Det anbefales at rengøre med varmt vand og sæbe og lade dem tørre inden desinfektion.



Sædepladernes dybdeposition.

## Montering

Når alle dele er rengjorte, skal de monteres korrekt igen. Monter og juster i følgende rækkefølge:

- Sædeplader
- Indvendige og udvendige knæstøtter
- Kiler
- Betræk til tilbehør
- Puder
- Vest og sele



Se vores how-to-videoer for at lære mere om justeringer på X:panda shape siddesystemet.

Find de seneste nyheder og løbende opdaterede produktinformationer på [etac.dk](http://etac.dk)

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac®