



etac[®]

Produktguide

Mobile bade- og toiletstole

Designet til at gøre livet lettere

Mobile bade- og toiletstole skal være lette at manøvrere og skal forenkle forflytning såvel som transport af brugeren til og fra badeværelset. Da de primært er til personer, der har brug for hjælp, er ergonomisk funktionalitet for plejeren særlig vigtig. Dette er med til at give gode arbejdsforhold for plejeren og komfort og sikkerhed for brugeren - det er grundlaget for værdig pleje.

Forenkler plejeopgaver

Mobile bade- og toiletstole forenkler hygiejneopgaverne meget, da brugerne kan forblive i stolen, når de tager brusebad, bruger toilettet eller håndvasken, men også når de skal til og fra badeværelset. Dette reducerer behovet for yderligere forflytninger.

Det stiller særligt høje krav til ergonomisk og brugervenlig funktionalitet, der er med til at gøre personlige hygienrutiner hurtigere og lettere at udføre, både for brugeren og for plejeren.

Drevet af indsigt

Etac har udviklet mobile bade- og toiletstole i mere end 30 år og har gennem tæt samarbejde med sundhedsfagligt personale opnået solid forståelse af de udfordringer, de står overfor. Den indsigt er en af hjørnestenene i vores designproces, og vi sørger for at holde os opdateret om morgendagens plejebestand gennem løbende forskning. Vi kalder det indsigtsdrevet udvikling.



Etac, et anerkendt kvalitetsstempel

Etacs hjælpemidler til bad og toilet bruges over hele verden. De er af anerkendt kvalitet og har en lang historie bag sig, der gør, at man kan stole på, at de opfylder den højeste standard.

Flere af vores produkter er prisvindende for deres design og funktionalitet. Men frem for alt er de udviklet med brugere og plejepersonale i tankerne - og den faste overbevisning, at hjælpemidler aldrig skal gå på kompromis med godt design.

Læs en case story fra vores produktudvikling ved at følge linket.



Assisteret personlig pleje

Ergonomi i forbindelse med assisteret personlig pleje er kompleks. Personlig hygiejne er ikke kun en meget privat sag for brugeren, men plejere skal også have et funktionelt arbejdsmiljø. Når du vælger en bade- og toiletstol, skal der tages hensyn til begge parter behov, såvel som deres fysiske omgivelser - tre faktorer, der kan være modstridende.



Velvære og værdig pleje for brugerne

Værdighed, sikkerhed og komfort for brugerne er vores første og vigtigste prioritet. Vi skal sørge for blødhed og støtte de rigtige steder samt mulighed for individuelle justeringer. Men brugernes oplevelse påvirker ikke kun dem selv, men også plejeren.


De fleste plejere siger, at brugerkomfort er afgørende for at gøre det muligt for dem at arbejde uden risiko for skader. Brugere bekræfter til gengæld, at de finder det uværdigt, hvis plejeren skal kæmpe for at hjælpe dem. I bund og grund går værdig pleje af brugeren hånd i hånd med et sundt arbejdsmiljø for plejepersonalet.

Gode arbejdsvilkår for plejere

At hjælpe med personlig pleje kan være udfordrende, især hvis brugeren ikke selv er i stand til at hjælpe. Processen omfatter ofte tunge løft og akavede arbejdsstillinger, der kan forårsage arbejdsrelaterede skader over tid. Ud over at forenkle transporten skal bade- og toiletstole lette plejers arbejde gennem hele hygiejnerutinen.


Fra vores forskning ved vi, at det primære behov for plejere er at have god adgang omkring sædet for let at nå og rengøre bruger. God tilgængelighed rundt om sædeområdet gør rutinerne for personlig pleje lettere.

En af vores højeste prioriteter er, at bade- og toiletstolene også er udviklet med ergonomiske og intuitive funktioner.

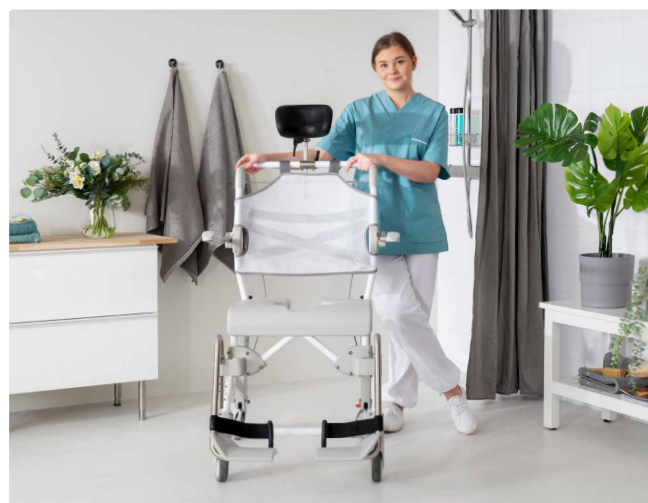

Badeværelset som arbejdsplads

Badeværelser kan være svære at arbejde i. Pladsen er normalt trang og især badeværelser i private boliger er ikke bygget til at rumme sundhedspersonale. Til tider betyder det desværre, at valg af produkt bestemmes af miljømæssige faktorer, snarere end menneskelige faktorer. Det viser os, at beslutninger nogle gange træffes gennem kompromisser, selvom dette ikke er ideelt.

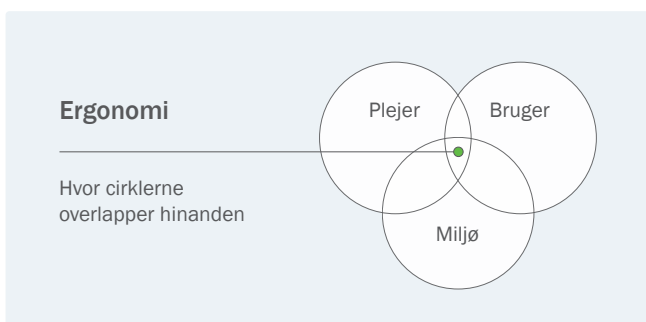

Kategorier af bade- og toiletstole

Etacs mobile bade- og toiletstole er opdelt i tre primære kategorier, hvor de fleste er ledsagerdrevne. Der er adskillige versioner med forskellige fordele og grader af anvendelighed til forskellige brugere og plejesituationer. Denne vejledning giver et overblik over sortimentet og tilbyder hjælp til at finde den bedst egnede model for hver enkelt bruger.



Modeller med drivhjul

En model til mere uafhængige brugere, der ønsker at maksimere deres mobilitet, og som kan køre selv. Stolene er nemme at manøvrere takket være 24" hjul placeret for maksimal kontrol og balance. God tilgængelighed rundt om sædet og svingbare armlæn letteregør sideværts forflytninger. Derudover har de samme fordele som standardmodellen.



Standardmodeller

En ledsagerdrevet stol, der giver de bedste muligheder for personlig pleje og komfort. Den letter toiletbesøg, brusebade og transport til og fra badeværelset og udgør basismodellen for alle andre kategorier. Velegnet til en person, der har postural kontrol og kan sidde oprejst under hygiejnerutiner, og kan klare nogle af plejeopgaverne selvstændigt. Sædet har en åbning bagtil, der gør intimhygiejnen nemmere.



Modeller med tilt-funktion

En stol der giver ekstra støtte til brugere, der har svært ved at sidde i længere tid på grund af begrænset postural kontrol. Tilt-funktionen gør det lettere og mere bekvemt at placere brugeren tilbage i sædet. Denne model kan tiltes fra begge sider, mens øjenkontakten mellem bruger og plejer bevares, hvilket gør oplevelsen mere sikker og tryk for begge parter.



Forflytninger ind og ud af stolen

Brugere af bade- og toiletstole har normalt brug for ekstra hjælpemidler, især til forflytninger. Brugers mobilitet og brug af bestemt forflytningshjælpemiddel har indflydelse på, hvilken stol man skal vælge. Nogle gange er det den eksisterende forflytningsløsning, der afgør, hvilken stol man skal vælge, men det kan også være omvendt. Uanset hvad går de to hånd i hånd og bør vælges med hensyn til den komplette plejesituation.

Siddende forflytninger

Mennesker med kropsstabilitet, der har god styrke i deres arme og overkrop, kan muligvis udføre en siddende forflytning til bade- og toiletstolen (selvstændigt eller med hjælp). For at gøre processen lettere kan der bruges et glidebræt til forflytninger. En bruger med dette mobilitetsniveau kan være et godt match til en stol med drivhjul.



Stående forflytninger

Sit-to-stand hjælpemidler er velegnede til personer, der har god postural kontrol og kan bære deres egen kropsvægt, ligesom en person, der bruger en standard bade- og toiletstol. Denne type forflytning ind og ud af stolen fremmer aktivitet og stimulerer personens egen muskelstyrke. Et sit-to-stand hjælpemiddel optager lidt plads, hvilket kan være praktisk på badeværelser og toiletter.



Forflytninger med lift

Brugere, der ikke er i stand til at stå, skal løftes op i stolen ved hjælp af lift. Denne form for forflytning kan være en god kombination med en stol med tilt, da personen bliver støttet under hele processen og kan placeres langt tilbage i det tildede sæde. Til forflytningen kan enten en mobillift eller en loftlift anvendes.



Valg af produktløsninger

Fra en plejers perspektiv er det bedste produkt normalt det, der reducerer arbejdsbyrden mest. Brugere drager dog fordel af produkter, der aktiverer dem og hjælper dem med at opretholde deres fysiske evner. Dette kan være svært at afbalancere og kan med tiden konflikte. Derfor kræver det en holistisk tilgang og en afvejning af forskellige faktorer, der spiller ind.

Etac tilbyder produkter til en bred vifte af daglige behov og plejeindstillinger.

Følg linket for mere information om vores forflytningshjælpemidler.



Clean serien



Stor funktionalitet - uden kompleksitet

Clean er en prisvindende klassiker og en af Etacs absolutte bestsellere. Den blev introduceret for over 20 år siden og satte standarden for bade- og toiletstole, og fastholder stadig sin position den dag i dag. Dens fremragende hygiejniske og brugervenlige funktioner gør den populær i pleje- såvel som hjemmemiljøer rundt om i verden. En af Cleans mest markante egenskaber er det slanke design, der gør den nem at manøvrere og passe ind, hvor pladsen er knap.

Forskellige varianter



Højdejusterbar



Med drivhjul

Få et overblik

- Fylder ikke meget, let at køre
- Fleksibel og funktionel uden at være kompleks
- Passer perfekt til mange toiletter - også væghængte modeller
- Strømlinet design, der er nemt at holde ren

Fast ryglæn

Let at tørre af.
En blød rygpude fås som tilbehør.

Opretstående skubbebøjle

Gør det muligt at komme tæt på væggen og dermed forskellige toiletmodeller. Plejepersonale kan holde fast ovenfra eller på siderne.

Svingbare armlæn

Kan let flyttes eller fjernes for at lette forflytninger.

Bred sædeåbning

Giver nem adgang for personlig pleje og komfort for brugeren.

Fylder ikke meget

Let at betjene gennem smalle døråbninger, eller hvor pladsen er knap.

Fodstøtte

Unik fodstøtte, der foldes ind under stolen, når den ikke er i brug. Buet fodplade for komfort og afslapning.



Clean, højdejusterbar model

Swift Mobil-2 serien

En meget tilpasningsdygtig produktserie

Swift Mobil-2 blev udviklet på baggrund af vores hidtil mest omfattende bruger- og plejerundersøgelse og designet med ergonomiske funktioner og mange muligheder for individuel tilpasning. Produktserien indeholder adskillige varianter, flere justeringsmuligheder som standard og en bred vifte af tilbehør. Tilt-modellen har en unik funktion, hvor plejeren kan vippe med en høj grad af præcision og samtidig bevare øjenkontakten med brugeren.

Få et overblik

- Meget let at tilpasse til forskellige brugerbehov
- Justerbar hovedstøtte, armlæn, sædehøjde og fodstøtter
- Vi tilbyder XL-versioner til større brugere
- Et bredt udvalg af tilbehør

Forskellige varianter



Standard



Med Opret ryg



XL versioner



Tilt-funktion



Med drivhjul

Etac "Easy Clean" overflade

En unik overflade der er skridsikker og hygiejnisk - en perfekt balance mellem friktion og renlighed.

Sædeåbning bagtil

Bred åbning bagtil, fordybning foran og åbne sider for nem adgang.

Fodstøtter

Standard og Opret ryg-modellen er udstyret med Opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter (80209446) og XL-modellen med Svingbare og aftagelige fodstøtter (84001302).

Blødt ryglæn

Blødt, justerbart og hurtigtørrende. Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper omkring kørebøjlen for ekstra stabilitet.

Justerbare armlæn

Individuelt opklappelige armlæn, der kan justeres i højde og bredde.

Højdejusterbar

Let at justere til forskellige sædehøjder uden brug af værktøj.



Swift Mobil -2, standard model

Sådan vælger du den rigtige stol

1 Indledning

At vælge den rigtige mobile bade- og toiletstol kan være så simpelt som at beslutte, hvilken af de to seriers generelle egenskaber, der passer bedst, efterfulgt af at matche den rigtige kategori til den enkelte bruger. Det kan dog også handle om meget specifikke krav, der kun opfyldes af visse modeller. Afsnit A-B dækker et detaljeret behov relateret til brugere og plejepersonale, men også plejeomgivelser der er med til at påvirke, hvilken model der skal vælges. Hvis ingen af disse gælder, kan de generelle anbefalinger for hver variant og kategori bidrage til at indsnævre beslutningen.

2 Hvilken serie skal du vælge - generelle egenskaber

Swift Mobil serien

Kan især være velegnet til brugere, der har brug for flere individuelle indstillinger for at være godt understøttet og føle sig komfortable. Stolen kan ændres over tid, hvis brugerens mobilitet ændres, samt tilpasses til at kunne benyttes af flere forskellige brugere. Swift Mobil har adskillige justeringer som standard og tilbyder det største udvalg af tilbehør.



Clean serien

Praktisk for brugere der ønsker de generelle fordele ved en mobil bade- og toiletstol, men ikke kræver så mange individuelle tilpasninger. Clean tilbyder al den nødvendige funktionalitet samt en vis fleksibilitet - men uden yderligere kompleksitet. Velegnet til brugere og plejepersonale der ønsker så enkle funktioner som muligt.



3 Hvilken kategori man skal vælge til forskellige brugere

Modeller med drivhjul

Velegnet til personer, der:

- Har god kontrol og stabilitet i overkroppen
- Har tilstrækkelig armstyrke til at drive stolen
- Kan håndtere forflytninger og personlig hygiejne mere selvstændigt

Standard modeller

Velegnet til personer, der:

- Har postural kontrol og kan sidde oprejst
- Er i stand til selv at justere og korrigere deres siddestilling
- Kan klare nogle opgaver selvstændigt

Modeller med tilt-funktion

Velegnet til personer, der:

- Har moderat eller lav postural kontrol
- Kun kan sidde oprejst med god understøttelse, og skal tiltes for at placere sig godt i stolen
- Normalt kræver mere personlig assistance

A Brugerspecifikationer

Større brugere, XL-modeller

For større brugere er Swift Mobil-serien det bedste valg. Der tilbydes XL-modeller med bredere ryg og øget benplads samt en maksimal brugervægt på 160 kg.

Produktvalg

(se også næste side)

- Vælg en Swift Mobil XL model

Tip til brugere med følsomme rygge

Vores justerbare ryglæn i blødt netmateriale er perfekt til personer med følsomme rygge, da det former sig efter rygsøjlen. Det justerbare ryglæn i blødt netmateriale kan være en god mulighed for folk, der finder den faste ryg for hård. Den bløde ryg har et større areal, hvilket betyder, at den omfordeler trykket bedre. Derudover følger den rygkrumningen og fremmer en dejlig og skånsom støtte til ryggen. Det bløde ryglæn fås til alle vores bade- og toiletstole, enten som tilbehør eller inkluderet som standard.

B Specifikationer for plejerens indstillinger

Stolen skal benyttes til flere personer over tid

Hvis bade- og toiletstolen bruges til flere brugere over tid, fx på steder, hvor hjælpemidler ordineres og administreres gennem hjælpemiddeldepoter, er det godt med en stol, der kan tilpasses forskellige individuelle behov.

- Vælg en hvilken som helst Swift Mobil

“Ikke-professionelt” fagfolk

Hvis personer uden formel uddannelse skal håndtere stolen, kan det være en fordel at have en stol med en mere enkel funktionalitet frem for en masse avancerede funktioner, der muligvis ikke vil blive brugt.

- Clean har enklere funktionalitet

Skal primært bruges over vægmonterede toiletter

Nogle bade- og toiletstole kan være vanskelige at placere over væghængte toiletter. De, der primært bruger stolen til toiletbesøg og over et væghængt toilet, bør vælge en model, der er specielt designet til dette formål.

- Vælg Swift Mobil-2 med “Opret ryg” eller en Clean model

Pladsen er knap

Begrænset plads på badeværelset eller smalle gangarealer kan påvirke, hvilken stol du skal vælge. Døråbning(er) og gulvplads skal holdes op mod bade- og toiletstolens bredde og fylde, inden der vælges en model.

- Clean fylder mindst

Institutioner med særlige krav til rengøring/vask

I miljøer med særlige krav om at kunne maskinvaskes eller bruge spritservietter til rengøring af stolen vil en blød ryg muligvis ikke være det bedste valg. Her kan en model med fast ryglæn være et bedre valg.

- Clean har en fast ryg som standard

Guide til produktvalg

Etac mobile bade- og toiletstole



Produkt	Clean Højdejusterbar
Kategori	Højdejusterbar
Primære funktioner	Justerbar sædehøjde Slank i størrelsen, nem at køre og betjene Flere fod- og lægstøttemuligheder
Tilbehør Tilbehøret er kun et uddrag af et meget større sortiment. Se det komplette og løbende opdaterede sortiment på vores hjemmeside Etac.dk	Blød rygstøtte Bløde sæder Hofte-/brystbælter Bækkener andre Fodstøtter Tværlås
Sammenligning	
Sædehøjde	Justerbar 47,5-60 cm
Max. brugervægt	130 kg
XL version til større brugere	-
Totalbredde (passage gennem døre)	54 cm
Fast ryglæn	✓
Blødt ryglæn	Tilbehør
Sædeåbning	Bagtil
Type af armlæn	Svingbare
Justerbare armlæn	-
Type af fodstøtte (alle er højdejusterbare)	Hel fodplade - opklappelig
Hovedstøtte & hælstopper	-
Passer over væghængte toiletter	✓
Frihøjde under stolen, max. højde	53 cm (inkl. bækkenholder)
Indvendig bredde	39 cm

Produktsider

Besøg www.etac.dk for at se flere detaljer og varenumre.





Clean 24"	Swift Mobil-2	Swift Mobil Tilt-2	Swift Mobil 24"-2
Med drivhjul	Standard	Tilt-funktion	Med drivhjul
Let at manøvrere, let tilgængelige bremsehåndtag	Justerbar sædehøjde, ryglæn, fodstøtte og armlæn	Unik sidebetjent tilt, der giver mulighed for øjenkontakt mellem bruger og plejer	Baghjul placeret for maksimal kontrol
God plads foran hjulene letter sideværts forflytninger	Fås i XL-version til større brugere	Justerbar sædehøjde, ryglæn, fodstøtte, armlæn og hovedstøtte	Nemme sideværts forflytninger med god plads foran hjulene
	Inkluderer en variant med optimal tilpasning over væghængte toiletter	Fås i XL-version til større brugere	Justerbar sædehøjde, ryglæn, fodstøtte og armlæn
		Inkluderer hovedstøtte	XL-ryg kan tilkøbes som tilbehør
Blød rygstøtte Bløde sæder Hofte-/brystbælter Bækkener Tværlås	Bløde sæder Hofte-/brystbælter Bækkener andre Fodstøtter Tværlås XL ryg	Bløde sæder Hofte-/brystbælter Bækkener andre Fodstøtter Tværlås	Bløde sæder Hofte-/brystbælter Bækkener andre Fodstøtter Tværlås XL ryg
55 cm	Justerbar 44-59 cm	Justerbar 47,5-62,5 cm	Justerbar 45-60 cm
130 kg	160 kg	160 kg	160 kg
-	✓	✓	XL ryg kan købes som tilbehør
67 cm	58-64 cm	58-64 cm	74 cm
✓	-	-	-
Tilbehør	✓ (fast ryg fås som tilbehør)	✓ (fast ryg fås som tilbehør)	✓ (fast ryg fås som tilbehør)
Bagtil	Bagtil	Bagtil	Bagtil
Svingbare	Opklappelige	Opklappelige	Opklappelige
-	I højde eller bredde	I højde eller bredde	I højde eller bredde
Hel fodplade - opklappelig	Individuelle/Opklappelige og vinkeljusterbare/Svingbare og aftagelige	Individuelle/Opklappelige og vinkeljusterbare/Svingbare og aftagelige	Individuelle/Svingbare og aftagelige
-	Valgfrit	Hovedstøtte inkl. Hælstropper: valgfri	Valgfrit
✓	Ja, med Opret ryg modellen	-	-
49,5 cm (ekskl. bækkenholder*)	53,5 cm (inkl. bækkenholder)	58,5 cm	56 cm
39 cm	40 cm	40 cm	40 cm

* Med bækkenholdere: -15 mm





Mobile shower commodes_Product guide_04_DK01 - 2026 · Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities